



プレスセラミックス用りん酸塩系埋没材
セラベティ プレスベスト

プレス作業をさらに
“効率よく”、“正確”に。

Ceravety PressVest

Investment
for Pressable Ceramics




SHOFU INC.

Ceravety PressVest

セラベティ プレスベストは、プレス用セラミックスに使用するりん酸塩系埋没材です。
すぐれた操作性と鑄込み性を有しています。また埋没材との焼き付きを抑え良好な面性状を実現します。

ステップ(操作性)

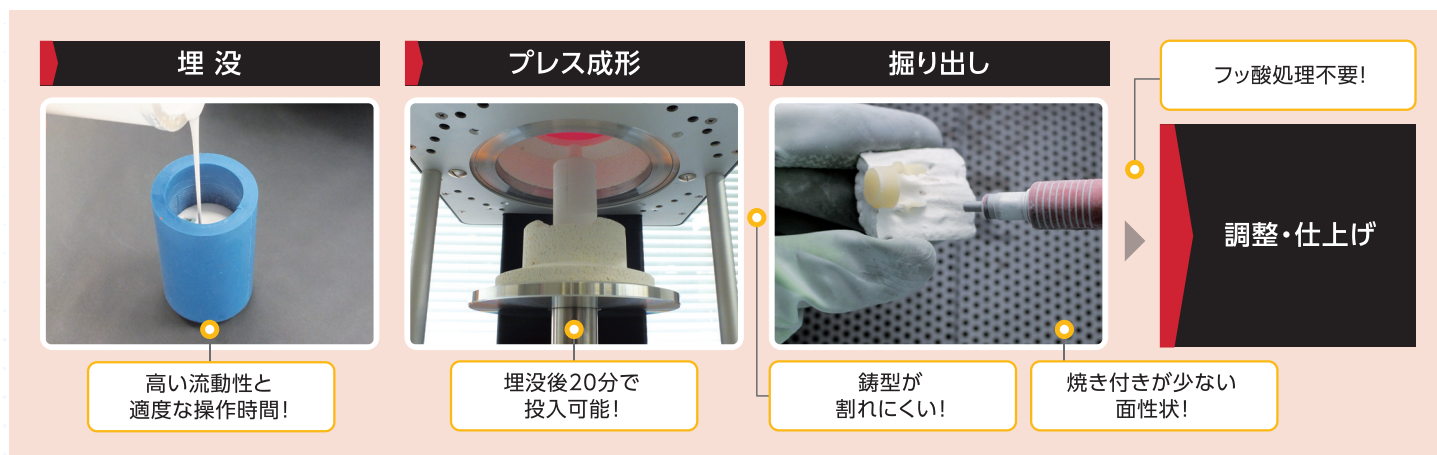

こだわりの性能

きれいなプレス面性状と良好な適合




膨張調整量の幅を広げ、さまざまな症例に対して良好な適合が可能となるよう設計しました。

プレス体への焼き付きを低減


セラベティ プレスベスト

埋没材がプレス体表面に焼き付きにくいので、プレス体の品質・適合性が向上します。

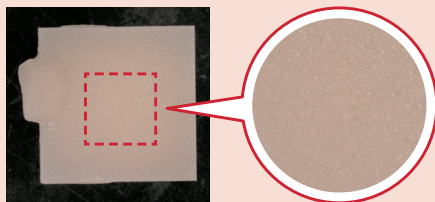

プレス後、ガラスビーズでのブラスト(0.4MPa)による掘り出し後の状態

「鑄型の割れにくさ」と「掘り出しやすさ」を両立

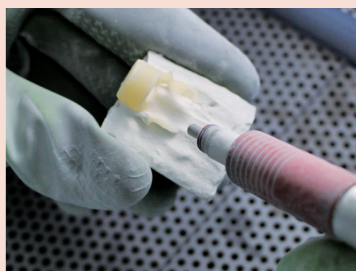

セラベティプレスベストは、松風独自の粒度調整により、鑄型強度を維持したままで、ブラスト処理による掘り出し性を向上させることに成功しました。安定したプレスと作業効率の向上に寄与します。

ガラスビーズによる掘り出し時間

セラベティ プレスベスト	74秒
弊社従来品	89秒

埋没材(粉)100gで作製した鑄型(直径12mm、高さ30mm)にガラスビーズを0.4MPaで一定方向にブラストし、貫通するまでの時間を計測。

販売名・一般的名称

販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
セラベティ プレスベスト	歯科高温鑄造用埋没材	一般医療機器 医療機器届出番号 26B1X00004000277

関連製品

管理医療機器 医療機器認証番号 301AFBZX00024000

歯科加圧成形用セラミックス

ヴィンテージ PRIME プレス

2g×7個入


3g×5個入



一般医療機器 医療機器届出番号 26B1X00004000273

歯科技工用セラミックス加熱加圧成形器

オストロマット 654i

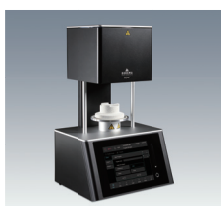

包装

セラベティ プレスベスト

粉 3kg (100g×30袋)

液 300mL

ご使用の際は電子添文等をよく読んでお使いください。

取扱い店



世界の歯科医療に貢献する

株式会社 松風

● 本社: 〒605-0983 京都市東山区福福上高松町11 お客様サポート窓口(075) 778-5482 受付時間8:30~12:00 12:45~17:00(土日祝除く) www.shofu.co.jp

● 支社: 東京(03)3832-4366 ● 営業所: 札幌(011)232-1114/仙台(022)713-9301/名古屋(052)709-7688/京都(075)757-6968/大阪(06)6330-4182/福岡(092)472-7595