

販売名・一般的名称		
販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
ビューティセム ベニア	歯科用コンポジットレジンセメント	管理医療機器 医療機器認証番号 228AFBZX00102000
ビューティセム トライイン	歯科用色調適合確認材料	管理医療機器 医療機器認証番号 228AFBZX00103000

包装・価格



ビューティセム ベニア
2.0g(1.2mL)…
(松風ニードルチップ 5個付)



歯面・各種補綴装置の前処理に
ビューティボンド Xtreme
5.0mL…



ビューティセム トライイン
1.2mL…
(松風ニードルチップ 5個付)



リン酸非配合により、
脱灰がマイルドな歯面コンディショナー
松風エナメルコンディショナー
3.0g…




松風Vディッシュ
25枚…



ディスボブラシ ファイン
100本…
【種類】イエロー、ピンク

ビューティセム ベニア 操作手順

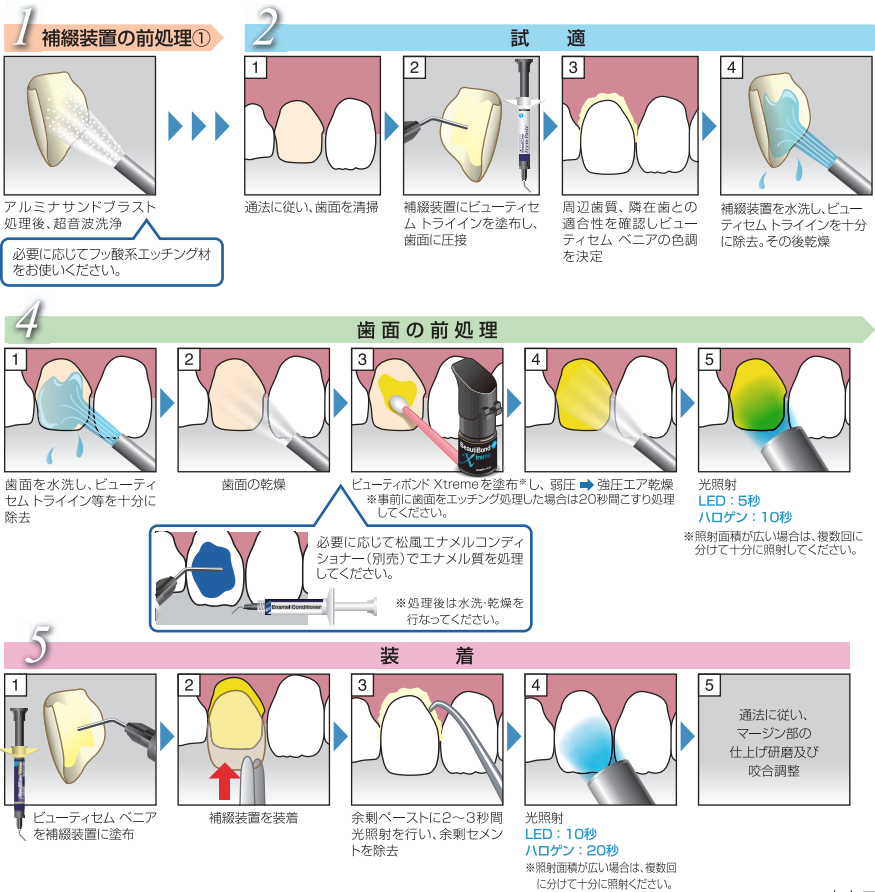

ご使用の際は添付文書などをよく読んでお使いください。

取扱い店

カタログに掲載の価格は2021年4月現在の標準医院価格（消費税抜き）です。



ラミネートベニア用レジンセメント
ビューティセム ベニア



光 重 合 型

BeautiCem Veneer



明度で選ぶシンプルな色調システムの
ラミネートベニア用レジンセメント




色調適合性のポイントは
レジンセメントの**明度** (明るさ)
シンプルで選択しやすい色調システム

クリアな色調なので
歯質の色調を生かしたい
場合におすすめ



POINT

L-Value、M-Value、H-Value は
一定間隔で明るくなるよう設計していますので、
色調を選択する際に感覚が
掴みやすいです。

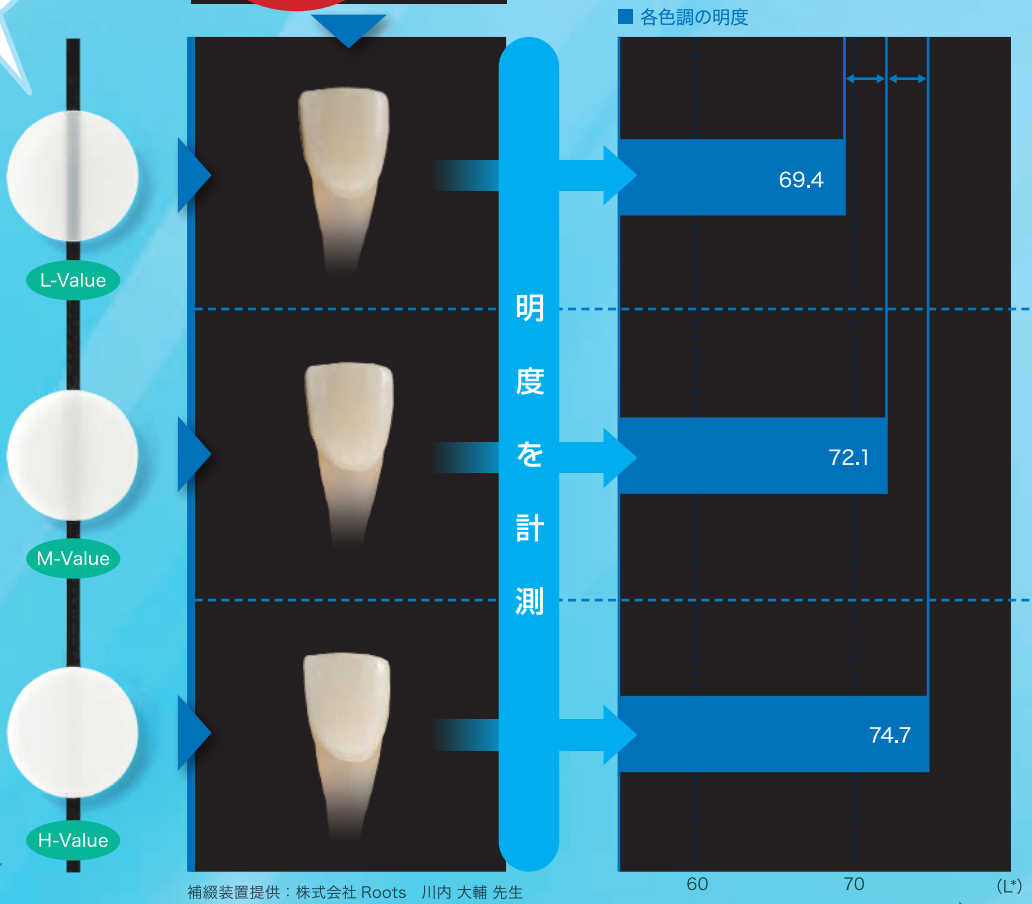

補綴装置提供：株式会社 Roots 川内 大輔 先生

BeautiCem Veneer



SHOFU INC.




（ビューティセム ベニアは口腔内環境の健全化に寄与する） S-PRG フィラー を含有しています

S-PRG フィラーはビューティセム ベニアに含まれている
松風独自開発のフィラーです。

口腔内環境の健全化に寄与する6種類のイオンが
セメントマージン周辺および歯質へと徐放され、
以下の特長を発揮します。


酸中和能の発現

S-PRG フィラーの働きにより、周囲環境を
中性領域に移行させます。

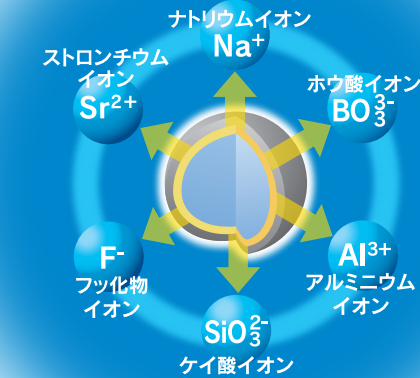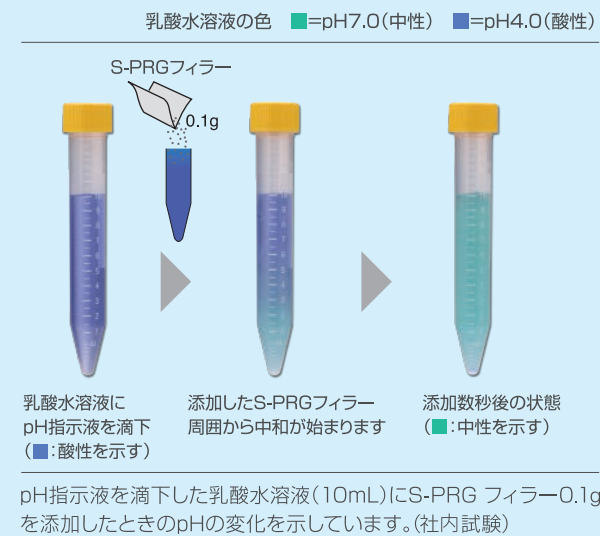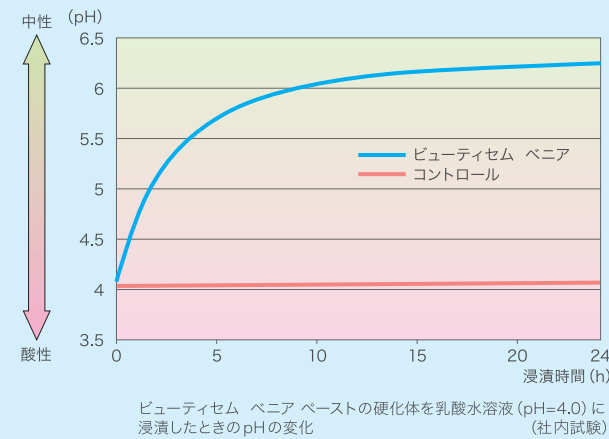


イオンリリース&フッ素リチャージ

S-PRG フィラーからフッ素をはじめとする6種類のイオン
が持続的にリリースします。また、フッ素含有ハミガキや
ジェルを使用することで、口腔内のフッ化物イオンをリ
チャージします。

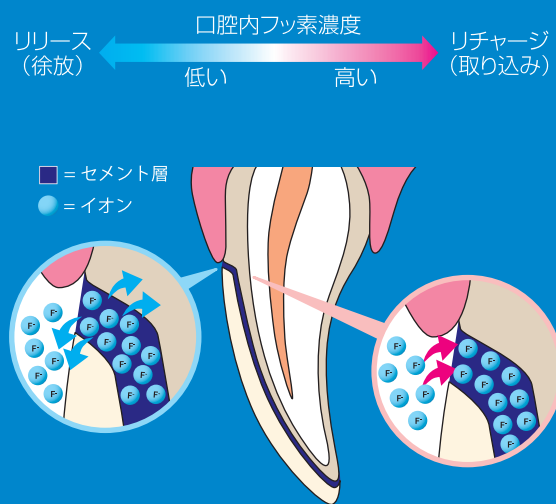

1 長期的に初期の色調を維持


重合開始材にアミンを使用していないため長期間経過しても変色しにくいです。

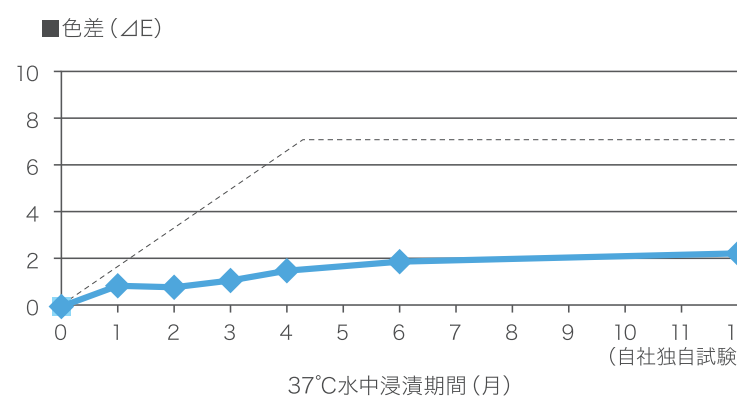

「ビューティボンド Xtreme」は、
コンポジットレジンや金属、陶材など
マルチに接着できる
ボンディング材です


2 安定した接着強度をもたらす接着システム

ラミネートベニアの支台歯は形成により、象牙質が露出している場合があります。前処理材として使用する
「ビューティボンド Xtreme」は、リン酸によるエッチング処理が不要なセルフエッチングシステムですので、象牙質に対しても
安定した接着性を発現します。

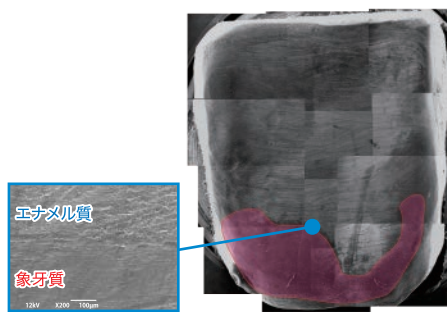

切端部に比べエナメル質の薄い*歯頸部は形成により
象牙質が露出してしまうことがあります
※エナメル質の厚さは歯頸部 0.35±0.15mm、
切端部 1.25±0.35mm と言われています。



★象牙質の露出が多い症例でも高い接着力を発揮します。

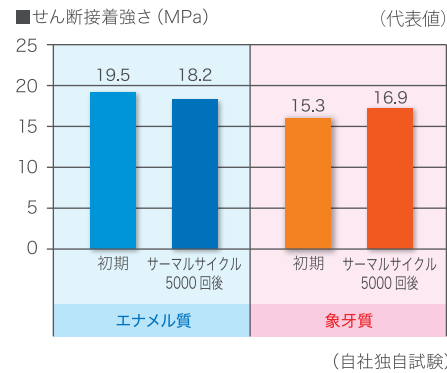

エッチング処理を行いたい場合
リン酸非配合で脱灰がマイルドな
「エナメルコンディショナー」を
おすすめします。

3 操作しやすい光重合タイプ

硬化のタイミングを任意に設定できる光重合タイプなので、ベニアをじっくりポジショニングできます。
フロアブルレジンと同様のシリンジを採用しており、押し棒からシリンジ先端までの距離が短いため、操作が容易です。

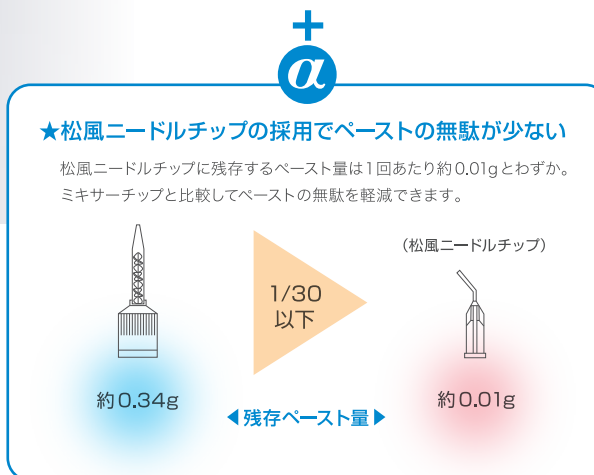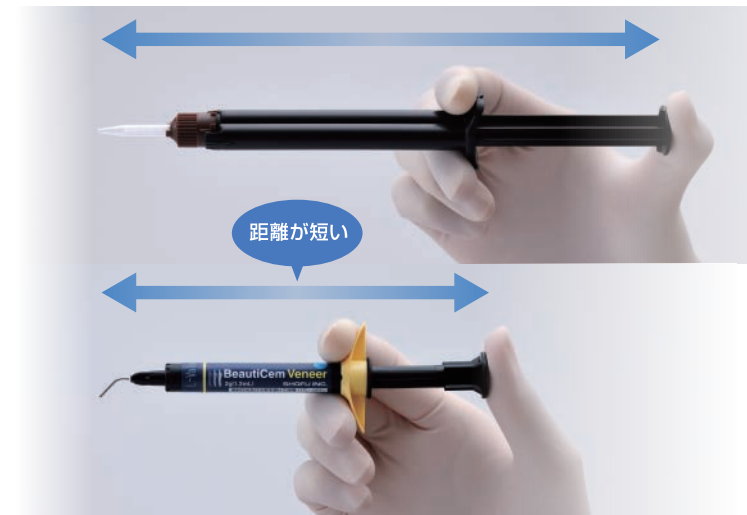

基本の色調として明度の異なる3色をご用意。
幅広い症例に対応できます。

例えば、まず最も透明性の高い L-Value を試適し、少し明るくしたければ M-Value、
更に明るくしたければ H-Value を選択するだけ。容易にセメントの色調を選択できます。



111 のCRを除去し、支台歯を形成



L-Value を試適




M-Value を試適



H-Value を試適



装着2年後

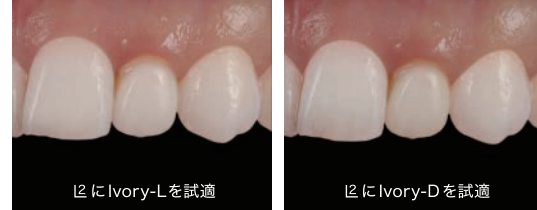


装着2ヶ月後

★試適時と装着時で色調に差がみられない
★装着後、2 年が経過しても変色はみられず
美しさをキープ


写真提供：貞光歯科医院 院長 貞光 謙一郎 先生

アイボリー色も
ご用意しています

縁上にマージンが存在するベニア症例や
インレー、オンレーに

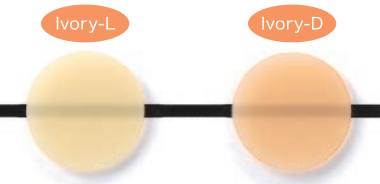


縁上マージンの症例

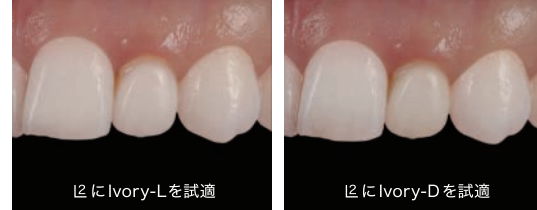

装着2ヶ月後

写真提供：代官山アドレス歯科クリニック 院長 大河 雅之 先生

試適時に仕上がりの色調を確認できるトライインペースト (試適用ペースト) を全色をご用意

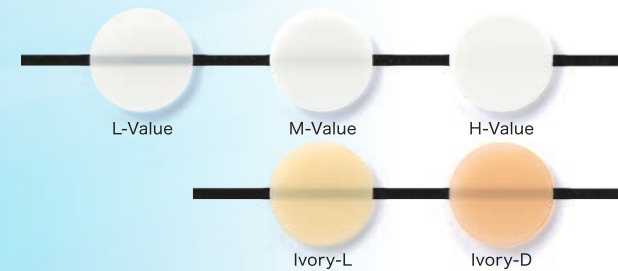

水溶性なので
簡単に水洗できます