



ハイブリッド型硬質レジン フローアブルペースト
セラマージュ アップ°

100
since 1922 SHOFU
2022
100年先にも輝く笑顔を
Bright smiles for another 100 years



Reimport from Europe

SHOFU INC.

Official partner



Minimally Invasive
Cosmetic Dentistry

販売名・一般の名称



販売名	一般の名称	承認・認証・届出番号
セラマージュ アップ	歯冠用硬質レジン	管理医療機器 医療機器認証番号 227AFBZX00106000

包装・価格

セラマージュ アップ 5g(3.3mL)

【色調】37色	サービカル	3色	AC1、AC2、BC1
	オベークデンティン	8色	ODA1、ODA2、ODA3、ODA3.5、ODA4、ODrootA、ODB1、ODB2
	ボディー	8色	A1B、A2B、A3B、A3.5B、A4B、rootAB、B1B、B2B
	インサイザル	5色	56、57、58、59、60
	トランスルーセント	2色	T-Glass、GUM-T
	コンセントレイト	11色	W、GUM-V、GUM-Br、GUM-R、GUM-L、GUM-D、GUM-Or、GUM-DP、GUM-LP、GUM-P、GUM-SP



セラマージュ アップ ウィング

セラマージュ アップ チップ

関連製品

管理医療機器 認証番号
226ACBZ100068000



歯科切削加工用レジン材料
トリニア
(ディスクタイプ)
色調 2色 アイボリー、ピンク
φ98mm×15mm
φ98mm×25mm
(ブロックタイプ)
色調 1色 アイボリー
H40×W19×D15mm
H55×W19×D15mm

管理医療機器 認証番号
21400BZZ00188000



歯科セラミックス用接着材料
セラレジンボンド
セット・・・¥11,000
ボンドⅠ 6mL
ボンドⅡ 5mL

管理医療機器 認証番号
21400BZZ00224000



歯科金属用接着材料
メタルリンク
5mL

管理医療機器 認証番号
218AIBZX00019000



歯科セラミックス用接着材料
AZプライマー
5mL

管理医療機器 認証番号
222AKBZX00011000



高分子系歯冠用着色材料
ライトアート
フルセット(全15色)
カラーペースト 1mL
クリアリキッド 6mL

管理医療機器 認証番号
223AKBZX00235000



歯科レジン系補綴物表面滑沢硬化材
レジングレース ジェルセット
セット

管理医療機器 認証番号
223AKBZX00235000



歯科レジン系補綴物表面滑沢硬化材
レジングレース リキッド
6mL



ナイロン筆
ユニブラシ オーバルタイプ
1セット
Lタイプ: 柄1本、筆先10本(Lタイプ筆先)
Sタイプ: 柄1本、筆先10本(Sタイプ筆先)




ナイロン筆
ユニブラシ No.5
柄1本、筆先10本

一般医療機器 届出番号
26B1X00004000280



歯科技工用重合装置
ソリディライト LED
一式

一般医療機器 届出番号
26B1X00004000216

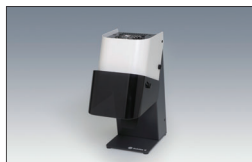

歯科技工用重合装置
松風サブライト V 一式

ご使用の際は添付文書等をよく読んでお使いください。

取扱い店




世界の歯科医療に貢献する

株式会社 松風

●本社:〒605-0983京都市東山区福福上高松町11 お客様サポート窓口(075)778-5482 受付時間8:30~12:00 12:45~17:00(土日祝除く) www.shofu.co.jp
●支社:東京(03)3832-4366 ●営業所:札幌(011)232-1114/仙台(022)713-9301/名古屋(052)709-7688/京都(075)757-6968/大阪(06)6330-4182/福岡(092)472-7595

セラマージュ アップはフローアブルペーストのハイブリッド型硬質レジンです。
高い機械的強度を有しているため、弊社製品セラマージュ デュオと同じ用途に使用することができます。

歯冠色に加え、歯肉色を豊富にラインナップしているため、
近年増加しているインプラント上部構造体の歯肉部の再現に適しています。

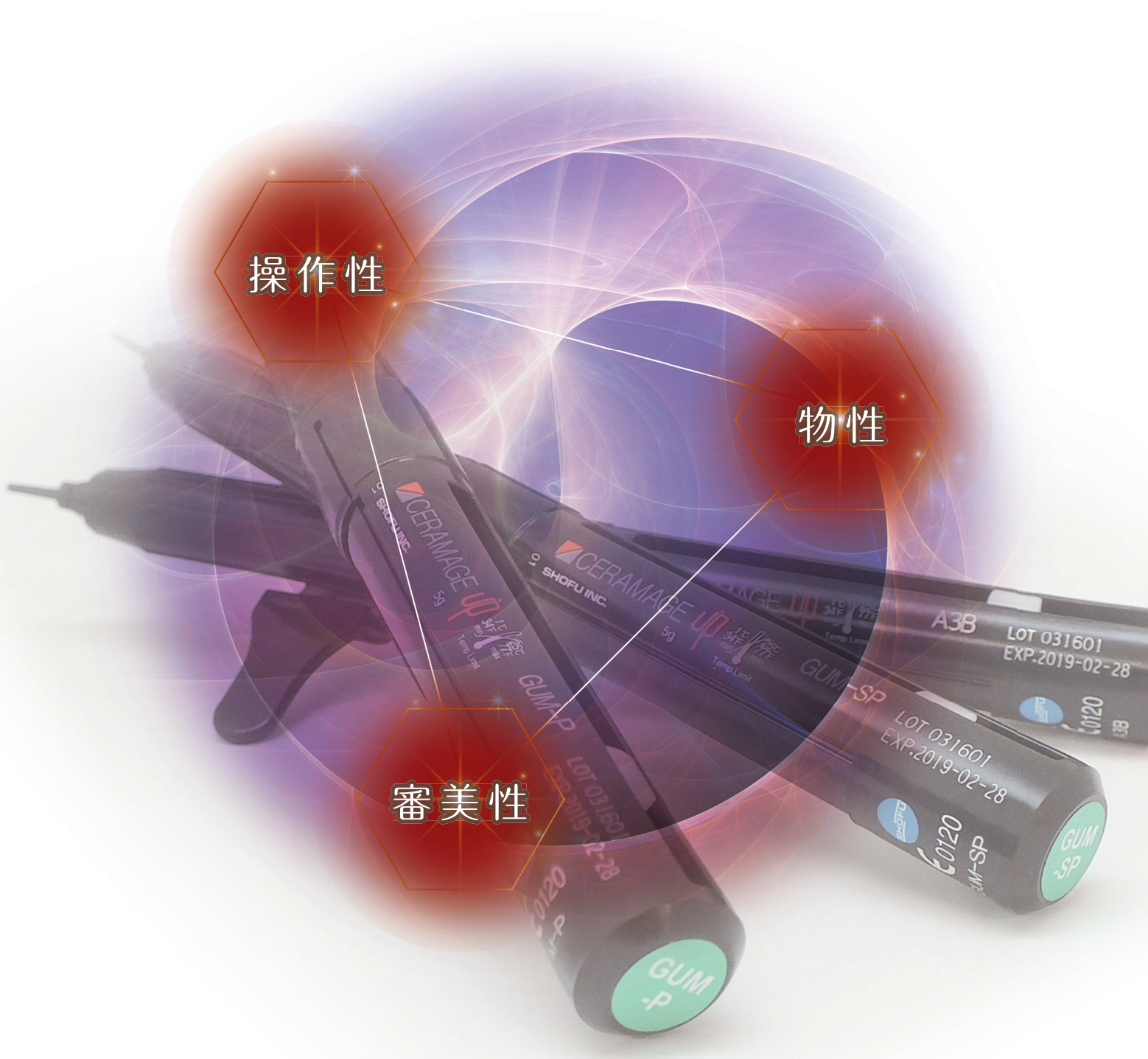

PFSフィラーおよびHDウェビーモノマーの技術を融合し、
操作性・物性・審美性の並立を実現

C A S E 使 用 例

1 をセラマージュ アップで築盛



写真提供：多保 学 先生(TABO DENTAL CLINIC)
旗手 勝浩 先生(ippin dental laboratory)

CAD/CAM 用グラスファイバー強化型レジンディスク「トリニア」をフレーム材に使用し、
セラマージュ、セラマージュアップを用いて築盛した上顎フルアーチのインプラント上部構造体




写真提供：関 錦二郎先生(有限会社 関錦二郎商店)

操作性

陶材築盛のような操作感

糸引きが少なく、垂れにくい
ペースト性状のため、陶材築
盛のような感覚で操作するこ
とが可能です。

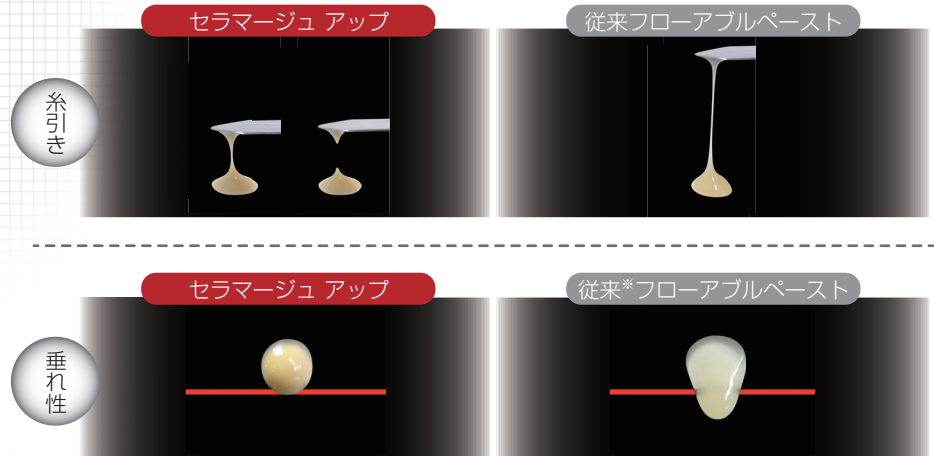

※同じ質量のコンポジットレジンがガラス板に採取し、1分間垂直に立てた状態
※従来フローアブルレジンは：セラマージュ フローアブルコンポジットレジン

独自形状の新規シリンジを採用

インスツルメントや、筆で間接的に築盛するだけでなく、
シリンジを用いて直接築盛することも可能です。




※従来品フローアブルレジンは：セラマージュ フローアブルコンポジットレジン



審美性


セラマージュの審美特性を継承

セラマージュの色調・透明性・オパール効果を継承しています。また、
天然歯に近似した光透過性を有しているため自然観あふれる色調
を再現できます。

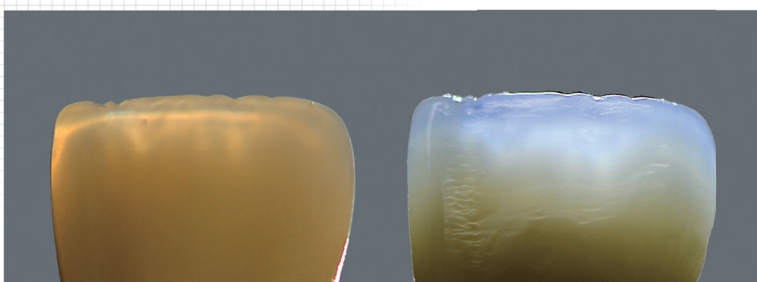

混色が可能

セラマージュ アップは異なる色調を
混合することで、幅広い色調再現が
可能です。

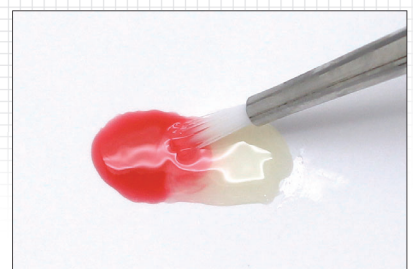

※ペーストを混ぜて使用する場合は、気泡が混入しないように
注意して混合します。
※セラマージュ デュオと混ぜて使用することはできません。

物性

耐摩耗性、耐着色性の向上

PFSフィラーおよびHDウェビーモノマーの独自技術の融合により、従来のフローアブルペーストよりも耐摩耗性、耐着色性にすぐれています。


代表値						
製品名	曲げ強度 ¹⁾ (MPa)	曲げ弾性率 ¹⁾ (GPa)	衝突回転摩耗 ²⁾ 自己摩耗量 (μm)	衝突回転摩耗 ²⁾ 対合歯(エナメル) 摩耗量 (μm)	ビッカース硬度 ¹⁾ (HV0.2)	耐着色性 ³⁾ (ΔE)
セラマージュ アップ	140	6.4	13.0	1.3	40	6.0
従来*フローアブルペースト	132	6.0	70.2	2.5	40	9.3

*従来フローアブルレジン: セラマージュ フローアブルコンボジットレジン


試験方法: 1) JIS T 6517, ISO10477, 2) アラバマ試験方式, 3) 自社試験

PFSフィラー

セラマージュの「操作性」「物性」「審美性」の並立を実現した、弊社独自開発の特殊構造無機フィラーをセラマージュ アップにも採用しています。

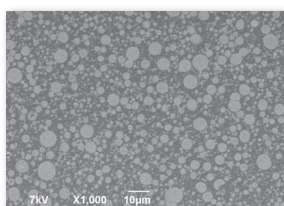


セラマージュ アップ

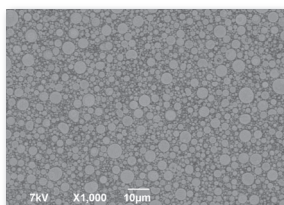


セラマージュ

HDウェビーモノマー

レジンマトリックス全体の反応性が高まり、分子レベルでの結合がより密になりました。

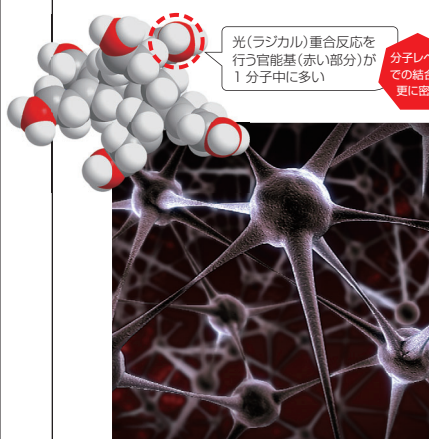

HDウェビーモノマーの結合イメージ

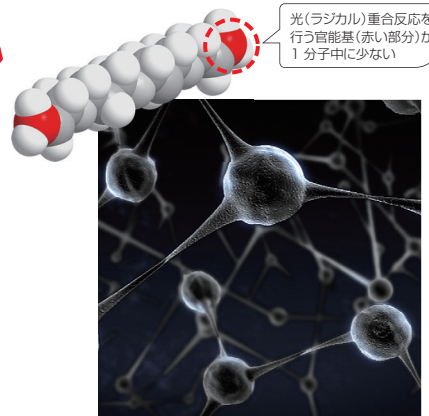

従来品*のモノマー結合イメージ

*従来品フローアブルレジン: セラマージュ フローアブルコンボジットレジン

カラーテーブル

【セラマージュのすぐれた色調を継承】

ガム色のラインナップが充実しており、歯肉部の色調再現が容易に行えます。

カラー	A1	A2	A3	A3.5	A4	rootA	B1	B2
サービカル	—	 AC1		 AC2		—	—	 BC1
オペークデンティン	 ODA1	 ODA2	 ODA3	 ODA3.5	 ODA4	 ODrootA	 ODB1	 ODB2
ボディー	 A1B	 A2B	 A3B	 A3.5B	 A4B	 rootAB	 B1B	 B2B



Light-curing Flowable Composite for
Crowns & Bridges, Inlays and Veneers



インサイザル	 56	 57	 58	 59	 60
トランスルーセント	 T-Glass	 GUM-T			

コンセントレイト	 W	 GUM-V	 GUM-Br	 GUM-R	 GUM-L	 GUM-D	 GUM-Or	 GUM-DP	 GUM-LP	 GUM-P	 GUM-SP
----------	--	--	---	--	--	--	---	---	---	--	---



印刷物のため実物とは色調が異なる場合があります。

ガム色築盛ステップ《歯肉色》

1 フレームの前処理



あらかじめ、歯冠概形の形態修整までを終え、歯肉色築盛部の前処理を終えた状態です。

4 辺縁歯肉の下地築盛

GUM-L + GUM-Or + GUM-SP



付着歯肉の下地の色調を再現します。
明るく発色性のある色調を選択します。また、必要に応じて複数の色調を選択して色調表現を行います。
築盛後、光重合（予備重合）を1分間行います。

2 血管色の再現

GUM-V
GUM-R
(ライトアート R)



歯肉部の可動粘膜に見られる血管色を再現します。
築盛後、光重合（予備重合）を1分間行います。

5 キャラクタライズ

A1Bなどボディー色
GUM-R



骨隆起を再現します。
骨隆起は歯冠色（ボディー、オパークデンティン）などを用いて築盛します。
また、骨隆起の築盛後、必要に応じてその表層をGUM-Rなどで調整します。
築盛後、光重合（予備重合）を1分間行います。

3 辺縁歯肉の下地築盛

GUM-Or



歯間乳頭の内部に見られる健康的で明るい色調を再現します。
築盛後、光重合（予備重合）を1分間行います。

6 歯肉上皮の築盛

全体に59、GUM-Tなどで築盛



歯肉部全体の上皮を再現します。
上皮はガムトランスまたはインサイザルを用いて築盛します。この際、下地色と表面キャラクタライズの発色が減少するので、厚み、色調選択に注意し、歯肉の最終形状をイメージしながら形態を付与します。

マテリアルの選択

セラマージュ アップ、セラマージュ デュオは各マテリアルに応じたプライマーを使用することでフレーム材等を選ばずに築盛することが可能です。



各材料の使用方法は添付文書をご参照ください。

ライトアートで 更にリアルなキャラクタライズ

ライトアートは内部ステイン法で使用する色調調整材です。
汎用性の高い12色に加え、インクジェットプリンター等でも使用されている色料の三原色である「シアン」「マゼンタ」「イエロー」をラインナップしており、オリジナル色のカスタマイズも容易に行えます。

★シアン、マゼンタ、イエロー + ホワイト、ブラックで
色調再現の幅が無限大に広がります。

