

販売名・一般的名称

販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
グラスアイオノマー FX ウルトラ	歯科充填用グラスポリアルケノエートセメント	管理医療機器 医療機器認証番号 227AFBZX00037000

包装




グラスアイオノマー FX ウルトラ
ミニセット

【内容】粉 10g、液 5.2mL(6.5g)、粉量計 1
【色調】A3



グラスアイオノマー FX
ウルトラ
(粉量計付)

【内容】粉 15g
【色調】5色(乳歯色、A2、A3、A3.5、CV)

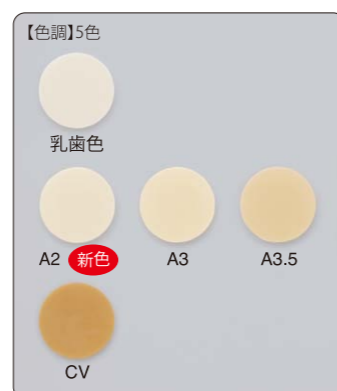

印刷物のため、実物とは色調が異なる場合があります。



グラスアイオノマー FX
ウルトラ

【内容】液 8mL(10g)

関連製品



■グラスアイオノマーセメント充填用
GIシリンジ用ノズル&プラグ

【包装】
ノズル、プラグ 各100個



■グラスアイオノマー表面硬化促進用
松風バニッシュ

【包装】
10g



■充填用ディスペンサー
ビューティフィルチップディスペンサー

【包装】
1個



■グラスアイオノマー表面硬化促進用
松風ココアバター

【包装】
10g

取扱い店

ご使用の際は添付文書などをよく読んでお使いください。



世界の歯科医療に貢献する

株式会社 松風

●本社:〒605-0983京都市東山区福福上高松町11・TEL(075)561-1112(代)

●支社:東京(03)3832-4366 ●営業所:札幌(011)232-1114/仙台(022)713-9301/名古屋(052)709-7688/大阪(06)6330-4182/福岡(092)472-7595

<http://www.shofu.co.jp>

1801AJJSI



充填用グラスアイオノマーセメント

グラスアイオノマー FX ウルトラ

光照射不要 Packable Direct Restorative

Glaslonomer FX ULTRA

「ボソボソしない練和感」
「慌てることのないシリンジ操作」

FXウルトラは「誰でも・簡単に・練和できる」
充填用グラスアイオノマーセメントです。



基本色以外に「高齢者の根面」や「乳歯」にマッチした色調をラインナップ

A2 追加
発売



SHOFU INC.

「練り込みやすく」、「充填しやすい」操作性

練りこみやすい練和物性状

シリンジ操作も軽い力で押し出しやすい

べたつかず適度に弾力があり充填しやすい

排出可能時間も長く、慌てることなく操作できます

隙間なく、隅々まで充填できます。

高齢者の根面う蝕に適した「CV色」、唾液コントロールの難しい小児に適した「乳歯色」をラインナップ

CV色を充填

根面の濃い色調にほどよくマッチ

乳歯色を充填


白く不透明な乳歯になじみやすい

5色をご用意しております。

乳歯色 A2 新色 A3 A3.5 CV

印刷物のため、実物とは色調が異なる場合があります。

臼歯部の充填にも耐え得る高い機械的特性

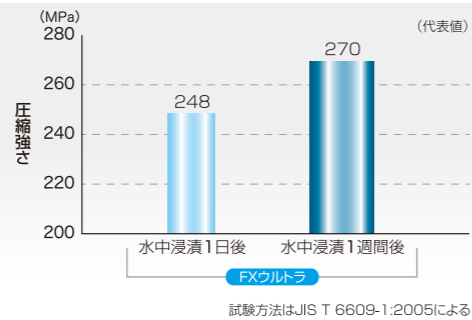

従来のガラスアイオノマーセメントより透明性を向上

新規に開発したフルオロアルミノシリケートガラスの採用により透明性が向上しました。

FXウルトラ (A3) 自社従来品 (グレー) (厚さ1.0mm)

即日研磨可能

練和開始から6分で研磨可能です。

カリエスリスクの高い症例、防湿が難しい症例、在宅診療にコンポジットレジンより充填用ガラスアイオノマーセメントを **お薦め** します。

このようなケースにお薦めます

ガラスアイオノマーセメントは、「高いフッ素徐放性」、「光照射不要」、「一括充填可能」、「自己接着性」等の特長を持っており、さらに防湿が難しい症例にも使えるため、以下のような症例に適しています。

- ▶ う蝕病変が歯肉縁下に及んでいる等、防湿が難しい部位の充填修復
- ▶ カリエスリスクの高い症例
- ▶ 在宅診療での充填修復
- ▶ 乳歯や萌出直後の幼若永久歯の充填修復
- ▶ 軟化象牙質を意図的に残した場合等、経過観察を要する症例の暫間修復
- ▶ 光照射が難しい部位の充填修復



ガラスアイオノマーセメントならではの豊富なフッ素徐放性

FXウルトラは、自社従来品よりも高いフッ素徐放性を示します。また、フッ素入り歯磨きペーストによるホームケアにより、充填物にフッ素がリチャージされ、高いフッ素徐放性が維持されます。

