



メルサーージュ AP プロ

歯みがき類 口腔化粧品 歯科医院用

- 65g
 ● 香味：ユズミント
 ● パラベンフリー

関連製品

販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
メルサーージュ	歯科用口腔内清掃キット	一般医療機器 医療機器届出番号 26B1X00004000147



メルサーージュ
各1本 40g
 ● フッ素500ppm配合
 レギュラー(粗粒・ミント)
 ファイン(細粒・レモン)



メルサーージュ プラス
 薬用歯磨 医薬部外品
 38g
 ● フッ化ナトリウム950ppm配合
 ● 塩酸クロルヘキシジン配合
 ● 香味：オレンジ



メルサーージュ(カップ) 各1箱 36本入
 再使用禁止
 最高許容回転速度：2,000min⁻¹
 CAタイプ
 No.1P
 No.2、No.3
 No.4P



メルサーージュ(カップ) 各1箱 36本入
 再使用禁止
 最高許容回転速度：2,000min⁻¹
 スクリュータイプ
 No.12、No.13
 No.14P
 No.15P

ご使用の際は添付文書等をよく読んでお使いください。

このカタログに記載の価格は2023年5月現在の標準医院価格(消費税抜き)です。

取扱い店



トリートメントペースト
メルサーージュ AP プロ




メルサーージュ AP プロで
 上質なトリートメントケアを



卵殻由来

「ヒドロキシアパタイト※」配合 ※ 清掃剤

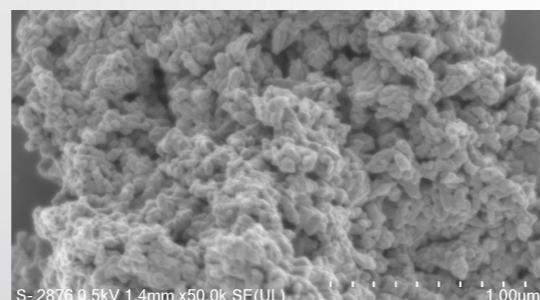

ヒドロキシアパタイト※の平均粒径(2次粒子)は約5µm、1次粒子(20~50nm)が凝集しています。チョコクやベビーパウダーの原料に使われてきた粉体本剤より粒子は細かく滑らかです。


アレルギーを含まない ヒドロキシアパタイト※

本品に含有されているヒドロキシアパタイトは国内の衛生管理された卵殻を原料として使用しています。約1000℃の高温で焼成・精製しているためアレルギーは含まれておりません。


■ 製造工程



電気炉焼成

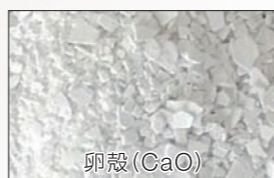

独自の湿式製法

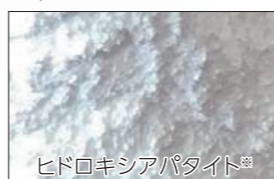

すっきりさわやかな
ユズミントフレーバー
パラベンフリー

メルサージュ AP プロはPMTTC後のトリートメントケア以外に以下のケースにもお試しく下さい。

- ステインが付着しやすい方
- ホワイトニング後のトリートメント
- エナメル質にクラックや白濁がみられる歯のう蝕予防
- ディボンディング後のエナメル質のトリートメント
- 萌出中、萌出後の脆弱な永久歯のう蝕予防

使い方は動画はコチラ▶




Example1 ステインが付着しやすい方

PMTTC後、メルサージュカップNo.14Pにメルサージュ AP プロをたっぷり採取し、歯面全体にすり込むように塗布する。



Example2 隣接面にクラックや白濁がみられる歯のう蝕予防に

PMTTC後、メルサージュ AP プロをメルサージュカップNo.13と併せてデンタルフロスを使用して隣接面に塗布する。

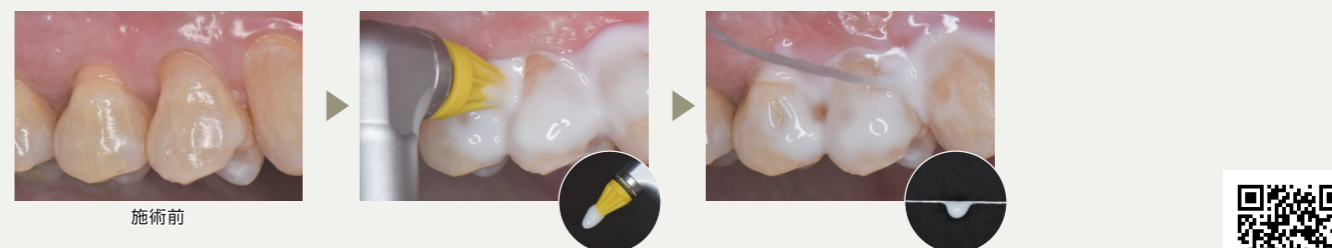


症例紹介はコチラ▶



Example3 萌出中、萌出直後の脆弱な永久歯のう蝕予防

萌出中や萌出直後の永久歯は石灰化が不十分で、表面には凹凸が多く着色やプラークが停滞しやすく酸に侵されやすいため、幼若な永久歯をう蝕から守るためにメルサージュ AP プロを使用。

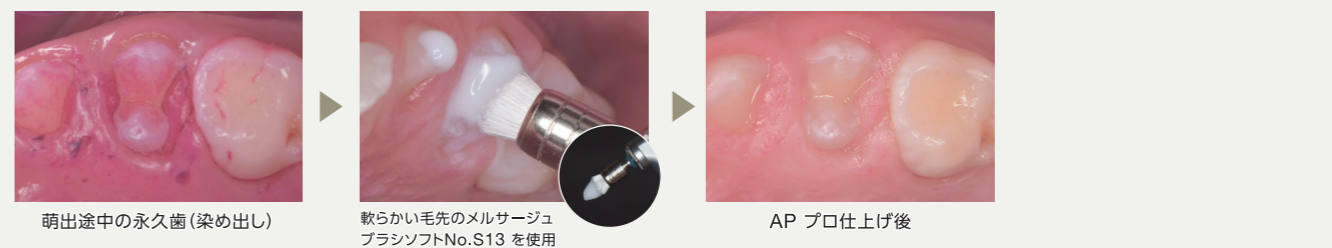

Example4 アライナーのアタッチメント除去後のトリートメント

