

Merssage



メルサージュ エピック 2in1 NEO

歯科用多目的超音波治療器

歯科医院用

2つの機能を1台に
アップデートした操作性と上質な快適さ



超音波スケーラーとパウダーデバイス
2つの機能を搭載したメルサーージュ エピック 2in1 NEO



2
1

MAINTENANCE SYSTEMS IN


MerSSage E-PICK 2in1 NEO

SHOFU INC.

メルサーージュ オーラルケアサイクル ～生活者のお口の健康を、歯科医院のみなさまと共に。～

メルサーージュ エピック 2in1 NEOは
メルサーージュ オーラルケアサイクルの一翼を担います。

Mer^{ss}age

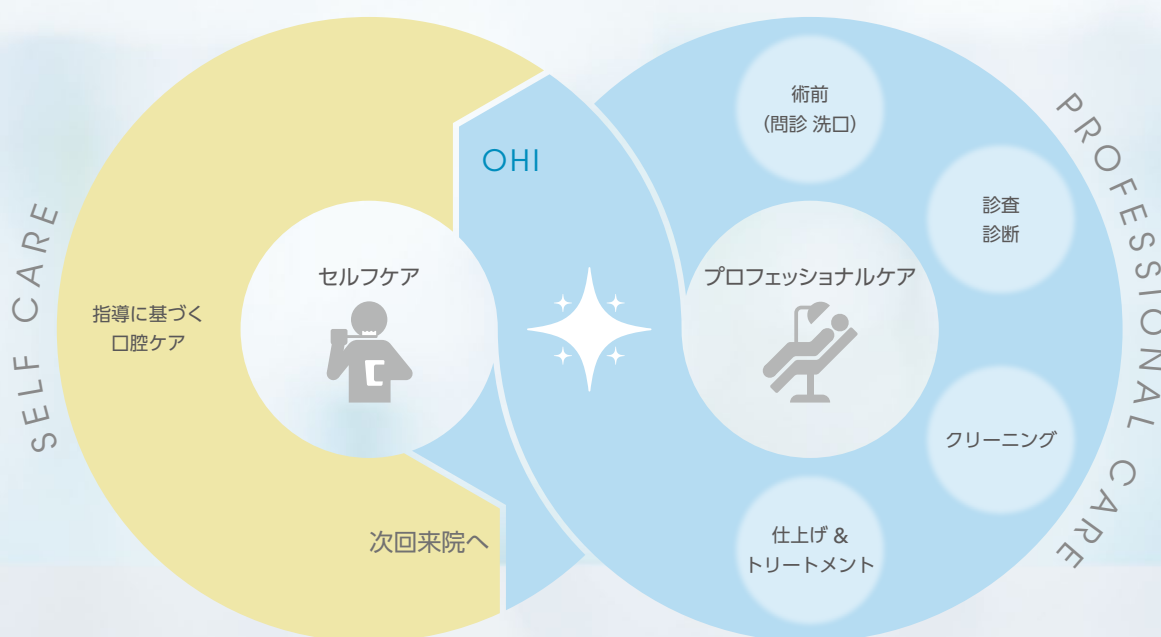

“プロフェッショナルケア”と“セルフケア”の両輪が循環することで生活者の健やかな口腔を維持できると考えます。
この流れは歯科医院のみなさまによる確かな選択や提案により生み出されます。メルサーージュは生活者と歯科
医院とをつなぐ架け橋となり、定期的な歯科医院への来院が生活者の暮らしの一部となることを目指します。



簡単に取り出せる注水ボトル

注水ボトルは簡単に取り外しできる設計で、使いやすさと利便性を追求しています。

さらに、35℃までの温水にも対応しています。



耐久性にすぐれたライト付チタン製ハンドピース

チタン製ハンドピースを採用することで、再生処理に対する耐久性が向上。表面には独自のDURAGRIPコーティングを施し、滑りにくく安定した操作性を実現します。

また、LEDライト搭載により、視認性を高め、精度の高い施術をサポートします。



直感的に調整できるダイヤル式水量コントロール

水量調節にはダイヤル方式を採用し、正確かつ直感的なコントロールが可能です。

左右のダイヤルは、超音波スケーラーとパウダー機能にそれぞれ対応しています。



スマートディスプレイパネル

使用モードの設定をシンプルに表示し視認性を向上。簡単に直感的な操作をサポートします。



患者さまにやさしい加温機能

超音波スケーラー・パウダーデバイスの両方で微温水施術が可能。微温水により低刺激で、患者さまの快適性を向上します。

※注水ボトルからの経路は加熱できません。

ULTRASONIC SCALER



新機能を搭載したメルサージュ エピック 2in1 NEO

POWDER MAINTENANCE



ユニットとチャンバーの完全独立構造

チャンバーからハンドピースまでを一体化し、ユニット本体とは独立した構造を採用。万一、粉詰まりが発生しても、ユニットを分解する必要がなく、パーツ単位での交換・メンテナンスが可能です。

ユニット内部はエアーと水回路のみで構成されたシンプルかつ効率的な設計です。



ペリオハンドピース用ジェットノズル

ペリオハンドピース用ジェットノズルは、歯肉縁上のステインやプラーク・バイオフィルムを集中したパウダー噴射で効率よく除去できます。



操作性にすぐれたスリムな設計のパウダーハンドピース

口腔内で操作しやすいスリムなハンドピース。細長い小型ノズルは臼歯部などへのアプローチを容易にします。



オートクリーニング

4つの洗浄モードを搭載し、ハンドピースとホース内部を自動洗浄。粉詰まりを防ぎ、回路内部を常に清潔な状態に維持します。



操作性と利便性で治療を支援するオプション機器



メルサーージュ エピック 専用カート

大容量の注水ボトルキットを備えた専用カートは、使いやすさと利便性を追求して開発しました。独立型の給水システムにより、外部からの給水が困難な場所や、水質が気になる環境でも安心して使用できます。

スツールに座ったままでもカートをスムーズに引き寄せられるグリップ

カートの全面に磁石をつけることが可能






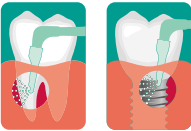




950mL大容量の注水ボトル


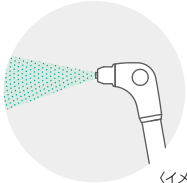
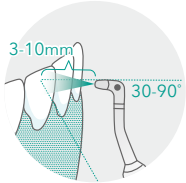








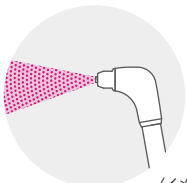
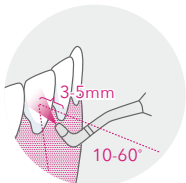
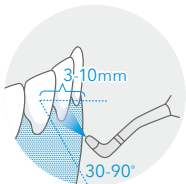


カート支柱の背面に電源コードや各ホースを収納でき、背面カバーで見た目もすっきりとまとめることが可能

POWDER
MAINTENANCE

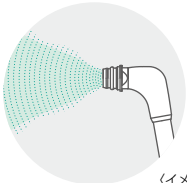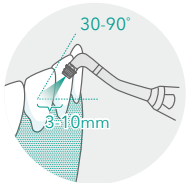

治療部位、除去対象に対応したノズルとパウダーのラインアップ

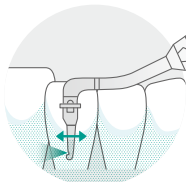	モード／チャンバー	用途／施術対象	部位	ハンドピース
標準	 ペリオモード  ペリオ用 チャンバー	バイオフィルム・ 軽微なステインの除去	 縁上	ペリオハンドピース  ※標準セット品ハンドピース
			 縁上 (歯肉辺縁)	
			 縁下 (歯周ポケット)	
オプション	 プロフィーモード  プロフィー用 チャンバー	強固なステインの除去	 縁上	プロフィーハンドピース (オプション)  ※オプションハンドピース
		軽度から中程度の バイオフィルム・ステインの 除去		


ノズル	噴霧範囲	ポイント	パウダー
<p>ペリオジェットノズル (標準セット)</p>  <p>ペリオ用 (縁上)</p> <p>※標準セット品ノズル</p>	 <p>(イメージ)</p>		<p>E-PICK Powder Perio</p> <p>歯肉縁上および歯肉縁下に 使用するパウダー 主成分: グリシン</p> 
<p>ペリオノズル (オプション)</p>  <p>ペリオ用 (縁上)</p>	 <p>(イメージ)</p>		
<p>ペリオノズル (オプション)</p>  <p>ノズルチップ ペリオ用 (縁下)</p>	 <p>(イメージ)</p>		
<p>プロフィールノズル (オプション)</p>  <p>プロフィール用 (縁上)</p>	 <p>(イメージ)</p>	 	<p>E-PICK Powder Stain</p> <p>歯面にやさしい球状粒子の 歯肉縁上用パウダー 主成分: 炭酸カルシウム</p>  <p>SOFT pearl</p> <p>表面侵襲性が低い 歯肉縁上用パウダー 主成分: グリシン</p> 

歯肉縁上のプラーク・バイオフィルムを除去する 「新型ペリオジェットノズル」


操作性にすぐれたハンドピースと新型ペリオジェットノズル

パワフルで安定したパウダー噴射とノズル先端の噴射口を細径化することで、歯面へパウダーを均一に当てる
ことが可能になりました。そのため少ないパウダー消費量で短時間に効率的な除去が可能になります。


新型ジェットノズルは歯肉縁上のバイオフィルムやステイン、より細部へのアプローチが必要となる矯正装置
周辺や歯列不正へも容易にアクセスができ、効率よく除去し、ケアタイムの短縮に貢献します。

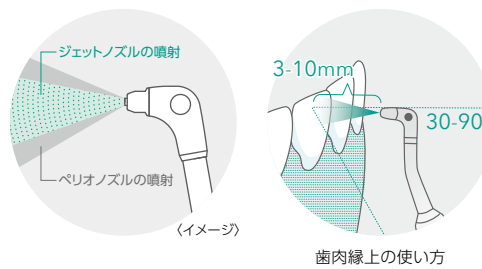

【除去効率比較】

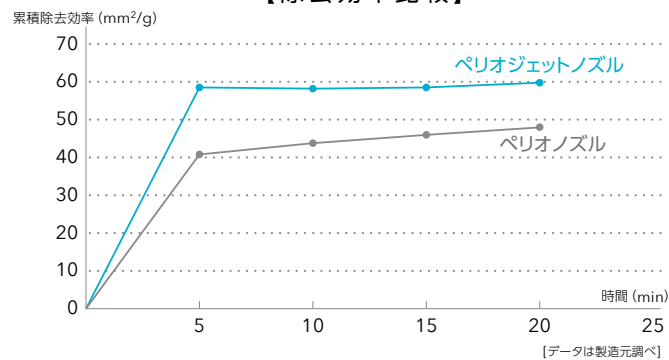

【パウダー消費量比較】

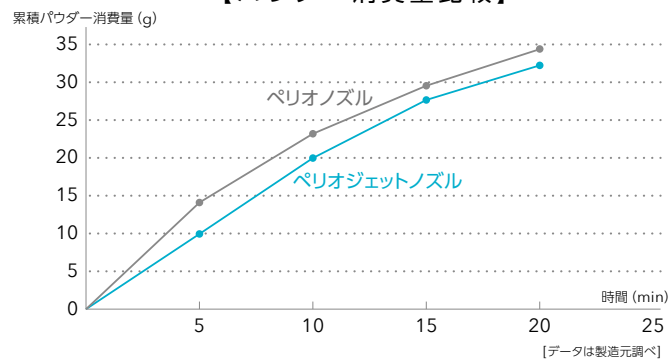

Merssage E-PICK Powder Perio

メルサージュ エピック パウダー ペリオはグリシンを主成分とした、歯肉縁上・辺縁・縁下用のパウダーです。高い水溶性の平均粒子径 $25\mu\text{m}$ の極小粒子のため、歯肉辺縁・縁下やインプラント周囲などのバイオフィルムのやさしい除去が可能です。



使用用途

- バイオフィルム・軽微なステインの除去

製品コード：9966125

製品名：メルサージュ エピック パウダー ペリオ
数量：160g×2本

販売名：メルサージュ エピック パウダー ペリオ
一般的名称：歯面研磨材
届出番号：09B2X00016000159
一般医療機器



平均粒子径：
 $25\mu\text{m}$
SEM画像(×150)

メルサージュ エピック パウダー ペリオ使用例

咬合面



矯正治療中



小児





※本症例写真はペリオノズルを使用しています。

歯肉縁上、歯肉辺縁のプラーク・バイオフィルムを除去する 「ペリオンズル」

歯肉縁上、歯肉辺縁へのアプローチが可能なペリオンズル

操作が難しかった叢生部や歯肉辺縁のバイオフィルムや軽微なステインを効率よく除去します。また、複雑な歯列や歯間部、小窩裂溝など、屈みにくい部位のバイオフィルム除去にも効果を発揮します。
さらに、インプラント周囲や補綴装置の清掃にも対応。やさしい噴射圧で、歯牙・歯肉・補綴修復物の負担を軽減します。

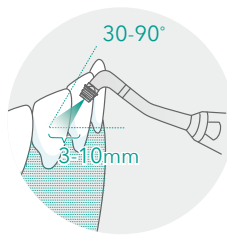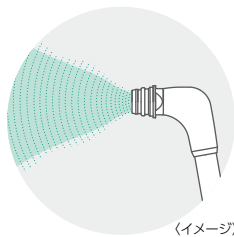

歯肉縁下(歯周ポケット)のバイオフィルムを除去する 「ペリオンズル+ペリオンズルチップ」

ペリオンズルとノズルチップで歯周ポケット内へのアプローチ


歯周ポケット内を考慮した噴射が可能。全方向への均一な流れにより軟組織へのダメージを最小限に抑え、歯肉縁下へのプラーク・バイオフィルムを効率的に除去します。



歯肉へのアクセス性を高めた柔軟性のあるプラスチックノズルチップ

細く薄く、柔軟性にすぐれたノズルチップは、歯牙の豊隆に沿ってしなやかに曲がり、引き締まった歯肉や隣在歯の根面にも挿入しやすい形状で、患者さまの苦痛を軽減。また、視認性の良い半透明の素材を採用しており、歯肉縁下への挿入もスムーズです。

ノズルチップは患者さまごとの交換が可能な滅菌済ディスポーザブルタイプで、開封後すぐに使用できます。

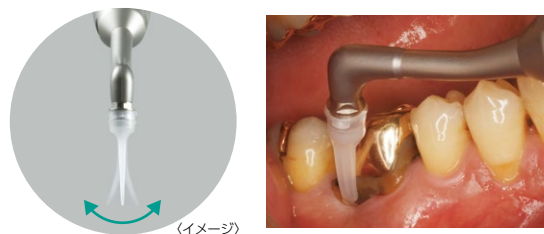


※3mm以内の挿入ですと歯周ポケット内へ効率よくパウダーが噴射されない場合があります。

歯肉縁上のバイオフィルム・ステインを除去する 「プロフィーノズル」


操作性にすぐれたハンドピースとノズル

アクセス性にすぐれたスリムなハンドピースは、口腔内での操作をスムーズに行えます。長く細いノズルにより、臼歯部へのアプローチも容易です。


頬側ではハンドピースで口角を必要以上に広げることなく、舌側では広い術野の確保が、術者と患者さまの負担を軽減します。

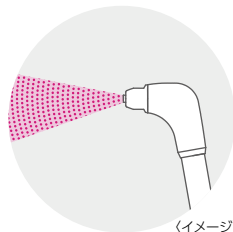

(イメージ)

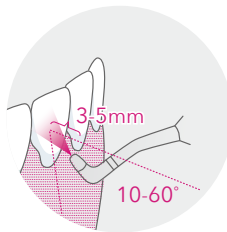

パウダーステインの使い方

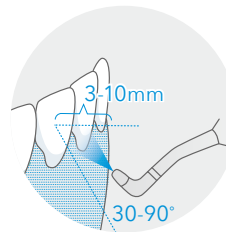


ソフトパールの方

パワフルで安定したパウダー噴射

タービン開発において培った流体解析技術に応用し、チャンバー内での効率的なパウダーの流れを実現。パウダー・水・エアーのスムーズな噴射を可能にしました。チェアタイムを短縮しながら、効率良く成果を得られます。

【パウダー噴射の安定性】

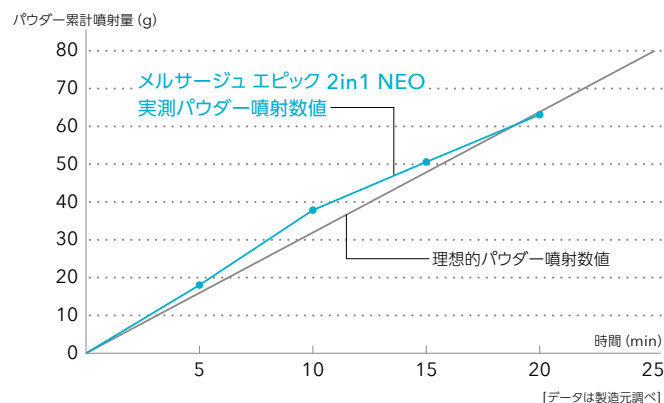

Merssage E-PICK Powder Stain

メルサージュ エピック パウダー ステインは炭酸カルシウムを主成分とした歯肉縁上用のパウダーです。球体状の細かい粒子で構成されており、パウダーが歯面上を転がるように動くことで、天然歯に付着した強固なステインをスピーディーで効率的に除去します。



使用用途

- 強固なステインの除去



平均粒子径: **54 μ m**
SEM画像 (×150)

製品コード: 9966124

製品名: メルサージュ エピック パウダー ステイン

数量: 300g×4本

販売名: メルサージュ エピック パウダー ステイン

一般的名称: 歯面研磨材

届出番号: 09B2X00016000158

一般医療機器

袋タイプの歯肉縁上用パウダー

FLASH pearl

製品コード: 9966060

製品名: フラッシュパール (100袋入)

数量: 15g×100袋入り

販売名: フラッシュパール

一般的名称: 歯面研磨材

届出番号: 09B2X00016000034

一般医療機器

SOFT pearl

ソフトパールはグリシンを主成分とした歯肉縁上用のパウダーです。時間差での水溶性を実現する粉体粒子のコーティングを施しています。噴射時の水によって急激に溶解しないため、清掃に適した状態のパウダーが歯面に届き、軽度から中程度のステインやバイオフィルムのやさしい除去が可能です。



使用用途

- バイオフィルムおよび軽度から中程度のステインの除去



平均粒子径: **65 μ m**
SEM画像 (×150)

製品コード: 9966070

製品名: ソフトパール

数量: 250g×4本セット

販売名: ソフトパール

一般的名称: 歯面研磨材

届出番号: 09B2X00016000157

一般医療機器

※「ソフトパール」「メルサージュ エピック パウダー ステイン」をご使用の際はメルサージュ エピック 2in1 NEO プロフイーキット2をご使用ください。

※ソフトパール使用上の注意

露出した象牙質、エナメル質のう蝕、コンボジットレジン及び金の詰め物に直接噴射しないこと（それらの表面に傷をつける恐れ）

仕上げ研磨

術後は新たな着色予防、歯面を滑らかにすることを目的に、研磨粒子の細かいペースト（メルサージュ プロ TTプラス）やメルサージュカップなどを使用して低速回転で仕上げ研磨することをお勧めいたします。


ULTRASONIC
SCALER



オートチューニング機能×フィードバック機能を 統合したインテリジェントな制御 「iPiezo engine®」搭載

「もっと上手にスケーリングをしたい」「もっと簡単に歯石を取りたい」

歯科衛生士のリアルな声を真剣に採り入れ開発した、次世代超音波エンジンをメルサージュ エピックシリーズに搭載。スピーディーな施術で、患者さまにとってもやさしいスケーリングを実現しています。また、効率良くパワーを出力でき、省電力にもすぐれたエコエンジンです。

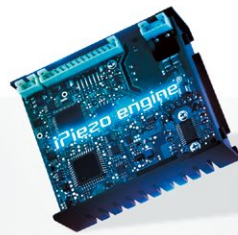

iPiezo engine®
アイピエゾ エンジン

安定したスケーリングが可能

メルサージュ エピックシリーズはiPiezo engine®の働きにより、自動的にチップ先端にかかる負荷を感知し、パワーを落とすことなく常に安定したスケーリングが行えます。

フィードバック機能

硬い歯石、柔らかい歯石、歯面の状態に合わせて常にチップ先端に適正なパワーを供給。硬く取れにくい歯石に対しても、パワーが落ちることなく安定したスケーリングを行えます。

オートチューニング機能

チップ先端で常に設定パワーが発揮されるように発振周波数を自動調整。チップの暴れやパタつきを最小限に抑えるため、吸い付くようにチップが歯面を捉え、歯面状況が手指に的確に伝わります。



施術者の負担軽減を追求したハンドピース

耐久性にすぐれたライト付チタン製ハンドピース

チタン製ボディーの採用で、再生処理による耐久性が向上しています。コード接続部もチタン製としたことで、ハンドピースを握った際の重心バランスが安定し、操作性が向上。繊細な動きも安定してサポートします。


さらに、細い先端部はアクセスが難しい最後臼歯遠心部などへのアプローチをスムーズにし、口腔内で自由な動きが可能。チップを適切な角度で当てるのが容易です。



「DURAGRIP」コーティング

チタン製ボディーの表面に、微細な凹凸によって光沢を抑えるプラスト処理を行い、その表面に「DURAGRIP」コーティングを施しました。

傷が付きにくく耐久性が向上するとともに、表面の微細な凹凸により、さまざまな種類のグローブでも滑りにくく、快適で安定したグリップ感を実現します。

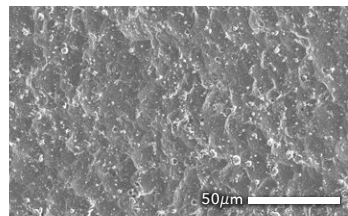

DURAGRIPコーティング

正確で安定した操作性を重視したスリムハンドピース


口腔内での広い作業域、術野の広さを実現した先端がφ9.5mmのスリムハンドピース。細い先端部はアクセスが困難な最後臼歯遠心部などへのアプローチをスムーズにし、チップを正しい角度で当てるのが可能。グリップ感が高く、軽量ハンドピースは手指への負担を大きく軽減します。また、自然光に近いLED光と広い照射範囲により、常に広く明るい視野と高い認識性を実現しました。



臨床の可能性を広げるチップラインアップ

豊富なチップラインアップで幅広い臨床に対応

形状だけでなく、断面や材質、表面加工にもバリエーションを持たせたチップを取り揃えています。症例や付着物の状態に応じてチップを選択することで、歯面や歯肉への負担を抑えつつ、効率的な治療を実現します。

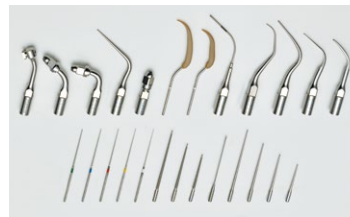


標準チップ

スケーリング／イリゲーション／ペリオ

製品名 S-G0

製品番号 9967G0


主に歯肉縁上、歯間部の除石に適したチップです。

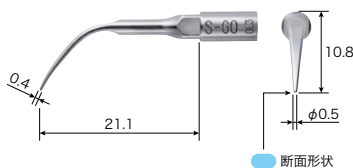

製品名 S-G6

製品番号 9967G6


主に歯肉縁上、縁下の除石に適したチップです。狭い歯間部などにも無理なくアクセスできます。

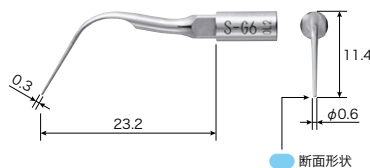

製品名 S-P20

製品番号 9967P20

断面が丸く歯面にキズが付きにくいのでメンテナンスや仕上げに適しています。細長い形態でポケット内へのアクセスがスムーズに行える全額的に使用できるチップです。

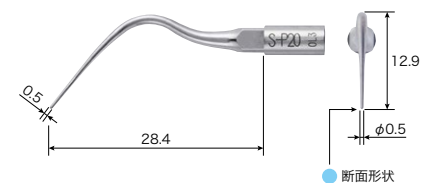

お得な「6本パック」

6本を5本分の価格でご購入いただけます。

製品名 S-G0パック (6本入り)

製品番号 9967SG0

製品名 S-G6パック (6本入り)

製品番号 9967SG6

製品名 S-P20パック (6本入り)

製品番号 9967SP20

スケーリング／イリゲーション／ペリオ

製品名 **S-P1**

製品番号 9967P1

前歯から小臼歯のメンテナンス、ルートプレーニングの仕上げに適したストレートタイプの形態をしたチップです。とても細いので隣接面・叢生部へも無理なくアクセスできます。

製品名 **S-P2**

製品番号 9967P2

右湾曲タイプ。臼歯部隅角部など複雑な形態への対応に適しています。

製品名 **S-P3**

製品番号 9967P3

左湾曲タイプ。臼歯部隅角部など複雑な形態への対応に適しています。

製品名 **S-P40**

製品番号 9967P40

チップの先端から6mmのところに3mm幅のガイドラインマーキングを施しています。ポケットの深さや目的に合わせ、安全に挿入できます。




インプラント・補綴装置メンテナンス

製品名 **S-V10 (ホルダー)**

製品番号 9967V10

●Eチップ用レンチ付属

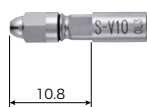製品名 **S-V-P10 (3入)**

製品番号 9967VP10

インプラント体やポーセレンなどの補綴装置のメンテナンスに適したチップです。

●プラスチック素材

製品名 **S-V-P12 (3入)**

製品番号 9967VP12

S-V-P10のロングタイプチップです。ブリッジの基底面や、到達しにくかった床付きのインプラント上部構造など歯冠長の長い症例でも、容易にアクセスすることができます。

●プラスチック素材




エンド 根管洗浄用

製品名 **S-E4**

製品番号 9967E4

根管内イリゲーション用チップ。
根管内異物除去用としても
使用できます。


●Eチップ用レンチ付属

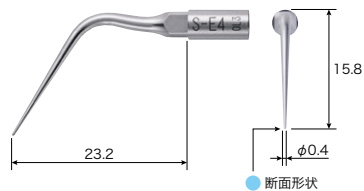製品名 **S-E9 (ホルダー)**

製品番号 9967E9

Uファイル用ホルダーです。
約90°のタイプです。

●Eチップ用レンチ付属

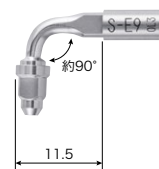製品名 **S-V30 (ホルダー)**

製品番号 9967V30


●Eチップ用レンチ付属

製品名 **S-E12 (ホルダー)**

製品番号 9967E12

Uファイル用ホルダーです。
120°のタイプです。

●Eチップ用レンチ付属

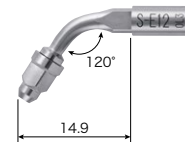


エンド 根管洗浄用 シャンク φ 1.5 mm

製品名 **S-V-S50 (3入)**


製品番号 9967VS50

ステンレス、根管洗浄用17mm

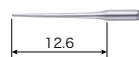製品名 **S-V-S51 (3入)**


製品番号 9967VS51

ステンレス、根管洗浄用23mm

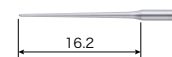製品名 **S-V-S52 (3入)**


製品番号 9967VS52

ステンレス、根管洗浄用26mm

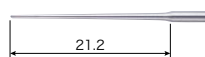製品名 **S-V-S53 (3入)**

製品番号 9967VS53

ステンレス、根管洗浄用32mm

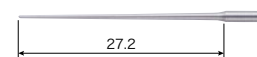

エンド 根管拡大・形成用 シャンクφ1.5mm

製品名 **S-V-S51D** (3入)

製品番号 9967VS51D

ダイヤモンドコーティング、根管拡大、形成用23mm

製品名 **S-V-S52D** (3入)


製品番号 9967VS52D

ダイヤモンドコーティング、根管拡大、形成用26mm

製品名 **S-V-S53D** (3入)

製品番号 9967VS53D


ダイヤモンドコーティング、根管拡大、形成用32mm

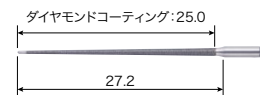


Uファイル 長さ33mm シャンクφ0.8mm

製品名 **Uファイル#15** (6入)


製品番号 9967U15

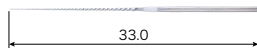製品名 **Uファイル#20** (6入)


製品番号 9967U20

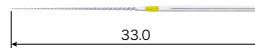製品名 **Uファイル#25** (6入)


製品番号 9967U25

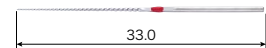製品名 **Uファイル#30** (6入)

製品番号 9967U30

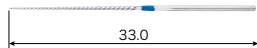
製品名 **Uファイル#35** (6入)

製品番号 9967U35

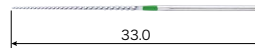


パワーガイド

このパワーガイドの記号と数値は、各々のチップにおける使用最大パワーモードとパワー数値を示しています。
チップは必ずその指定されたパワー以下でご使用ください。

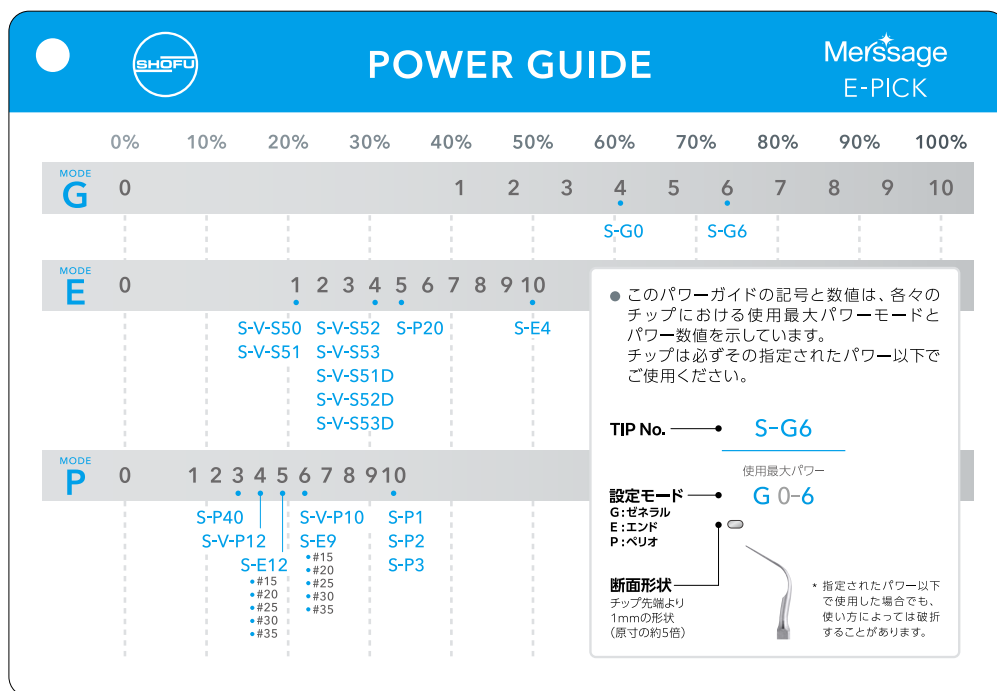

チップカード

適切な振動で効率よく安全に使用するために、チップカードをご確認の上、定期的にチップを交換されることを推奨します。

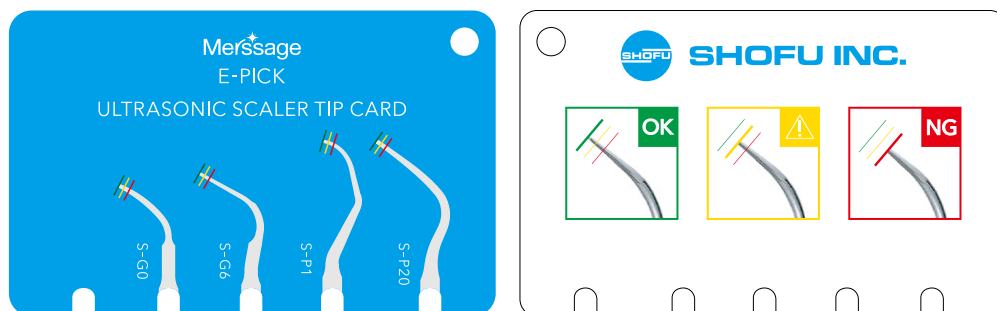

Merssage
E-PICK 2in1 NEO



施術者にも患者さまにも快適な設計

患者さまにやさしい加温機能

超音波スケーラーとパウダーハンドピースの両方に対応した水回路ヒーターを装備しています。注入する水の温度が口腔内の温度とほぼ同じであるため、知覚過敏症状のある方を含む幅広い患者さまに、より快適な治療環境を提供できます。


ワイヤレス多機能フットコントローラー

フットコントローラーはBluetooth®接続に対応。コードやケーブルの長さを気にせずに、設置することができます。多機能コントロールオプションを使用してストレスのない快適な操作を実現。施術者は手元の治療に集中できます。




超音波モード

歯周治療だけではなく、根管治療、修復処置に対応する、力強いパワーから微細なパワーの調整が可能なP、E、Gの3つのモード切替と10段階の細かいパワー調整が行えます。

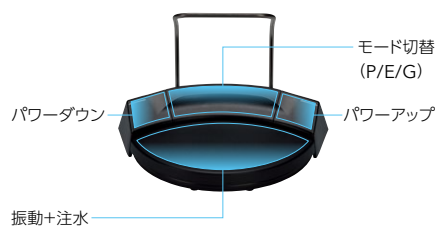

パウダーモード


口腔内の状況に応じて、10段階のパウダー流量調整が行えます。リンス機能はエアと水が噴射され、口腔内の洗浄が可能。3wayシリンジに持ち替えなくても、スイッチ一つで口腔内の残留パウダーの洗い流しが行えます。

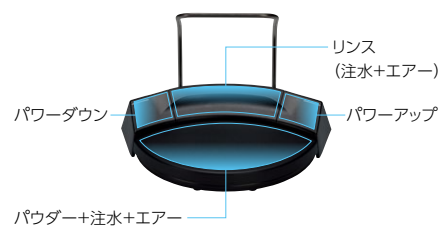

清潔な治療環境を効率的に保つ すぐれたメンテナンス性

ユニットとチャンバーの完全独立構造

チャンバーからハンドピースまでが一体構造でユニットから独立しているため、万一、粉詰まりが発生しても、ユニットを分解するような煩雑な修理は不要です。
さらに、各パーツは個別に交換可能なため、販売店やメーカーに送る必要もありません。

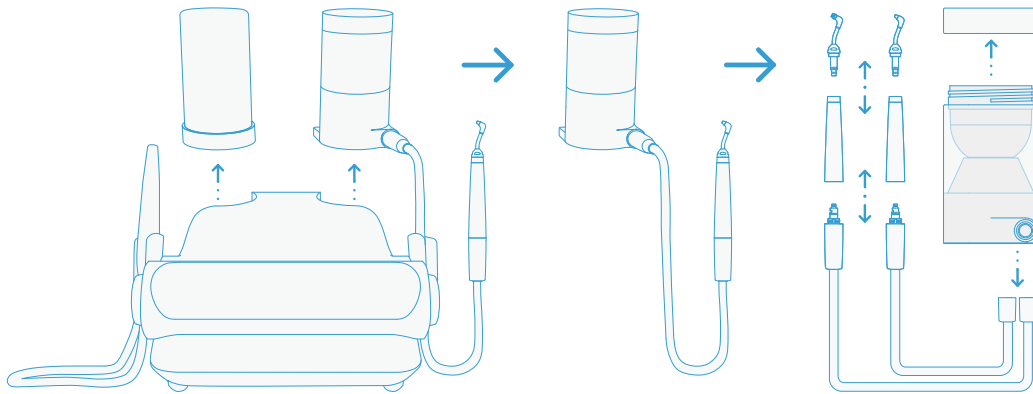

本体内部は、エアと水の回路のみで構成されるスマートコンセプトに基づいた設計です。



オートクリーニング

日々のメンテナンスをもっと身近に簡単に行えるよう設計。オートクリーニング機能には4つの自動洗浄モードがあり、各患者さまの施術後や1日の終わり等、状況に応じて対応できます。超音波モード、パウダーモードでのそれぞれのハンドピース、ハンドピースホース内を簡単に清掃することで粉詰まりのリスクを軽減し、回路内部を清潔に保つことが可能です。

Pモード



- パウダーハンドピースホースからの残留水の除去
- パウダー回路 (パウダーハンドピースホースとチャンパー) からの残留粉の除去
- チャンパー内からのエア抜き

Wモード (パウダーのみ)



- パウダーハンドピースホースからの残留水の除去
- パウダーハンドピースホースからの残留粉の除去

Wモード（超音波のみ）



- 超音波ハンドピースコードからの残留水の除去

D (デュアル) モード



- パウダーハンドピースホースと超音波ハンドピースコードからの残留水の除去
- パウダー回路（パウダーハンドピースホースとチャンバー）からの残留粉の除去
- チャンバー内からのエア抜き

使用したモード	実行タイミング (推奨)	オートクリーニングモード
パウダーモードのみ	毎治療後 1日1回 (最終治療後)	Wモード (パウダーのみ) Pモード
超音波モードのみ	毎治療後 1日1回 (最終治療後)	- Wモード (超音波のみ)
超音波モードおよび パウダーモード	毎治療後 1日1回 (最終治療後)	Wモード (パウダーのみ) Dモード

CLM 機能

CLM機能(Cleaning Mode)は、ユニット内の水回路に過酸化水素水(濃度0.3 wt%)を充填させることで、微生物の付着を防止し、増殖を抑制する機能です。定期的を実施することで水回路を清潔に保つことが可能です。

※CLMボトルセット、CLMモジュールはオプション品です。

※過酸化水素水は市販の製品をご使用ください。

※本体と専用カートのCLMボトルは仕様が異なります。



メルサージュ エピック 2in1
丸型注水ボトルセット

カート用
CLMボトルセット

Merssage E-PICK 2in1 NEO標準セット

製品コード:9A59

製品名:メルサージュ エピック 2in1 NEO

販売名:メルサージュ エピック 2in1 NEO

一般の名称:歯科用多目的超音波治療器

管理医療機器

認証番号:307ALBZX00024A01

特定保守管理医療機器



セット内容

- 電源コード
- コントロールユニット
- フットコントローラーハンガー付
- スケーラーハンドピース チタン ライト付
- スケーラーハンドピース チタン ライト付ホース
- パウダーハンドピースジェットノズル (ペリオ用)
- ペリオホース2
- 注水ボトルセット
- チャンバー単品 ペリオ用2
- 水ホース
- エアーホース
- チップ交換用レンチ (3個)
- 電池パック
- リングレンチ
- スパナ (12×14)
- パウダー掃除用ワイヤー (大)
- パウダー掃除用ワイヤー (小)
- パウダー掃除用ファイル (ノズル用)
- パウダー掃除用ブラシ
- タービンオイル
- リング (スケーラーハンドピースコード用)
- リングセット (ハンドピースホース用)
- リングセット (ハンドピースホース チャンバー側/チャンバー)
- リングセット (ノズル用)
- リング CLM /注水ボトル用
- パッキン CLM /注水ボトル用
- リングセット (チャンバージョイント用)
- 配線カバー
- 標準チップ3本 (S-G0、S-G6、S-P20)
- メルサージュ エピック パウダー ペリオ

仕様

電源:AC 100V-120V 50/60Hz

駆動周波数:28-32kHz

最大出力:11W

ユニット寸法:W249×D290×H115mm (注水ボトル、チャンバー除く)

ユニット重量:3.5kg<注水ボトル、チャンバー (ペリオ用) 除く>

Merssage E-PICK 専用カート



製品コード:9966071

製品名:メルサージュ エピック 専用カートセット

セット内容

- メルサージュ エピック専用カート
- 注水ボトルセット
- 圧抜きツール
- 水ホース 0.7m グリーン
- エアーホース 0.7m
- エアーホース 3.6m
- リング (ボトル蓋/圧抜きツール用)

仕様

寸法:W432×D452×H814 mm (キャスターを含む)

重量:14.1 kg (注水ボトルを除く)

ボトル最大容量:950 mL

供給空気圧:0.45-0.75 MPa (4.5-7.5 kgf/cm²)

供給水圧:0.1-0.2 MPa

ペリオノズルセット



製品コード: 9966126

製品名: ペリオノズルセット

販売名: ペリオメイト ノズルチップ

一般名称: 歯科用注入器具

届出番号: 09B2X00016000140

一般医療機器

セット内容

- ノズル (ペリオ用)
- ペリオメイトノズルチップ (40本)
- ペリオメイトノズルリムーバー 他付属品

チャンバーキット



製品コード: 9A6001

製品名: メルサージュ エピック 2in1 NEO
プロフィーキット2

セット内容

- パウダーハンドピース (プロフィー用)
- パウダーハンドピースホース (プロフィー用)
- チャンバー単品プロフィー用2
- メルサージュ エピック パウダー ステイン ボトル1本 (容量300g)

水回路のメンテナンス

メルサージュ エピック 2in1
カート用CLMボトルセット

製品コード: 9966080

セット内容

- カート用ボトル用蓋
- カート用CLM注水ボトル蓋なし
- カート用パッキン
- カート用Oリング



メルサージュ エピック 2in1 NEO
CLMセット

製品コード: 9966115

セット内容

- 丸形CLMボトルセット
- CLMホルダー



メルサージュ エピック
CLMモジュールセット

製品コード: 9966117

セット内容

- CLMスタンド
- CLMアタッチメント (プロフィー用)
- CLMアタッチメント (ペリオ用)
- CLMモジュール用Oリングセット (プロフィー、ペリオ共通)































製品仕様
関連製品／交換部品

メルサージュ エピック 2in1 NEO用交換部品

メルサージュ エピック プロフィーホース2 (101) 製品番号 9966101		メルサージュ エピック 水フィルターケース (112) 製品番号 9966112		カート用水ホース 0.7m グリーン (074) 製品番号 9966074	
メルサージュ エピック チャンパー単品プロフィー用2 (102) 製品番号 9966102		メルサージュ エピック スパナ (12×14) 1個 (096) 製品番号 9966096		カート用エアホース 0.7m (075) 製品番号 9966075	
メルサージュ エピック ペリオホース2 (089) 製品番号 9966089		メルサージュ エピック Oリングセット チャンパー用、プロフィー・ペリオ用2 (097) 製品番号 9966097		カート用Oリング (078) 製品番号 9966078	
メルサージュ エピック チャンパー 単品ペリオ用2 (090) 製品番号 9966090		メルサージュ エピック Oリング CLM/注水ボトル用 (098) 製品番号 9966098		カート用圧抜きツール (079) 製品番号 9966079	
メルサージュ エピック 2in1 フットコントローラー ハンガー付 (095) 製品番号 9966095		メルサージュ エピック パッキン CLM/注水ボトル用 (099) 製品番号 9966099		カート用CLMボトルセット (080) 製品番号 9966080	
メルサージュ エピック 2in1 丸型注水ボトルセット (093) 製品番号 9966093		メルサージュ エピック Oリングセット チャンパージョイント用 (100) 製品番号 9966100		カート用ボトル用蓋 (081) 製品番号 9966081	
メルサージュ エピック 2in1 丸型CLMボトルセット (103) 製品番号 9966103		メルサージュ エピック 2in1 CLA-10洗浄用アダプタ 超音波スケーラー用 (110) 製品番号 9966110		カート用パッキン (082) 製品番号 9966082	
メルサージュ エピック エアホース3.6m (094) 製品番号 9966094		メルサージュ エピック CLMモジュールセット (117) 製品番号 9966117		カート用注水ボトル蓋なし (083) 製品番号 9966083	
メルサージュ エピック 水ホース3.6mグリーン (104) 製品番号 9966104		メルサージュ エピック CLMアタッチメント (プロフィー用) (119) 製品番号 9966119		カート用CLM注水ボトル蓋なし (084) 製品番号 9966084	
メルサージュ エピック CLMホルダー (116) 製品番号 9966116		メルサージュ エピック CLMアタッチメント (ペリオ用) (120) 製品番号 9966120		カート用キャスター 1個 (086) 製品番号 9966086	
メルサージュ エピック 丸型注水ボトル蓋 (106) 製品番号 9966106		メルサージュ エピック CLMモジュール用Oリングセット (プロフィー、ペリオ共通) (121) 製品番号 9966121		カート用スパナ (17×22) 1個 (087) 製品番号 9966087	
メルサージュ エピック 丸型注水ボトル蓋なし (107) 製品番号 9966107		メルサージュ エピック 配線カバー (077) 製品番号 9966077		メルサージュ エピック 2in1 スケーラーハンドピース チタンライト付ホース (092) 製品番号 9966092	
メルサージュ エピック 丸型CLM注水ボトル蓋なし (108) 製品番号 9966108		メルサージュ エピック 2in1 NEO CLMセット (115) 製品番号 9966115			
メルサージュ エピック チャンパー用蓋 (109) 製品番号 9966109		カート用注水ボトルセット (073) 製品番号 9966073			


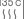
メルサージュ エピック 2in1 NEO /メルサージュ エピック 2in1共用交換部品

メルサージュ エピック パウダーハンドピース ジェットノズル (ペリオ用) (114) 製品番号 9966114		メルサージュ エピック ペリオ ジェットノズル (088) 製品番号 9966088		メルサージュ エピック 2in1 スケーラーハンドピース チタンライト付 (091) 製品番号 9966091	
パウダーハンドピース (ペリオ用) (003) 製品番号 9966003		パウダーハンドピース用ノズル (ペリオ用) (007) 製品番号 9966007		パウダーハンドピースノズル用 リングレンチ (030) 製品番号 9966030	
パウダーハンドピース (プロフィー用) (004) 製品番号 9966004		パウダーハンドピース用ノズル (プロフィー用) (008) 製品番号 9966008		注水ポンプ (2in1用) (018) 製品番号 9966018	




<p>リングセット（ノズル用、 プロフィール・ペリオ共通）（023）</p> <p>製品番号 9966023</p> 	<p>リング（スケーラーハンドピース コード用）（041）</p> <p>製品番号 9966041</p> 	<p>水供給用コネクター（048）</p> <p>製品番号 9966048</p> 
<p>滅菌ケース（013）</p> <p>製品番号 9966013</p> 	<p>リングセット（ハンドピースホース用、 プロフィール・ペリオ共通）（022）</p> <p>製品番号 9966022</p> 	<p>水フィルター（050）</p> <p>製品番号 9966050</p> 
<p>チップ交換用レンチ（CR-10）（052）</p> <p>製品番号 9966052</p> 	<p>ペリオメイトノズルチップリムーバー（059）</p> <p>製品番号 9966059</p> 	<p>パウダー清掃用ブラシ（028）</p> <p>製品番号 9966028</p> 
<p>Eチップ用レンチ（053）</p> <p>製品番号 9966053</p> 	<p>パウダーハンドピース用 タービンオイル（031）</p> <p>製品番号 9966031</p> 	<p>電源コード（051）</p> <p>製品番号 9966051</p> 
<p>チップホルダー（054）</p> <p>製品番号 9966054</p> 	<p>パウダー清掃用ワイヤー（大）（027）</p> <p>製品番号 9966027</p> 	<p>チューブストッパー（046）</p> <p>製品番号 9966046</p> 
<p>チップカバー（L）（055）</p> <p>製品番号 9966055</p> 	<p>パウダー清掃用ワイヤー（小）（026）</p> <p>製品番号 9966026</p> 	
<p>チップカバー（S）（056）</p> <p>製品番号 9966056</p> 	<p>パウダー清掃用ファイル（ノズル用）（025）</p> <p>製品番号 9966025</p> 	

メルサージュ エピック 2in1用交換部品

<p>チャンバー単品（ペリオ用）（001）</p> <p>製品番号 9966001</p> 	<p>水フィルターセット （3.6m グリーン）（017）</p> <p>製品番号 9966017</p> 	<p>電流ヒューズ（033）</p> <p>製品番号 9966033</p> 
<p>チャンバー単品（プロフィール用）（002）</p> <p>製品番号 9966002</p> 	<p>リングセット（パウダーチャンバー本体接続部用）（019）</p> <p>製品番号 9966019</p> 	<p>ロック解除ピン（029）</p> <p>製品番号 9966029</p> 
<p>パウダーハンドピースホース （ペリオ用）（005）</p> <p>製品番号 9966005</p> 	<p>リングセット （注水タンク 角型用）（021）</p> <p>製品番号 9966021</p> 	<p>スパナ（5×8）2個入（057）</p> <p>製品番号 9966057</p> 
<p>パウダーハンドピースホース （プロフィール用）（006）</p> <p>製品番号 9966006</p> 	<p>ケース付水フィルター（049）</p> <p>製品番号 9966049</p> 	<p>エアホース（032）</p> <p>製品番号 9966032</p> 
<p>注水タンクセット（角型）（014）</p> <p>製品番号 9966014</p> 	<p>パウダーチャンバー蓋 （プロフィール、ペリオ共通）（024）</p> <p>製品番号 9966024</p> 	<p>チューブ抑えリング（2個セット）（036）</p> <p>製品番号 9966036</p> 
<p>スケーラーハンドピースコード（011）</p> <p>製品番号 9966011</p> 	<p>注水タンク蓋（角型）（015）</p> <p>製品番号 9966015</p> 	<p>ゴム足（047）</p> <p>製品番号 9966047</p> 
<p>フットコントローラー（2in1用）（009）</p> <p>製品番号 9966009</p> 	<p>注水タンク（角型 蓋なし）（016）</p> <p>製品番号 9966016</p> 	<p>防塵カバー（044）</p> <p>製品番号 9966044</p> 

 熱水洗浄可能
  135℃までの温度でオートクレーブ滅菌可能

メルサージュ関連製品

 <p>トリートメントペースト メルサージュ プロ TTプラス <div>薬用歯磨</div> <div>医薬部外品</div> <div>歯科医院用</div> </p> <p>販売名：メルサージュ P TT 容量：40g 香味：オレンジミント</p>	 <p>トリートメントペースト メルサージュ プロ APプラス <div>歯みがき類</div> <div>口腔化粧品</div> <div>歯科医院用</div> </p> <p>販売名：メルサージュ APプロ 容量：65g 香味：ユズミント</p>	 <p>歯垢・歯石染色材 メルサージュ PCペレット</p> <p>各1瓶100個入 【種類・用途】 レッド（歯垢染色用）／香味 ストロベリー ブルー（歯垢・歯石染色用）／香味 ミント</p>
---	--	---

導入からその先まで。松風のトータルサポート

メルサーージュは松風オリジナルの予防歯科に特化した製品ブランドです。私たち松風は、歯科医療従事者に確かな情報と技術を提供するとともに、導入後も長期にわたるアフターフォローを通じて、患者さまに選ばれる歯科医院づくりをサポートします。



【製造販売元】

株式会社 ナカニシ 栃木県鹿沼市下日向700

【販売元】

株式会社 松風 www.shofu.co.jp

- 本社:〒605-0983 京都市東山区福稲上高松町11
お客様サポート窓口(075)778-5482 受付時間8:30~12:00 12:45~17:00(土日祝除く)
- 支社:東京 (03)3832-4366
- 営業所:札幌 (011)232-1114/仙台 (022)713-9301/名古屋 (052)709-7688
京都 (075)757-6968/大阪 (06)6330-4182/福岡 (092)472-7595

ご使用の際は取扱説明書および電子添文等をよく読んでお使いください。

価格は2026年1月現在の標準医院価格(消費税抜き)です。
仕様および形状は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

Meressage

メルサーージュは新しい口腔衛生文化の確立により、生活者の口腔を健やかにするとともに歯科医療のさらなる振興を実現します。

取扱い店