



器具にやさしく  
しっかりと洗浄



イルガサンDP300(0.5%)、アルコール  
界面活性剤(非イオン、陰イオン)、防錆剤

器具用防錆洗浄液

2L 6,500円

4L 12,800円

(税別、希望小売価格)

TAI  
FRESH

ACE NEO


# 洗浄力と防錆効果を強化！

TAI  
FRESH  
ACE NEO

## 洗浄力

### タイフレッシュ・エースNEOの血液洗浄力試験

日本医療機器学会のガイドラインに準じた汚染モデル(※)を5 $\mu$ Lデンタルミラーに均一に塗布し、2時間乾燥させたものをテストピースとし、洗浄液に室温で一晩浸漬しました。  
ゆるやかに洗浄剤をすすぎ、乾燥させた後、残留汚れをタンパク検出試薬で染色しました。

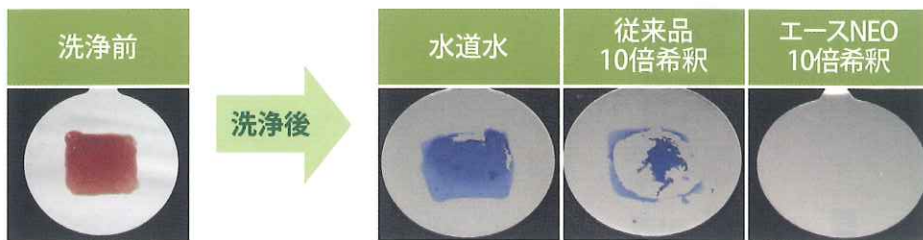

※100mL当たり500単位のヘパリンを含むヒツジ血液と1%硫酸プロタミン液を10:1の割合で混合したもの。  
(日本医療機器学会 洗浄評価ガイドライン2012年8月より)

## 防錆効果

### タイフレッシュ・エースNEOの防錆効果試験

試験片を各濃度に希釈した試験液に全浸漬し、25 $^{\circ}$ C1日後の影響を以下の基準で評価した。

【試験片：表面変化、液：溶出の有無等】

《評価》


- : 全く変化なし
- ±: ごく僅かな変化
- +: 明らかな変化  
(明らかな変色、部分的な腐食)
- ++: 顕著な腐食



## 洗浄・消毒の流れ

滅菌工程前の洗浄でのタンパク質除去が重要です。

酵素系洗浄剤との併用が有効です。

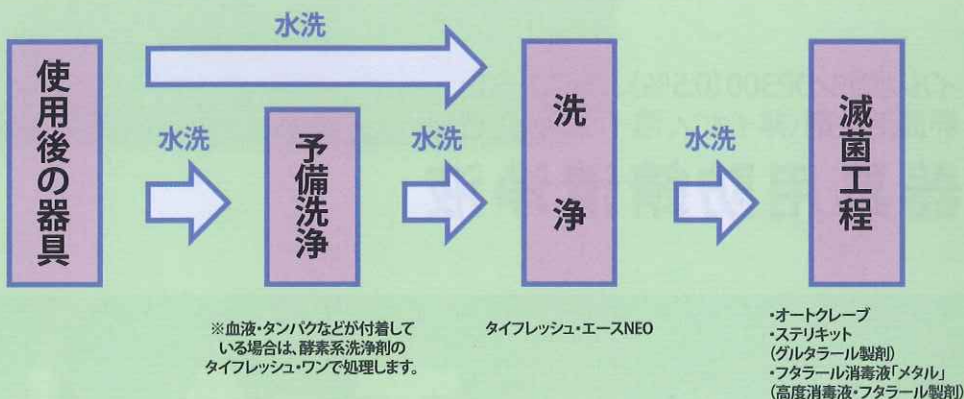

**使用方法** 浸漬洗浄：小器具は、原液～10倍希釈液に浸漬し、水洗して水切りします。  
超音波洗浄：100倍希釈液を使用し、水洗して水切りします。

使用前には製品の注意事項をよくお読みください。

●お問い合わせは

《販売元》

High Technology & Sincerity

⊗ 太平化学産業株式会社

本社 〒540-0039 大阪市中央区東高麗橋1-19 TEL.06-6942-7241  
支店 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町3-7-2 TEL.03-6206-2203

URL <http://www.taihei-chem.co.jp/>