

Geo LUXEN

Z I R C O N I A C O L O R L I Q U I D

✓ **Anyone**


初心者でもすぐに使える

✓ **Simple**

ペンタイプで簡単・便利

✓ **Quick**

作業を単純化し、
効率を大幅に改善

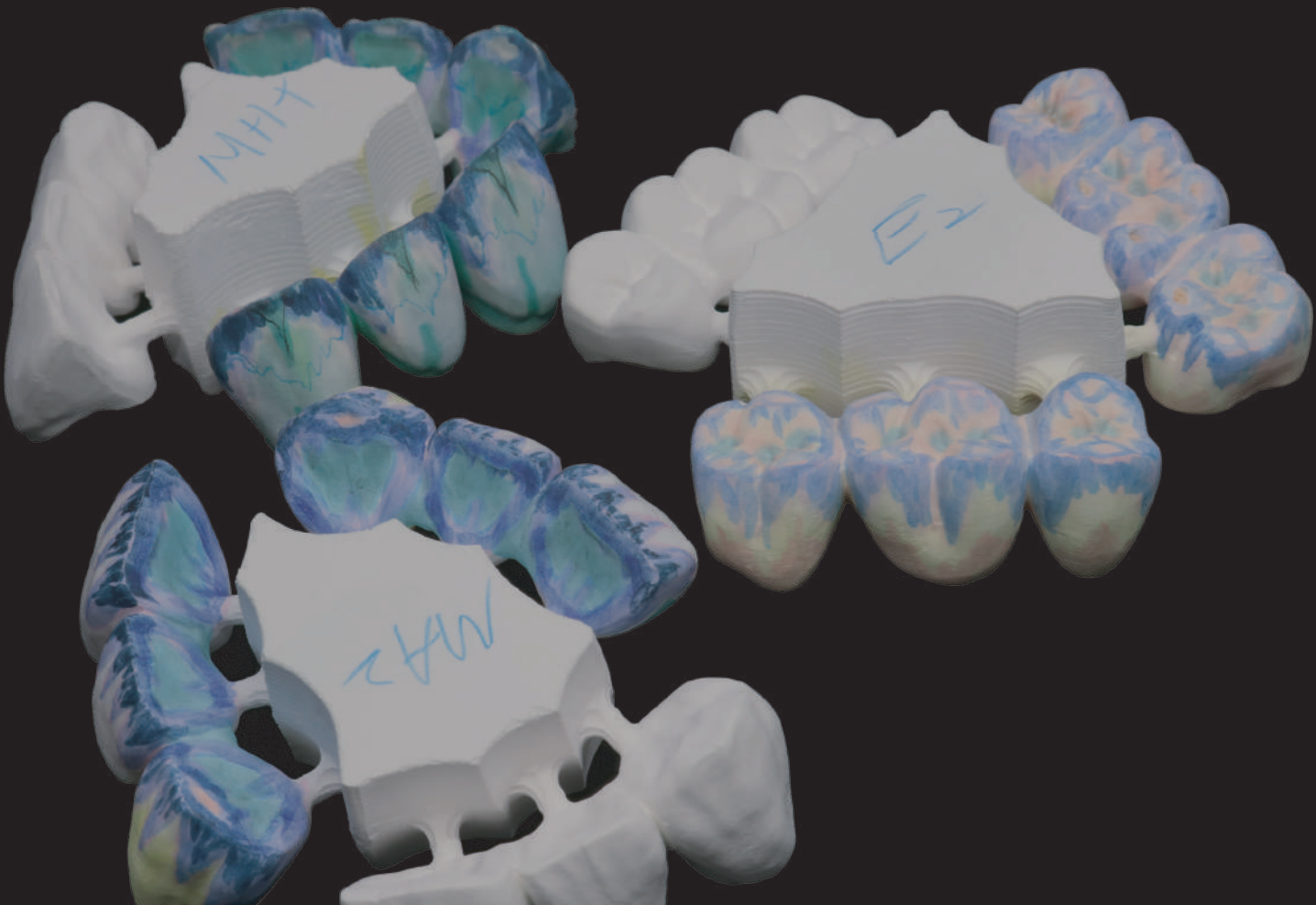

スターターキット

	内容	価格 (税別)
スターターキット	- A2 / A3 - Enamel 3 / T Glass / Natural Gray / Yellow / Cervical A - 筆ペン Large 2本 / Small 5本	49,800 円

ラインナップ

タイプ	種類	備考	価格 (税別)
Dentin	- A1 / A2 / A3 / A3.5 / A4 - B1 / B2 / B3 / B4 - C1 / C2 / C3 / C4 - D2 / D3 / D4	- 容量 : 50ml	各 8,000 円
	- MA1D / MA2D / MA3D / MA3.5D / MA4D - MB1D / MB2D / MB3D / MB4D - MC1D / MC2D / MC3D / MC4D - MD2D / MD3D / MD4D	- LUXEN Zirconia Luxen Multi (MHT) 専用 - Dentin A1 ~ よりも濃い Dentin	
Special	- Enamel 3 - T Glass - Natural Gray - Cervical A / B / C / D - Amber - Yellow - White opaque - White	- 容量 : 30ml - Enamel 3 = シェード中和用 - T Glass = インサイザル表現用 - Natural Gray = エナメル表現用 - Cervical A ~ D = サービカル表現用 - Amber = サービカル表現用 - Yellow = サービカル表現用 - White opaque = 金属色遮断 - White = 白帯を表現用 - Gingiva 1 = 歯肉を表現用	各 8,000 円 13,000 円
	- Gingiva 1		

Q & A

- ジルコニア の乾燥方法
Ring Furnace : 200°Cで 5~10 分の乾燥を推奨 または、オープン : 200°Cで 10~20 分の乾燥を推奨
- ファーネス の掃除方法
Chamber 内部が空の状態です定期的な空運転が効果的
- 焼成後、透明度が低い場合
ファーネスの温度が低い・ファーネスの熱線の切断・カラーリング後のジルコニアの乾燥不足
- 焼成後、黄色く変色した場合
ファーネス内部が汚れている可能性がある *ジルコニアのカラーリング後の、乾燥不足は短期間で汚れるため注意が必要
- 定期的な点検
ジルコニアは温度に敏感なため、良い結果物を製作するためには、定期的にファーネス内部の温度チェックが重要
- カラーリングの個人差
筆圧や塗布する回数・量は個人差があるため、基本の塗り方ガイドをベースにして、オリジナルの塗り方を作る
リキッドの量を調節するために、専用の筆ペン (別売) を推奨
油分の付着した手でジルコニアに触れないために、ゴム手袋の使用を推奨

