

《舌筋力測定器》

見えない舌の筋力を数値で可視化。

たんたんめーたー」を使用して舌の筋力を数値で測定します。



Tongue Tongue Meter

ノーマル



本体 42×120mm 包装 価格 本体1個 ケース ¥6,300

舌筋力記録帳1枚 一般的名称 口腔・嚥下機能訓練器具 機器の種類 一般医療機器

医療機器届出番号 13B2X10260000016

たんたんめーたーでできること

✓ 「舌の機能 |をチェック

✓ 「舌の筋力」を数値で評価

飲み込む力


食べものがうまく飲み込めない、食べ物がのどにつかえる感じがする、口が閉じてなく 舌が下がっている、口で呼吸をしているようなことがある場合は、舌の機能と筋力がた りない可能性があります。

舌の正しい位置

口が閉じているときの舌の位置を意識してみましょう。

舌の 正しい位置を 知ってますか?



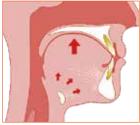

舌が下がっている状態

正しい位置

舌の先が上の前歯に軽く付いていて、舌が上顎に沿ってくっついている状態です。 舌が下がると、気道狭窄、舌骨低位、二重あごなどが起こり、舌根が沈下すると、いび き・無呼吸症候群の発症原因にもなります。


舌圧の基準値

年齢とともに舌などの筋力は落ちていきます。正常値として2Kg以上を目安にしましょう。

たんたんめーたーの使い方



①測定器本体の目盛りを 0 に設定します。必ず毎回測定 する前に指で目盛りを 0 に戻してください。

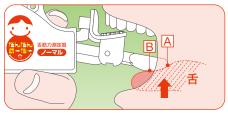

②本体をまっすぐ持ち、スプーンの曲面を軽く舌の上にのせデコボコ面に上の前歯を軽く置きます。

口は開けたまま舌だけの力でスプーンのAからBの部分を ゆっくりと押し上げ、つらいところで押し上げるのをやめます。



③測定器本体の目盛りの位置が舌筋力の値です。3回測 定して真ん中の数値を記録帳に記入します。

※トレーニング用の器具ではありません。

※保険算定はできません。

たんたんめーたーの関連製品

製品のカバーとしておすすめです!

ディスポーザブルで患者様ごとに交換でき衛生的です。





ディクシー衛生カバーⅡ

【お取り扱い先】株式会社ジーシー

■仕様 65×220mm

包 装	価 格
1函 300枚入り	¥12,800

※株式会社ジーシーと機械製品の取引がある歯科材料販売業者よりご購入頂けます。出入りの歯科材料販売業者等にお問い合わせくださいませ。

保険適用

オーラルアカデミーその他の関連製品

□唇閉鎖力を測定!

トレーニング器具としても使用できます。





歯科用口唇筋力固定装置

リットレメーターMedical

■仕様

ハード(ホワイト)、ソフト(ゴールド)

包 装	価 格
測定器本体1個、 リットレMP(マウスピース)大小 各1個	¥3,200

一般的名称 歯科用口唇筋力固定装置 機器の種類 一般医療機器 医療機器届出番号 13B2X1026000003

■別売品

	包 装	価 格
リットレMP	マウスピース大2個	各¥1,250
	マウスピース小2個	#+1,250

一般的名称 歯科用口唇筋力固定装置 機器の種類 一般医療機器 医療機器届出番号 13B2X1026000004

□唇閉鎖力・□輪筋・舌筋のトレーニングに







ご用命は

あげろ一くんMメディカル

歯科用口唇筋力固定装置

とじろーくんMメディカル/あげろーくんMメディカル

■什样

とじろーくんMメディカル

あげろーくんMメディカル

カラー:グリーン Sサイズ (ピンク) マウスピースサイズ:縦31×横24mm フリーサイズ Mサイズ (ブルー) マウスピースサイズ:縦40×横29mm

包装	価 格
本体1個、バネ(100g/200g/400g)各1個、六角レンチ1個	¥2,800

とじろ-くんMメディカル 一般的名称 歯科用口唇筋力固定装置 機器の種類 一般医療機器 医療機器届出番号 13B2X10260000002 あげろ-くんMメディカル 一般的名称 歯科用口唇筋力固定装置 機器の種類 一般医療機器 医療機器届出番号 13B2X10260000001





OITA(口腔免疫トレーニング装置) ポカンX

包 装	価 格
50個	
(ホワイト、イエロー、ピンク、	¥1,800
グリーン ラベンダー各10個)	

※価格は希望医院価格です(価格に消費税は含まれておりません)。

製造販売元



有限会社 オーラルアカデミー