


MicroMega リムーバー

ガッタパーチャー除去

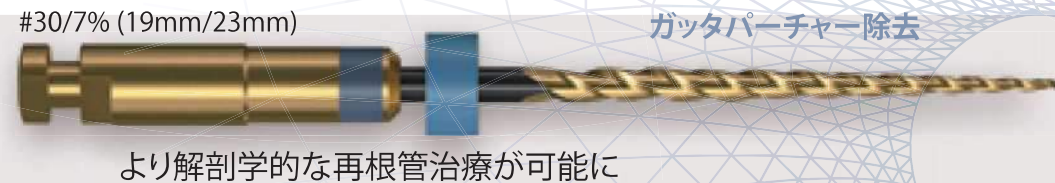

より解剖学的な再根管治療が可能に



ポイント① 従来品GP除去ファイルより柔軟性と切削除去効率を向上させた熱処理NiTiワイヤーを使用

ポイント② マイクロメガ ワンレシと同様、直径1mm MI-NiTiワイヤーを使用


非対称

断面形状
トリプルヘリックス

対称

マイクロメガ リムーバー プロトコル

MicroMega
One Flare

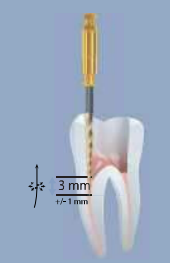


400 rpm
Max torque 3 N.cm

MicroMega
Remover



400-800 rpm
Max torque 2.5 N.cm

MicroMega
One Flare

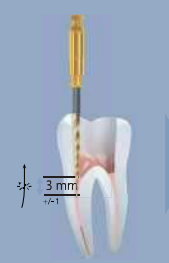

400 rpm
Max torque 3 N.cm

MicroMega
Remover



400-800 rpm
Max torque 2.5 N.cm

充填材が根尖までである場合

充填材がアンダーの場合

ガッタパーチャー除去後は、マイクロメガ ワンレシで残り3mmのガッタパーチャーを除去し、再度拡大形成を行ってください。

正回転：400-800 rpm
トルク：2.5 N.cm
単回使用

STERILEEO 滅菌済み



熱処理NiTiワイヤー使用

優れたクロス・セクション工程により

切削力と柔軟性を兼ね備えたガッタパーチャー除去ファイルを実現

ORDER INFORMATION

製品名

マイクロメガ ワンレシ	21mm/25mm	#20/4% 黄	各5本	各9,000円
マイクロメガ ワンレシ	21mm/25mm	#25/4% 赤	各5本	各9,000円
マイクロメガ ワンレシ	21mm/25mm	#25/6% 赤	各5本	各9,000円
マイクロメガ ワンレシ	21mm/25mm	#35/4% 緑	各5本	各9,000円
マイクロメガ ワンレシ	21mm/25mm	#45/4% 白	各5本	各9,000円
マイクロメガ ワンレシ	21mm	アソート	5本	9,000円
マイクロメガ ワンレシ	25mm	アソート	5本	9,000円
マイクロメガ ワンフレア	17mm	#25/9%	5本	9,000円
マイクロメガ ワンジー	21mm/25mm	#14/3%	各5本	各9,000円
マイクロメガ リムーバー	19mm/23mm	#30/7%	各5本	各7,000円

ジーシーグループ [販売元]



株式会社 日本歯科商社

東京本社：〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
大阪支店：〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
北海道営業所：〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001
九州営業所：〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

選任製造販売業者

AJMD 株式会社
〒103-0004
東京都中央区東日本橋2-4-5
真光ビルディング
TEL: 03-5614-0733
FAX: 03-5614-0734

コルテンジャパン合同会社

〒190-0012
東京都立川市曙町2丁目25-1
TEL: 042-595-6945
FAX: 042-595-6946
www.coltene.com

販売名：マイクロメガNITIロータリーファイルシステム
医療機器認証番号：304AGBZ100001000

COLTENE

Follow Us



MicroMega

One RECI
ワン レシ

One Flare
ワン フレア

One G
ワン ジー

Remover
リムーバー

ROOT CANAL SHAPING
GuttaPercha REMOVAL

保険適用



#45/4% #35/4% #25/6% #25/4% #20/4%

安全性を高めた断面形状※とMI-NiTiワイヤーの
ワンファイル・レシプロケーションシステム

※JOE Vol48, No.1 Jan2022 "Apical Extruded Debris in Curved Canals"



安全性



柔軟性



MI



切削力

COLTENE



One RECI

ワンレシ
レシプロケーション
根管拡大・形成

レシプロケーション
単回使用

STERILEEO 滅菌済み



熱処理NiTiワイヤー使用

MicroMega
One RECI
#25/6%

切削片の排出に
優れたらせん形状※

イニシャルトリートメントに
優れた1.0mmのMIワイヤ※※



ワンファイルシステム

滅菌済み包装




直径 **1.0mm** NiTiワイヤ使用
歯頸部周囲および歯の硬組織の保存



弊社特許の左右非対称断面




熱処理NiTiワイヤ・システム

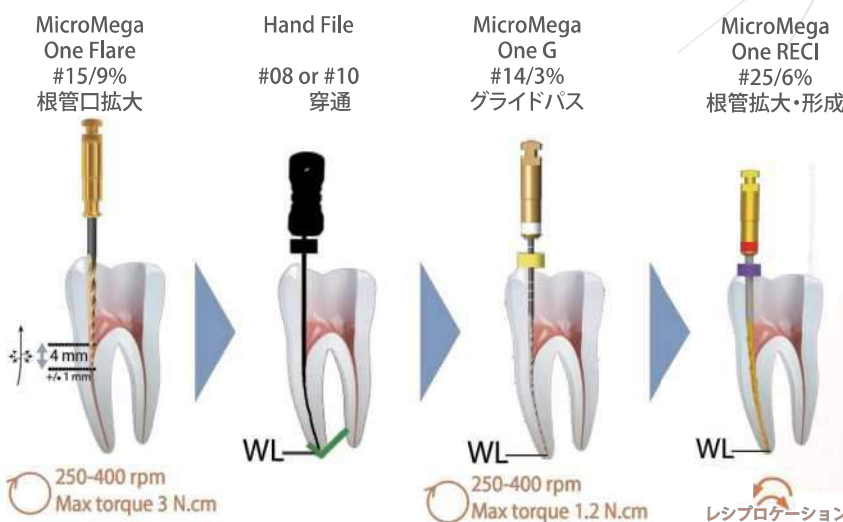


症例に応じて、One RECIのファイルサイズを選択してください。

歯頸部周囲および歯の硬組織の保存

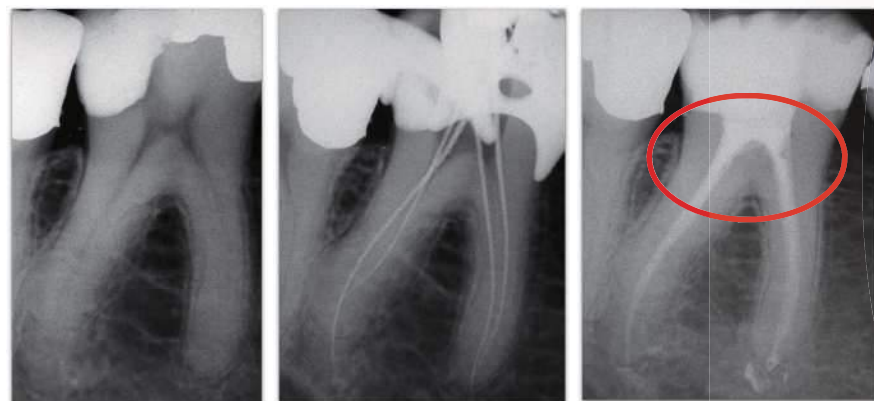

Dr. Filippo CARDINALLY - イタリア

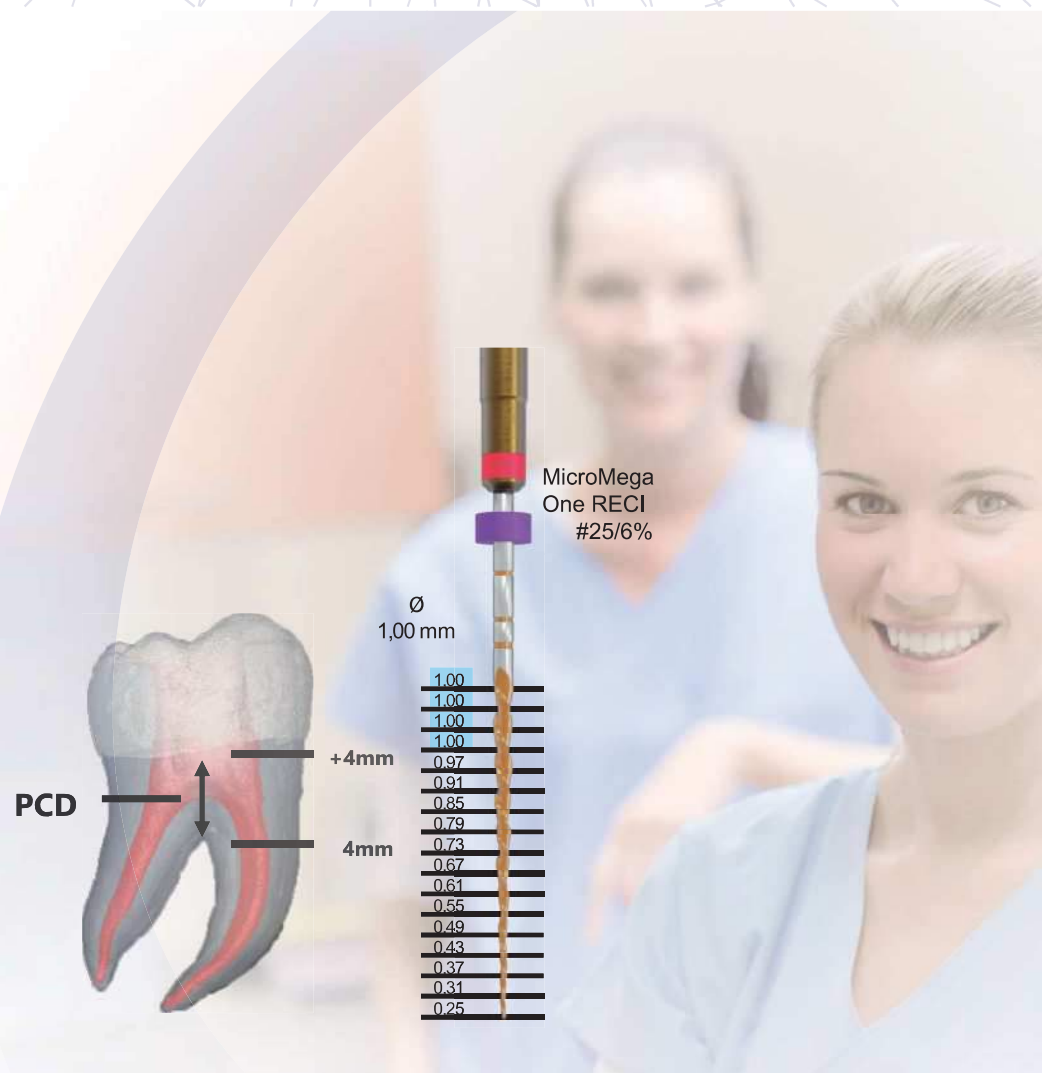

One Flare

ワンフレア
根管口拡大




#25/9%
17mm

正回転：250-400 rpm
トルク：3.0 N.cm

STERILEEO 滅菌済み

T-Wire: 熱処理NiTiワイヤー使用

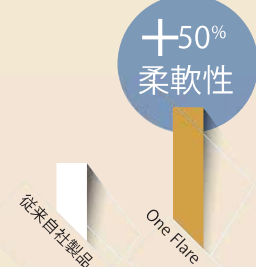

クロスセクション



One G

ワンジー
グライドパス

3つの刃先が歯根軸に対してそれぞれ異なる半径範囲に
配置され、切削片の掻き上げと穿通効率を向上させます。

非切削先端



SEM views: Prof. Hyeon-Cheol KIM (South Korea)

ねじ込みを防ぐため
らせん間が**可変ピッチ**

正回転：250-400 rpm
トルク：1.2 N.cm
単回使用

STERILEEO 滅菌済み

NiTiワイヤー使用



#14/3%
21mm / 25mm

※MicroMega特許
※One FlareとOne Gは1.2mmワイヤ使用