

歯科用吸引・防湿器具 オーラルガードⅡ

治療時に突然動く舌、頻回に繰り返す嚥下運動、あふれる水、唾液等々、歯科治療を阻害する要因は様々です。オーラルガードⅡは、これらの阻害因子を取り除き、アシストなしでも安全で効率のよい歯科診療を行っていただくために開発された歯科用吸引・防湿器具。日々の診療に大きな安心をお届けします。

ORAL GUARD Ⅱ 4つの機能

1 簡易防湿

排唾器やバキュームシリンジに接続して唾液や水分等を吸引します。

2 開口維持

シリコンゴム製のバイトブロックにより適度な開口状態を維持できます。


3 舌圧排

柔らかいシリコンゴム製のスクリーンが舌の動きを無理なく抑え、舌を保護します。

4 誤飲(誤嚥)予防

シリコンゴム製のスクリーンが咽頭部を覆い、誤飲、誤嚥を予防します。

主要部分の名称とその機能

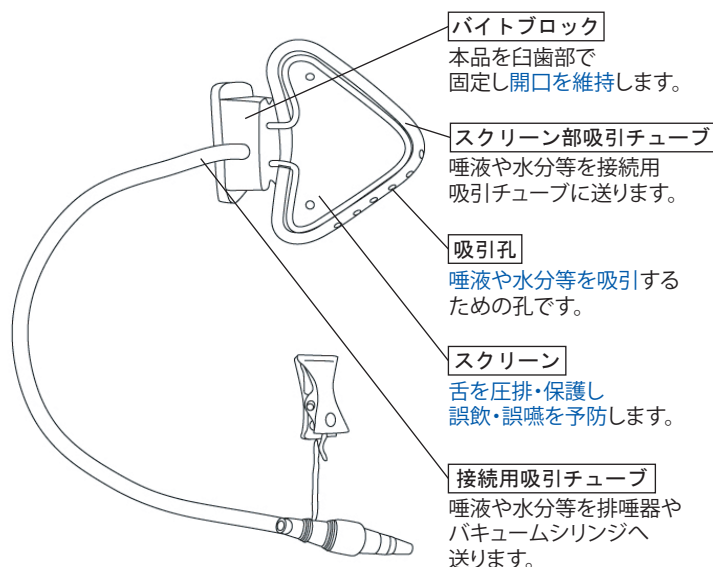

仕様

素材:シリコンゴム(吸引チューブ・スクリーン・バイトブロック)

種類:大・小の2種類(大・小共に右側治療用・左側治療用あり)

寸法:大 幅65×高さ70×奥行25mm

小 幅54×高さ62×奥行23mm

*許容誤差…標示値の±3%以内

重量:大 24g

小 19g

*許容誤差…標示値の±10%以内

包装

・大 セット:右側治療用・左側治療用 各1個/箱

・小 セット:右側治療用・左側治療用 各1個/箱

標準価格

8,500円〔大セット・小セット共通〕

※価格は平成25年3月1日現在のものです。消費税は含まれておりません。

クラス分類:一般医療機器

一般的名称:再使用可能な歯科用吸引カニューレ

販売名:オーラルガードⅡ

届出番号:13B1X00140000013

※製品の仕様・外観は、予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

本社/〒174-0056 東京都板橋区志村1-28-1 本社☎03(3966)7736 大阪営業所☎06(6308)1173 福岡営業所☎092(432)0770 札幌営業所☎011(622)7532
E-mail:sedent@sedent.co.jp URL http://www.sedent.co.jp

ORAL GUARD Ⅱ 4つのメリット

1 効率アップ

排唾やバキューム等の操作が省けるため、アシストなしで診療の効率アップが図れます。

2 安全・安心

スクリーンが舌と咽頭部を覆い、舌の圧排・保護と誤飲・誤嚥の予防も兼ねるため安心です。

3 術野の確保

舌圧排と開口が同時に行え、バキュームチップ等が口腔内から解放されるため、安全で広い術野を確保できます。

4 装着が簡単

吸引チューブの縁を歯列の内側粘膜に沿わせて挿入し、バイトブロックを臼歯部に噛ませるだけで装着できます。

装着手順



ステップ1

スクリーン部吸引チューブの縁が下顎の歯列の内側に来るように下顎側から挿入します。



ステップ2

スクリーン部吸引チューブの縁を下顎側は口腔底粘膜に、上顎側は歯列の内側粘膜に接するように適合させます。



ステップ3

バイトブロックを臼歯部に噛ませて固定します。

消毒・滅菌方法

本品(クリップを除く)は、下記のいずれかの方法で消毒・滅菌を行ってください。

- ・オートクレーブ滅菌(滅菌温度121℃以下/乾燥工程を避けること)
- ・エチレンオキサイドガス滅菌・薬液消毒・煮沸消毒


臨床応用例

根管治療・修復治療(レジン充填)
形成・シーラント等



根管治療時に使用

装着イメージ

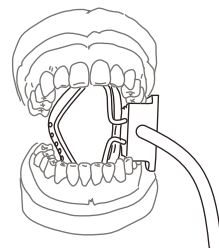

口腔内に装着した状態(右側治療時)

解放されたいね！ヒヤリ、ウツカリ、ウンザリ

一人でもアシストなしに安全で効率的な治療ができる！

歯科用吸引・防湿器具 **オーラルガードⅡ**

簡易防湿

開口維持

舌圧排

誤飲(誤嚥)予防

4つの機能が同時に行え
安全で広い術野を確保できます

