


アルギン酸塩印象材

アルフレックス デンチャー アルフレックス ダストフリー

みんなにうれしい、
アルギン酸塩印象材のお知らせです。

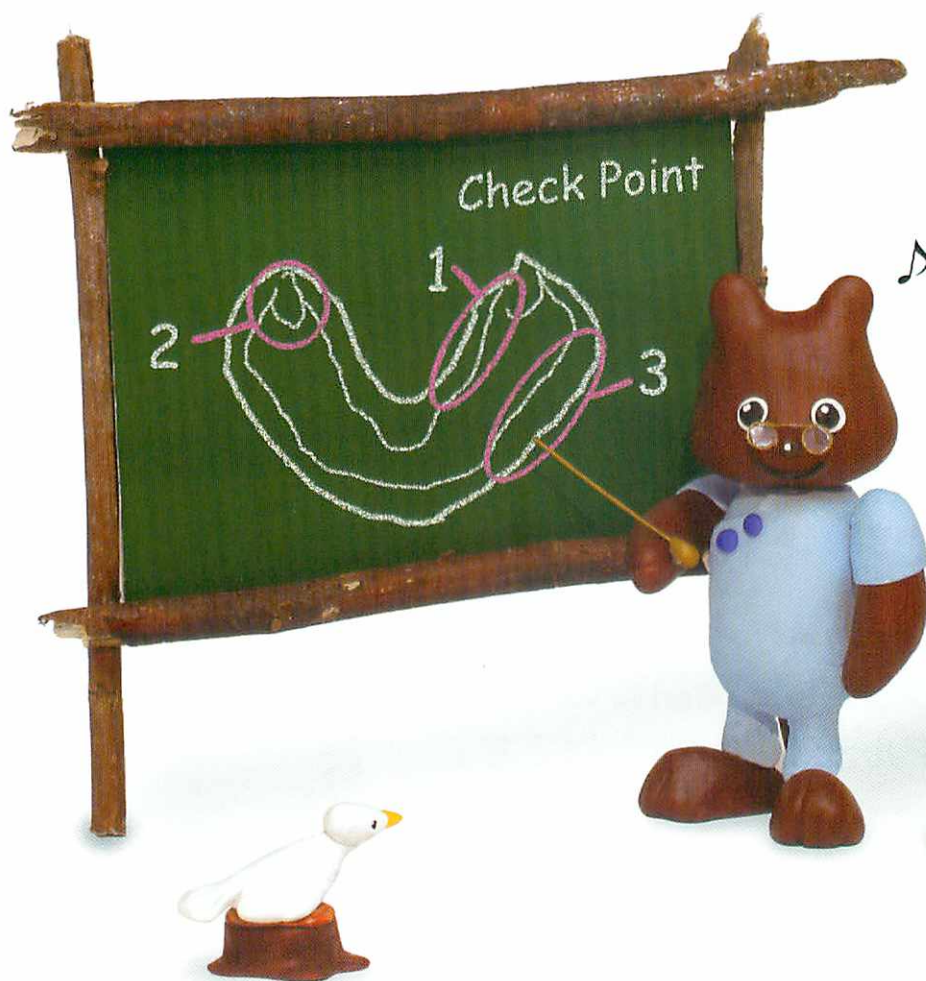

こんな材料が
欲しかった♡

アルフレックス デンチャーは、
技術面で難しいとされる義歯の印象において
術者の経験・テクニックをサポートします。



特長1 ちょうどよいコシ!

可動粘膜を無理なく押し広げ、顎堤の解剖学的形態を十分に捉える事ができます。

特長2 経験が浅くても大丈夫!

熟練を要する固練り操作*が不要です。
標準混水比で義歯に最適な固めの粘度が得られます。
※汎用アルジネート混水比を下げると固練りすると硬化時間が短くなります。

特長3 ゆとりのある操作時間!

余裕をもって印象がとれるよう硬化時間を長めに設定しています。

操作が簡単で
うれしいね♥



アルフレックス ダストフリーは、
基本用件をクリアした高品質の
汎用タイプアルジネート印象材です。



特長1 粉末と水のなじみが良く、
適度な手応えで練り込める。

特長2 寒天印象材との確実な接着

特長3 滑沢な石こう模型面

ポイント2 臼後結節

ポイント1 顎舌骨筋線とその後下方部

ポイント3 外斜線

印象から得た石こう模型

義歯の印象
ここがポイント!

印象採得後の印象



一発印象。下顎の舌側遠心まできちんと採得できている。




臼後結節、顎舌骨筋線、外斜線が取り込まれている。


写真提供 東京都世田谷区開業 松下寛先生

アルフレックス デンチャーとアルフレックス ダストフリーの性能

粘度変化

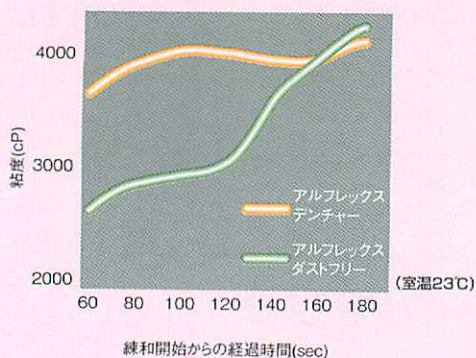

印象操作タイムテーブル

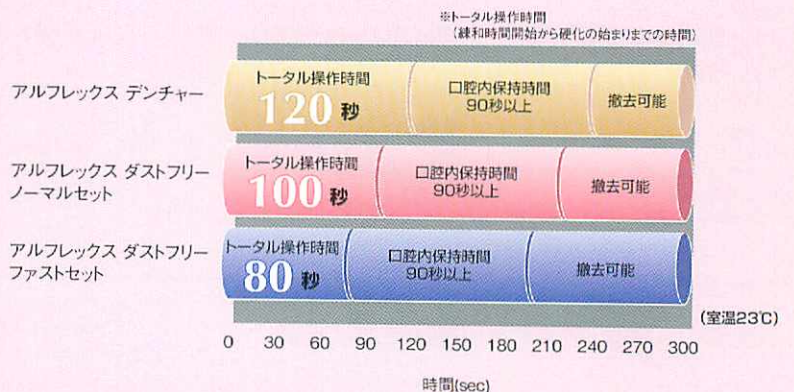

操作手順



①練和
20～30秒手早く練和します。



②印象採得
トレーに盛りつけて印象採得します。口腔内
内で1分30秒以上保持します。



③水洗
流水で洗浄後、余剰水分を除きます。



④石こう注入
できるだけ速やかに石こうを注入します。

商品



歯科用アルギン酸塩印象材

アルフレックス デンチャー

- 用途 義歯の1次印象、スナップ印象、矯正にも可
- 色調・操作時間
ホワイト／ゲル化時間2分55秒、口腔内保持時間1分30秒
- 標準価格 1kg(袋入) 4,800円 451-201
- 認証番号219AFBZX00051000



歯科用アルギン酸塩印象材

アルフレックス ダストフリー

- 用途 スナップ印象、寒天連合印象(印象全般)
- 種類・操作時間
ノーマルセット(ピンク)／ゲル化時間 2分30秒、口腔内保持時間1分30秒
ファストセット(ブルーグリーン)／ゲル化時間 2分00秒、口腔内保持時間1分30秒
- 標準価格
ノーマルセット 1箱5kg(1kg×5袋) 21,000円 451-200
ファストセット 1箱5kg(1kg×5袋) 21,000円 451-200
- 認証番号218AFBZX00089000

関連商品



模型用硬石膏 ニューダイヤストーン ダストフリー

粉末飛散が大幅に減少したダストフリータイプの硬石膏です。

- 色調 イエロー
- 標準価格
3kgシンプルパック 2,500円 233-035
- 医療機器許可番号24BZ5001
製造販売 株式会社変化デンタル



アルギン酸塩印象材用清掃材 ダイヤ・トレークリーナー

トレーの腐食が少なく、環境に優しい粉末タイプのトレークリーナーです。

- 標準価格
1kg入 1,800円 233-211
- 製造販売 株式会社変化デンタル



アルギン酸塩印象材専用軟化・溶解材 三菱トレークリーナー

水に溶けやすい液状タイプで、より速い清掃効果が見られるアルギン酸塩印象材専用の軟化・溶解材です。

- 標準価格
1000mL(1.5kg)入 2,200円 233-210
- 製造販売 株式会社変化デンタル




石膏・印象材用保管容器 石膏印象材保管容器 (ゆかちゃんBOX)

PUSHボタンを押すだけでワンタッチで開く石膏・印象材用のプラスチック保管容器です。開口部には弾性のあるすり切りがあり、片手でスピーディに計量が行えます。

- 標準価格 2,500円 233-061
- 製造販売 株式会社変化デンタル

製造販売

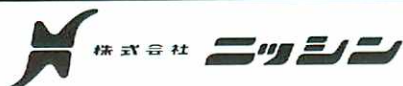

東日本営業所 東京都台東区台東4-14-8 〒110-0016 TEL:03-3836-3691
西日本営業所 京都市南区唐橋平坦町8 〒601-8469 TEL:075-681-5719
www.nissin-dental.co.jp

発売

株式会社モリタ

大阪本社 大阪府吹田市垂水町3-33-18 〒564-8650 TEL:06-6380-2525
東京本社 東京都台東区上野2-11-15 〒110-8513 TEL:03-3834-6161
www.dental-plaza.com