



義歯洗浄剤

フィジオクリーン キラリ 錠剤

入れ歯、
あんしん、
スツキリ、
キラリ。



発泡・洗浄・除菌で
ユーザーのQOL向上へ

三酸化チタン
触媒効果



総 義 歯

部分床義歯

ハートフルパッケージ

金 属 対 応





義歯洗浄剤

フィジオクリーン キラリ 錠剤

■標準価格

30包入 (3g×30) 750円
希望患者価格 945円 (税込)
[セット包装: 6箱入]

453-570

マイルド
洗浄

二酸化
チタン
配合

温水
効果

色素
除去

除菌
カンジダ菌
細菌

脱臭

刺激臭
カット

総入れ歯
対応

部分入れ歯
対応

チタン床
対応

使用方法

ぬるま湯約150mLに
1錠入れる



1
専用容器 (別売) の使用
がより効果的です。

30分以上
浸けおき洗い



2
一晩浸けておくと、
より効果的です。

ブラシなどを用い
水でよくすすぐ



3
金属部分はよくすす
いでください。



義歯洗浄容器

フィジオクリーン キラリ 錠剤 入れ歯保温洗浄容器

■寸法: 外寸 W129×H109mm
内寸 φ70×H90mm
■標準価格 400円 453-571
希望患者価格 525円 (税込)

「義歯」に、「ユーザー」にうれしい、お薦めしたい洗浄剤

●カンジダ菌などの細菌へ優れた除菌効果

カンジダ菌

細菌

色素


除去

●チタンなどの金属にも使用可能

ヤニなどもスッキリ洗浄!
でも金属は黒ずみにくい!



洗浄前

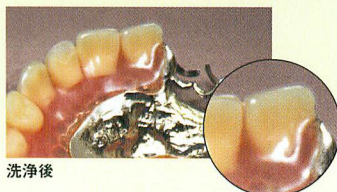

洗浄後

洗浄後の金属への影響




Co-Cr合金 純Ti Ti合金

フィジオクリーン キラリ 錠剤

弊社従来品

●ヌメリがとれてスッキリ爽快

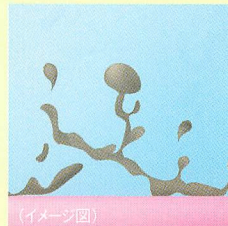

(イメージ図)

汚れはもちろん、
ヌルヌル感を落とします。



(株) ニッシン独自調査アンケート結果

●無香料だから、美味しい食事

香料を使用していないので、洗浄後の食事
も味を損ないません。



●毎日使えるハートフルパッケージ

使い始めから取り出しやすいように1包ずつ
切り離されている包装を考えました。
1日1包、1ヶ月で1箱。ユーザー視線の発想
です。



関連商品(クリニック用)

歯石用

PHYSIO CLEAN Pro

フィジオクリーン プロ 歯石用

■標準価格 3,900円 453-551



色素用

PHYSIO CLEAN Pro

フィジオクリーン プロ 色素用

■標準価格 3,900円 453-552



色素用には
パワーアップライトで

フィジオクリーン
パワーアップライト

■標準価格 12,200円 453-553



●標準価格の後の6ケタの数字は商品コードです。●掲載商品の標準価格は、2007年8月21日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりませんが、希望患者価格は税込の総額表示です。
●掲載データは、株式会社ニッシンで測定したものです。●ご使用に際しましては、製品の取扱説明書を必ずお読みください。

製造販売



西日本営業所 京都市南区唐橋平垣町8 〒601-8469 TEL:075-681-5719
東日本営業所 東京都台東区台東4-14-8 〒110-0016 TEL:03-3836-3691
www.nissin-dental.co.jp

発売

株式会社モリタ

大阪本社 大阪府吹田市垂水町3-33-18 〒564-8650 TEL:06-6380-2525
東京本社 東京都台東区上野2-11-15 〒110-8513 TEL:03-3834-6161
www.dental-plaza.com

●自然環境を考慮して再生紙を使用しています。