

DENTURE CLEANER

PHYSIO CLEAN PRO

for DENTURE STAIN II

フィジオクリーン プロ 色素用II

希釈可能



短時間で義歯を洗浄・除菌!
タバコのヤニや
着色汚れを落とします!

義歯洗浄剤
フィジオクリーン プロ 色素用II

■標準価格

1.2L 4,300円(税抜) 204530563

4L 10,500円(税抜) 204530564

タバコのヤニや着色汚れを落とします。



使用前
タバコのヤニが付着した義歯。



使用中
フィジオクリーンプロ色素用IIと超音波洗浄器にて10分間洗浄。



使用后
フィジオクリーンプロ色素用IIから取り出し、すすいだ義歯。着色汚れが除去できています。

ガンコな着色汚れも短時間で除去!

超音波洗浄器で5~10分間洗浄することで、タバコのヤニやガンコな着色汚れを短時間で除去します。当社従来品から洗浄時間を短縮、簡単に洗浄できるようになりました。

※「フィジオクリーンプロ 色素用II」で落ちない歯石は、「フィジオクリーンプロ 歯石用II」をご使用ください。

次亜塩素酸ナトリウム配合

次亜塩素酸ナトリウム配合で洗浄・除菌効果を発揮し、カンジダ菌やその他細菌を除去します。

希釈して使用できます


義歯の汚れに応じて最大3倍まで希釈して使用できます。ガンコな汚れの場合は希釈せず原液のままお使いください。

使用
可能
材料


- ・レジン床義歯 ・金属床義歯
- ・ノンメタルクラスプデンチャー ・矯正用リテーナー
- ・ナイトガード ・スプリント ・マウスガード

※ティッシュコンディショナーを装着した義歯には使用できません。


使用方法

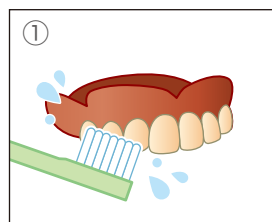


① 義歯を水ですすいでください。洗浄前にとれる汚れはこの時点でブラシ等を用いて除去してください。

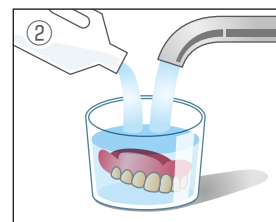

② プラスチックまたはガラスの容器に義歯を入れ、汚れに応じて本製品を原液~3倍に希釈したものを、完全に浸かるように注いでください。

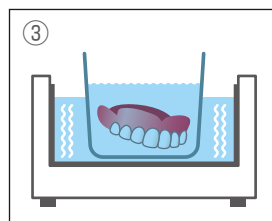

③ 超音波洗浄器にて5~10分間洗浄してください。

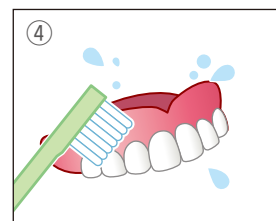

④ 義歯を洗浄液から取り出し、ブラシ等を用いて流水で十分にすすいでください。
※強アルカリ性ですので、すぎは十分にしてください。

義歯洗浄剤 フィジオクリーン プロ 色素用II



標準価格 1.2L 4,300円(税抜)
204530563

【成分】次亜塩素酸ナトリウム、界面活性剤、水酸化ナトリウム、防錆剤 【液性】アルカリ性



標準価格 4L 10,500円(税抜)
204530564

関連製品



義歯洗浄剤
フィジオクリーン プロ 歯石用II

■標準価格
1.2L 3,900円(税抜) 204530548
4L 9,800円(税抜) 204530549



義歯洗浄剤
フィジオクリーン キラリ 錠剤
【セット包装：6箱入】

■標準価格
30錠入(3g×30) 750円(税抜)
希望患者価格 900円(税抜)
204530570

●標準価格の後の9ケタの数字は商品コードです。●掲載商品の標準価格は、2021年6月現在のものです。●ご使用に際しましては製品の取扱説明を必ずお読みください。

製造販売元 **株式会社ニッシン**

〒621-0001 京都府亀岡市旭町樋ノ口88

☎ 0120-571939 (平日 10:00 ~ 17:00)

www.nissin-dental.jp

発売元 **株式会社モリタ**

大阪本社 大阪府吹田市垂水町3-33-18 〒564-8650 T 06. 6380 2525

東京本社 東京都台東区上野2-11-15 〒110-8513 T 03. 3834 6161

お問合せ お客様相談センター T 0800.222 8020(フリーコール)

www.dental-plaza.com