


クリアワイドフード 取扱説明書

この度はクリアワイドフードをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございましたこの商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり保管してください。

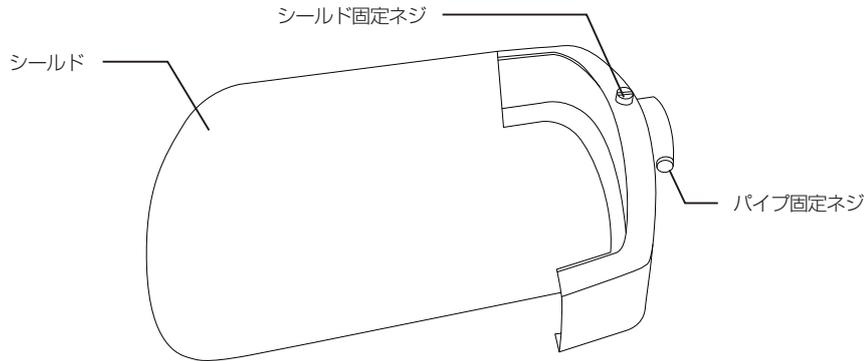

1. 取付方法


- ①シールド固定ネジをゆるめ、シールドをガイドにそって奥までしっかりと差し込みます。その際、シールドが3つのリブ（赤い丸）の内側を取っていることを確認してください。
- ②シールド固定ネジをシールドにあたるまで締め付けてください。※軽く締めるだけでシールドは固定されます。締め付け後、軽く引っ張り、抜けないことを確認してください。



注 意

ネジを締めすぎるとリブが破折します。締め付けの際には充分ご注意ください。

■ヘパクリーンへ取付の場合・・・

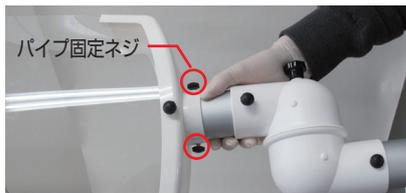

- 1.ヘパクリーンの先端にクリアワイドフードのフレーム部分を持ち、アームに差し込み、パイプ固定ネジでフードを固定してください。

■ヘパクリーン以外のアームに取り付ける場合・・・



- 1.取付するアームのパイプ先端外径がφ50mmか確認してください。
- 2.クリアワイドフードのフレーム部分を持ち、アームに差し込み、パイプ固定ネジでフードを固定してください。

2. ご注意

- 取付するアームの外径が50φ以外の物には取付できません。
- アームの位置を変える場合は、必ずアームのパイプ部分を持って変更してください。破損する恐れがあります。
- シールドが汚れた場合は柔らかな布と中性洗剤で清掃してください。
- アルコール等を使用すると、変色する場合がありますので、除菌と清掃が同時におこなえる花王「セーフキープ」をお勧めします。
- 必要に応じ、シールドは交換してください。

本品は予告なしにデザイン、仕様、付属品の内容を変更することがあります。ご不明な点がございましたら弊社宛お問合せください。

