



速やかな止血効果。

抜歯など口腔内手術に伴う出血に、  
ヘムコン デンタル ドレッシング。

医療用品 4 整形用品 | 一般医療機器 綿状パッド 32572000




**ヘムコン デンタル ドレッシング®**  
**HemCon Dental Dressing®**

## 特徴

1. キトサンを使用した製品です。
2. 素早い止血効果が得られ、効果が持続します。
3. 生体中の凝固線溶系因子を介さずに止血効果を発揮し、自然な凝血塊の形成を促します。
4. 出血面の範囲や出血の程度により、2種類のサイズ  
(10mm×12mm 厚さ:3.5mm、25mm×70mm 厚さ:1.15mm)から製品を選べます。
5. ISO10993に基づく生物学的安全性を検証しています。
6. 滅菌済みのため、必要な時にすぐ使えます。

## 作用機序

- ◎キトサンはプラスに帯電していて、出血面に適応すると、マイナスに帯電した血液中の赤血球と血小板を引き付けます。
- ◎ヘムコンデンタルドレッシングはこの電荷特性により速やかに傷口を塞ぎ、止血効果を発揮します。
- ◎その後、生体内では血小板凝集反応により凝血塊が形成されます。
- ◎ヘムコンデンタルドレッシングは出血面において、出血口の血栓を強化します。

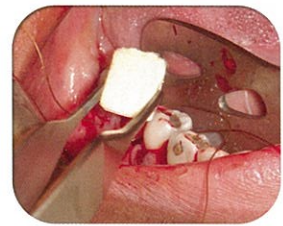

## 使用目的

口腔内止血のために、手術等に使用する。また、一時的に口腔粘膜組織を保護する。

## 使用方法

**1**

滅菌包装を開封し、本品を取り出してください。  
必要であれば本品を出血面(部位)にあわせて適当な大きさに切ってください。

**2**

少量の血液を残し、ピンセット等で本品を直接、出血面(部位)に接着させてください。  
この時、出血面(部位)を包み込んだりしないようしてください。

**3**

出血面(部位)を圧迫し、しばらく押えて止血してください。  
48時間以内に水で洗い流して、本品を取り除いてください。

(注)本品は酢酸が含まれるため、においがありますが、製品に問題はありません。

## 使用上の注意

- ◎包装の破損したもの、開封済みのもの又は水濡れしたものは使用しないこと。
- ◎本品を留置したまま縫合しないこと。
- ◎本品は単回使用製品であり、1回限りの使用で使い捨て、**再使用しないこと。**
- ◎**再滅菌しないこと。**
- ◎本品使用中に過敏症状が現れた場合には使用を中止し、適切な治療を行うこと。

## 貯蔵・保管方法

室温で保管すること。

## 包装

5枚/1箱 12枚/1箱

