



象牙質知覚過敏抑制材


グルーマ® ディセンシタイザー パワーゲル

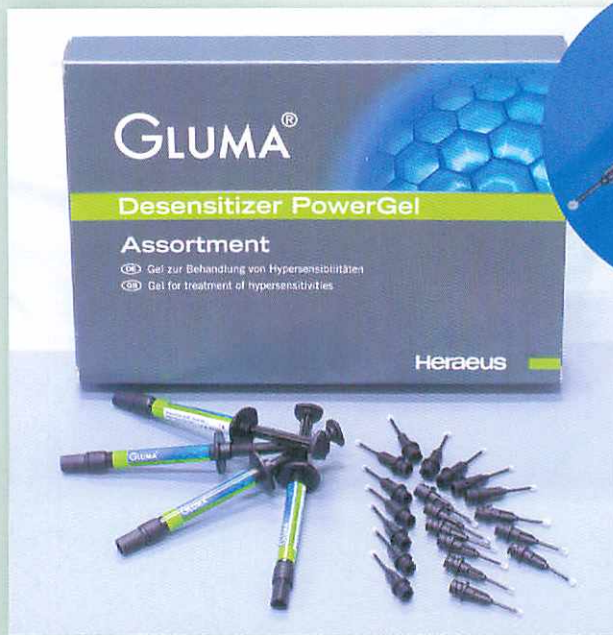

グルーマ® ディセンシタイザーが
緑色のゲル状になりました。

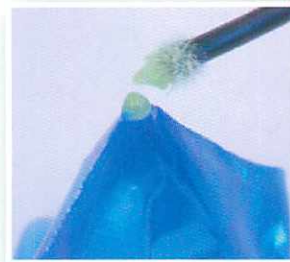

患部にしっかり
留まります

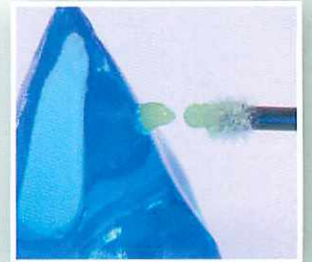

傾斜のある患部でも
流れません



患部に最少量のパワーゲルを塗布
します。



緑色なので、視認が簡単です。
60秒間放置します。



水洗後、色素は残りません。

グルーマ® ディセンシタイザー パワーゲルは
従来のグルーマ® ディセンシタイザーと同様の効果が期待できます。

即効性
塗布直後の有効率は
76.5%*

ゲルのため
歯肉への
接触リスクが
軽減します

グルーマ® ディセンシタイザー パワーゲル

セット内容 ・ シリンジ 1g×4本
・ フラシノズル×20本

販売名：グルーマディセンシタイザー パワーゲル
一般的名称：歯科用知覚過敏抑制剤材料
分類：管理医療機器
認証番号：223AGBZX00028000


製品コード：45235

医院標準価格 **¥9,790**


* グルーマ® ディセンシタイザー市販後調査より

保険適用 象牙質知覚過敏の処置は保険請求できます。


グルーマ® ディセンシタイザー パワーゲルの機能は…




1 健全な歯牙より
歯牙よりエナメル質が磨耗などで失われ象牙細管が開口します。

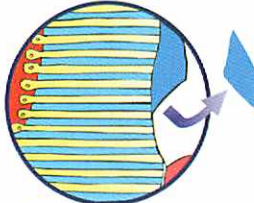


2 拡大して

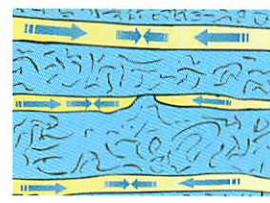

3 痛む、しみるのは…
象牙細管内の組織液が移動し、刺激が歯髄に伝わります。

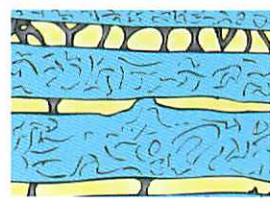


4 塗布すると…
グルーマが重合物を形成し象牙細管内部を封鎖します。

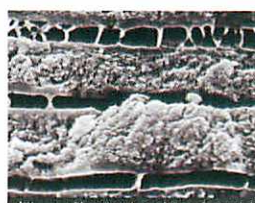


〈Finger 他: Eur J Oral Sci (1997)〉
細管内部0.5mm程度の封鎖することも報告されています*。

*井上昌孝他:グルーマ3プライマーの象牙知覚過敏症への臨床応用日歯保誌39(3),768-776,1996 RARL, DDS


■ 知覚過敏処置後のコンポジットレジン接着をしても、ボンディング力は低下しません。

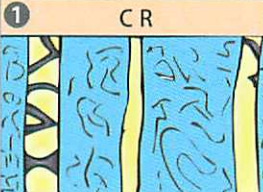

1 CR
象牙質表面上に被膜を生じず接着力は変わりません。



2
象牙質表面上に被膜を形成する材料



3
象牙細管に結晶を析出する材料

グルーマ®ディセンシタイザー パワーゲル

CRとの間に接着力低下が報告されています。〈日本理化学会誌:Vol29 No4より〉

グルーマ® ディセンシタイザー パワーゲルの使用方法



1 準備
患部表面を清掃、水洗



2 防湿
ラバーダムなどで粘膜を保護



3 塗布
処置に必要な最少量の本材を患部歯面に塗布




4 放置
30~60秒間放置



5 水洗
吸収しながら十分に水洗

関連製品

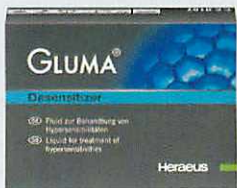

グルーマ® ディセンシタイザーキット

セット内容・ボトル5ml×1本
・マイクロブラシ×100本
・ペーパーパッド×1冊

販売名: グルーマ
一般的名称: 医薬品含有歯科用知覚過敏抑制材料
分類: 高度管理医療機器
承認番号: 207008ZY01028300
製品コード: 45224

医院標準価格 **¥10,670**



アイボンド® セルフエッチ アソートメント

セット内容・ボトル4ml×1本
・アプリケーションャー(ブラシ)×50本
・ティッシュ×1個

販売名: アイボンドセルフエッチ
一般的名称: 歯科用象牙質接着材
分類: 管理医療機器
承認番号: 222AG8ZX00058000

製品コード: 45417

医院標準価格 **¥12,000**

■ 製造販売元

ヘレウス クルツァー ジャパン 株式会社

本社: 〒113-0033 東京都文京区本郷4-8-13 TEL.03-5803-2151
札幌営業所: 〒003-0021 札幌市白石区栄通1-1-20-101 TEL.090-7555-8560
仙台営業所: 〒981-3133 仙台市泉区泉中央3-30-6-102 TEL.022-371-1007
名古屋営業所: 〒461-0004 名古屋市東区葵1-13-18 TEL.052-935-5451
大阪営業所: 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-3-12 TEL.06-6396-3100
福岡営業所: 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3-3-16 TEL.092-472-0720
フリーダイヤル: 0120-230-331 (受付時間10:00~16:00/土・日・祝日を除く)

<http://www.heraeus-kulzer.co.jp/>