

Heraeus

GLUMA®



歯科用象牙質接着材（光重合型 1 液性ボンディング材）

グルーマ® セルフエッチ

薄膜の接着層と塗布性能で
審美修復が可能

アイボンド®セルフエッチはグルーマ®セルフエッチに改良されました。

歯の健康を支えるパートナー ヘレウス

Quality made in Germany

1 優れた塗布性能

- **適度な粘稠度**により、伸び良く均一な塗布が可能。
- 臼歯窩底部や起伏部の**液だまり発生を防ぎます**。
- アセトン配合によりマイルドなエアブローでも溶媒が蒸発し、歯質に有効成分が浸透。

■ 起伏のある厚紙に塗布



流動性に優れて、凸凹の状態でも均一に塗布されている状態が確認できます。

■ 窩洞形成したプラスチック歯牙に塗布



窩底部、窩壁にも液溜まりなく塗布されています。

2 薄膜の接着層と高い接着力


**厚さわずか約3~5μmの
均一な接着層で、審美性向上。**

- 極薄の接着層により褐線が出にくく、特に前歯マージン部に対しても質の高い審美修復が可能です。
- 接着層が非常に薄い為、浅い窩洞であっても十分なコンポジットレジン充填スペースの確保ができます。



グルーマ セルフエッチの接着層SEM像 (×500)

象牙質における
せん断接着力

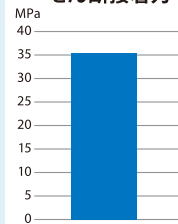

出典
R&D ヘルウス クルツァー ドイツ

3 より使いやすくなりました



■ 保管がしやすい

室温 25℃以下での保管が可能です。



■ すぐに使える

使用前にボトルを振る必要はありません。

操作方法

1 塗布・浸透

適量(小さい窩洞は1滴、大きい窩洞は2滴)を採取し塗布して20秒攪拌して浸透させます。



2 エアー乾燥

5~10秒程度、ゆっくりと乾燥。



3 光照射

20秒(ハロゲン・LEDの場合。プラズマの場合は8秒)



■グルーマ® セルフエッチと関連製品

グルーマ® セルフエッチ リフィール



セット内容：
4 ml ボトル × 1
アプリケーター
ブラシ 50本
ディッシュ × 1
製品コード：45437

グルーマ® セルフエッチ バリューストック



セット内容：4 ml ボトル × 3
製品コード：45438

販売名：グルーマ セルフエッチ
一般的名称：歯科用象牙質接着材
分類：管理医療機器
認証番号：224ABBZX00153000

グルーマ® ディセンシタイザー

セット内容：5ml ボトル × 1
製品コード：45220



販売名：グルーマ ディセンシタイザー
一般的名称：医薬品含有歯科用
知覚過敏抑制材料
分類：高度管理医療機器
承認番号：22400BZX00133000

■ 製造販売元

ヘレウス クルツァー ジャパン 株式会社

本社：〒113-0033 東京都文京区本郷4-8-13 TEL.03-5803-2151
札幌営業所：〒003-0825 札幌市白石区菊水元町五条2-9-1 TEL.090-7555-8560
仙台営業所：〒981-3133 仙台市泉区泉中央3-30-6-102 TEL.022-371-1007
名古屋営業所：〒461-0004 名古屋市東区葵1-13-18 TEL.052-935-5451
大阪営業所：〒541-0046 大阪市中央区平野町2-1-14 TEL.06-6233-2500
福岡営業所：〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3-6-12 TEL.092-472-0720
フリーダイヤル：0120-230-331 (受付時間10:00~16:00/土・日・祝日を除く)

<http://www.heraeus-kulzer.co.jp/>