


歯科用ゴム製研磨材と歯科用ダイヤモンドバー

ラスター口腔内 **ジルコニア用** キット **e.max® (ニケイ酸リチウム) 用** キット

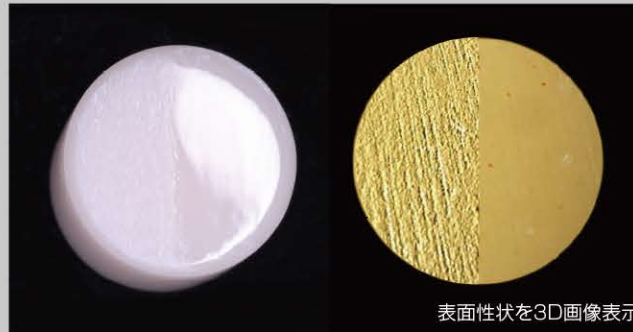

ニケイ酸リチウム表面をカーボランダムで切削した状態。
右半面をラスターで2ステップ研磨。

● 研磨ペースト不要

ジルコニアクラウンの使用例

ジルコニアの硬度は、約1,300Hvです。

e.max® (ニケイ酸リチウム) の使用例

ニケイ酸リチウムの硬度は、約590Hvです。



1 ステップ:仕上げ
DCA 06 HP 170で
研磨開始。



1 ステップ:ポイントを用いて仕上げ
DCA 04 RA 040で
咬合面を研磨。



2 ステップ:つや出し
研磨
DCA 12 HP 170で
研磨終了。



1 ステップ:仕上げ
DPO 03 HP110で
研磨開始。




1 ステップ:ポイントを用いて仕上げ
DPO 02 RA 040で
咬合面を研磨。




2 ステップ:つや出し
研磨
DPO 06 HP 110で
研磨終了。

ラスターには、素材の硬さに適した2種類の研磨材があります。

マイジンガー社では充填する人工ダイヤモンド粒子をラスター用に均一加工しています。さらに硬度に合わせて粒子エッジの丸み、粒子サイズを変えた、2種類の研磨材をご用意しております。これにより素材の硬さに合わせた効率の良い研磨が可能になりました。

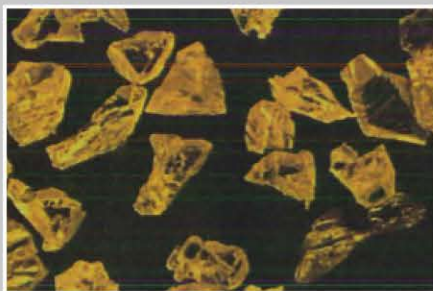

人工ダイヤモンド粒子

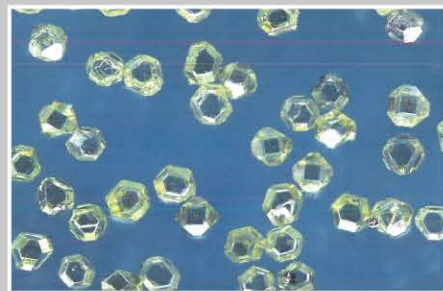

ラスター用に加工されたダイヤモンド粒子

ジルコニア用 キット 7本入り

●ラスターは、1ステップ:仕上げを、ミディアムタイプで行い、2ステップ:つや出しをファインタイプで行うシステムです。



ディスクタイプ(HP)
別売り(1本入り)

ジルコニア用キット

調整用のダイヤモンド(FG)バー3種類とポイントとカップの2ステップ研磨用のポリッシャー(RA)より構成。
*ディスクタイプ(HP)は1本入りで別売り。

e.max[®](ニケイ酸リチウム)用キット 7本入り












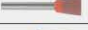




ディスクタイプ(HP)
別売り(2本入り)

e.max[®](ニケイ酸リチウム)用キット

調整用のダイヤモンド(FG)バー3種類とポイントとカップの2ステップ研磨用のポリッシャー(RA)より構成。
*ディスクタイプ(HP)は2本入りで別売り。

ラスター製品群種類

商品	商品コード	商品名	粒子	適正回転数 (rpm)	入り数	
ラスターキット						
	82109	ラスター口腔内 ジルコニア用キット 7本入り			各1	
単品						
キット構成		81183	MG ラスター DMZ801 FG 010 5入り	ミディアム	160,000以下	5
		81184	MG ラスター DMZ850 FG 018 5入り	ミディアム	160,000以下	5
		81185	MG ラスター DMZ833 FG 023 5入り	ミディアム	160,000以下	5
		82111	MG ラスター DCA04 RA 040 2入り	ミディアム	7,000~10,000	2
		82112	MG ラスター DCA13 RA 060 2入り	ミディアム	7,000~10,000	2
		82113	MG ラスター DCA10 RA 040 2入り	ファイン	7,000~10,000	2
		82114	MG ラスター DCA14 RA 060 2入り	ファイン	7,000~10,000	2
別売り		82119	MG ラスター DCA06 HP 170 1入り	ミディアム	7,000以下	1
		82120	MG ラスター DCA12 HP 170 1入り	ファイン	7,000以下	1
ラスターキット						
	82110	ラスター口腔内 e.max [®] (ニケイ酸リチウム)用キット 7本入り			各1	
単品						
キット構成		81183	MG ラスター DMZ801 FG 010 5入り	ミディアム	160,000以下	5
		81186	MG ラスター DMZ850 FG 018 5入り	ファイン	160,000以下	5
		81187	MG ラスター DMZ833 FG 023 5入り	ファイン	160,000以下	5
		82115	MG ラスター DP002 RA 040 2入り	ミディアム	10,000以下	2
		82116	MG ラスター DP007 RA 060 2入り	ミディアム	10,000以下	2
		82117	MG ラスター DP005 RA 040 2入り	ファイン	10,000以下	2
		82118	MG ラスター DP008 RA 060 2入り	ファイン	10,000以下	2
別売り		82121	MG ラスター DP003 HP 110 2入り	ミディアム	7,000以下	2
		82122	MG ラスター DP006 HP 110 2入り	ファイン	7,000以下	2

販売名:ラスター
一般的名称:
歯科用ゴム製磨材
(歯科用ダイヤモンドバー)
分類:一般医療機器
届出番号:
27B1X00060000075

お問い合わせ、ご用命は

製造販売元

ヘレウス クルツァー ジャパン 株式会社

本社:〒113-0033 東京都文京区本郷4-8-13 TEL.03-5803-2151
札幌営業所:〒003-0825 札幌市白石区菊水元町五条2-9-1 TEL.090-7555-8560
仙台営業所:〒981-3133 仙台市泉区泉中央3-30-6-102 TEL.022-371-1007
名古屋営業所:〒461-0004 名古屋市東区葵1-13-18 TEL.052-935-5451
大阪営業所:〒541-0046 大阪市中央区平野町2-1-14 TEL.06-6233-2500
福岡営業所:〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3-6-12 TEL.092-472-0720
フリーダイヤル:0120-230-331 (受付時間:10:00~16:00/土・日・祝日を除く)
<http://www.heraeus-kulzer.co.jp/>

L16ME07-01-1307-30000DS