

ソルベントフリーのボンディング材

BOND 1[®] SF ボンドワン SF

歯科用象牙質接着材



ソルベント・フリー

アルコール、水、アセトンを含みません

**ボンドワン SF はアルコール、水、アセトンを含まない
ソルベントフリータイプの 1 液性ボンディング材です。**

- **優れた接着性** ----- 象牙質 24.7MPa、エナメル質 22.7MPa
- **エアブロー不要** ----- アルコール、水、アセトンを含まないため、乾燥ステップが不要
- **シンプルステップ** --- ボンドワン SF 塗布後、光照射 10 秒でボンディング操作完了

BOND 1[®] SF ボンドワン SF



ソルベント・フリー
アルコール、水、アセトンを含みません

ボンドワンSFの特長

- **ソルベントフリー** 水、アセトン、アルコールを含みません。
- **乾燥ステップが不要** 「どのくらいの強さでエアーをかけて良いか？」で悩む必要がありません。
- **セルフエッチング** エッチング操作が不要です。

優れた接着力

ボンドワン SFは、象牙質とエナメル質のどちらにも優れた接着性能を発揮します。

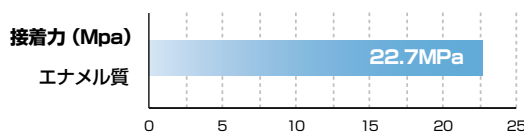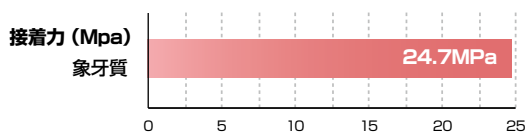

Bond strength data by W. Jia, S. Jin and J. Turcotte (Pentron Clinical Technologies, LLC, Wallingford CT).

ボンドワン SFの容易なステップ

ボンドワン SFは次のステップでボンディング操作が完了します。

Step
1



専用ニードルチップを装着し、先端にボンドワンSFを浸透させます。

Step
2



歯面に20秒間すりこむように塗布します。

Step
3



光重合を10秒間おこないます。

※照射条件
有効波長領域 460nm ~ 500nm および
放射照度 600 ~ 1000mW/cm²の歯科用可視光線照射器

商品構成

ボンドワン SF

1mLシリンジ × 2本

ニードルブラシ × 20本



¥10,000

関連アクセサリ

ニードルブラシ × 100本



¥7,500

組成

4MET,UDMA,HEMA,TEGDMA, 重合開始材、その他

ボンドワン SF 管理医療機器 歯科材料 (5) 歯科用接着充填材料 歯科用象牙質接着材 (42483002) 医療機器認証番号: 222AGBZX00145000 号

ニードルブラシ 一般医療機器 機械器具 (65) 歯科用充填器 歯科用充填・修復材補助器具 (38782000) 医療機器届出番号: 13B2X00022000038 号