


リトリティアー

RETREATY

 perfect

ガッタパーチャの除去に特化した低侵襲リトリートメント NiTi ファイル

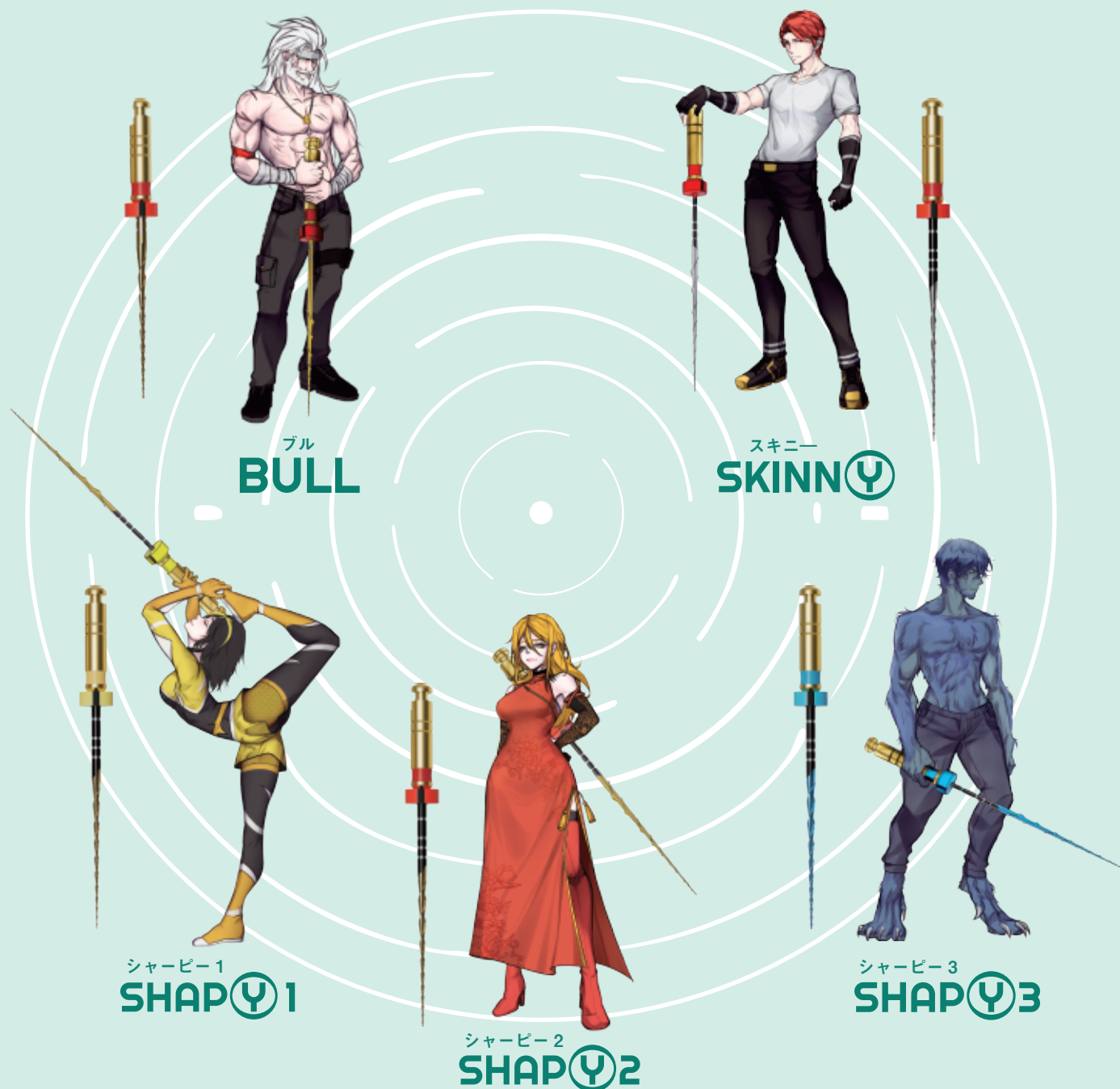


ガッタパーチャの除去に特化した
3種類の熱処理を施した**5種類**のファイル形状


製品名	金属相	熱処理	用途
BULL	マルテンサイト相	ゴールド	歯冠側 1/3 (コロナルサード) のガッタパーチャ除去 ● #25/.07
SKINN 	オーステナイト相	シルバー	根管中央 1/3 (ミドルサード) のガッタパーチャ除去 ● #25/.04
SHAP 	マルテンサイト相	ゴールド	根尖側 1/3 (アピカルサード) のガッタパーチャ除去と再根管形成 ● #20/.05
SHAP 	マルテンサイト相	ゴールド	根尖側 1/3 (アピカルサード) のガッタパーチャ除去と再根管形成 ● #25/.05
SHAP 	マルテンサイト相	ブルー	根尖側 1/3 (アピカルサード) のガッタパーチャ除去と再根管形成 ● #30/.05

スタイルイタリアーノ エンドドンティクス

“Style Italiano Endodontics” の治療プロトコルに準拠し開発された、ガッタパーチャの除去に特化した低侵襲リトリートメントファイルです。再根管治療の各段階に最適化された5種類のファイル形状と3種類の熱処理を組み合わせることで、元の根管形態を維持しながら、低侵襲かつ効果的な再根管治療が可能です。

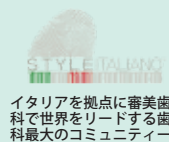Sequence
STEP1ブル
BULL ● #25/.07

歯冠側 1/3 (コロナルサード) のガッタパーチャを除去

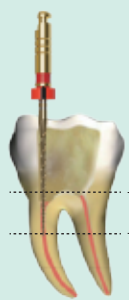
歯冠側 1/3
(コロナルサード)

- ・金属相：マルテンサイト
- ・熱処理：ゴールド熱処理



正回転

- ・回転数：350～500RPM
- ・トルク：1.5 Ncm

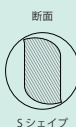

Sシェイプ



カッティングチップ

特殊な S シェイプブレードによる高い掻き出し効果と、切削片の排出を促進する 7% のテーパ設計により、これまで以上に短時間かつパワフルにガッタパーチャを除去することが可能です。

Sequence
STEP2スキニー
SKINN ● #25/.04

根管中央 1/3 (ミドルサード) のガッタパーチャを除去

根管中央 1/3
(ミドルサード)

- ・金属相：オーステナイト
- ・熱処理：シルバー熱処理



正回転

- ・回転数：350～500RPM
- ・トルク：1.5 Ncm



Sシェイプ



カッティングチップ

シルバー熱処理されたオーステナイトの持つ高い弾性力により、負荷のかかりやすい根管中央部に残存したガッタパーチャを効率的に除去することが可能です。

Sequence
STEP3シャビー 1
SHAP ● #20/.05


根尖側 1/3 (アピカルサード) のガッタパーチャ除去と再根管形成

- ・金属相：マルテンサイト
- ・熱処理：ゴールド熱処理



正回転

- ・回転数：350～500RPM
- ・トルク：1.5 Ncm

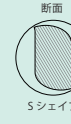

Sシェイプ



ノンカッティングチップ

柔軟性と切削効率を両立させたシェーピングファイルです。(#20/.05) 根尖側のガッタパーチャを除去すると同時に、残存象牙質を最大限に保存した低侵襲での再根管形成が可能です。

Sequence
STEP4シャビー 2
SHAP ● #25/.05


根尖側 1/3 (アピカルサード) のガッタパーチャ除去と再根管形成

- ・金属相：マルテンサイト
- ・熱処理：ゴールド熱処理



正回転

- ・回転数：350～500RPM
- ・トルク：1.5 Ncm

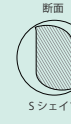

Sシェイプ



ノンカッティングチップ

柔軟性と切削効率を両立させたシェーピングファイルです。(#25/.05) 根尖側のガッタパーチャを除去すると同時に、残存象牙質を最大限に保存した低侵襲での再根管形成が可能です。

Sequence
STEP5シャビー 3
SHAP ● #30/.05


根尖側 1/3 (アピカルサード) のガッタパーチャ除去と再根管形成

- ・金属相：マルテンサイト
- ・熱処理：ブルー熱処理



正回転

- ・回転数：350～500RPM
- ・トルク：1.5 Ncm

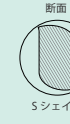

Sシェイプ



ノンカッティングチップ

ブルー熱処理を施すことで、優れた柔軟性を実現したフィニッシングファイルです。湾曲根管への高い追従性を有しており、複雑な解剖学的形態を考慮した低侵襲な再根管形成が可能です。

● アソートセット

製品番号	製品名	Order	内容	標準価格
DP-RTY-AS-21	Re-Treaty Kit アソートセット 21mm		Bull ● #25/.07	¥4,500 (税抜)
DP-RTY-AS-25	Re-Treaty Kit アソートセット 25mm		SkinnY ● #25/.04	
DP-RTY-AS-31	Re-Treaty Kit アソートセット 31mm		ShapY1 ● #20/.05	
			ShapY2 ● #25/.05	
			ShapY3 ● #30/.05	

● Bull 単品

製品番号	製品名	Order
DP-RTY-BL-21	Bull ● #25/.07 21mm	
¥4,500 (税抜)		

● 21mm 単品

21mm ※同種 5 本入	Order
DP-RTY-SN-21 SkinnY ● #25/.04 21mm	
DP-RTY-SP1-21 ShapY1 ● #20/.05 21mm	
DP-RTY-SP2-21 ShapY2 ● #25/.05 21mm	
DP-RTY-SP3-21 ShapY3 ● #30/.05 21mm	
¥4,500 (税抜)	

● 25mm 単品

25mm ※同種 5 本入	Order
DP-RTY-SN-25 SkinnY ● #25/.04 25mm	
DP-RTY-SP1-25 ShapY1 ● #20/.05 25mm	
DP-RTY-SP2-25 ShapY2 ● #25/.05 25mm	
DP-RTY-SP3-25 ShapY3 ● #30/.05 25mm	
¥4,500 (税抜)	

● 31mm 単品

31mm ※同種 5 本入	Order
DP-RTY-SN-31 SkinnY ● #25/.04 31mm	
DP-RTY-SP1-31 ShapY1 ● #20/.05 31mm	
DP-RTY-SP2-31 ShapY2 ● #25/.05 31mm	
DP-RTY-SP3-31 ShapY3 ● #30/.05 31mm	
¥4,500 (税抜)	

D パーフェクト NT 管理医療機器 機械器具 (49) 医療用穿刺器、穿削器及び穿孔器 電動式歯科用ファイル (31878022) 認証番号: 307AGBZX00018000 号