

インプラント リムーバー

Implant Remover

アクセスホールに
合わせ
リムーバーの
先端をカット


リムーバーを
インプラント体
アクセスホール
に挿入

反時計回りに
締結

締結完了

さらに
反時計回りに
回す

歯槽骨より
インプラント
除去

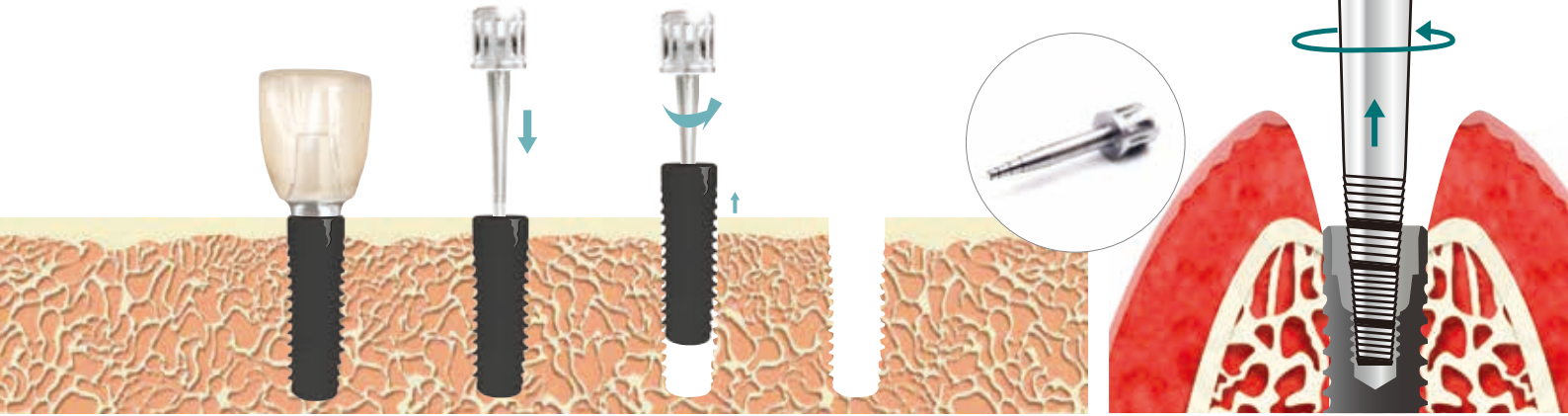


アバットメントスクリュー除去



インプラント除去




*ネジ山が破損した
アバットメントスクリュー除去

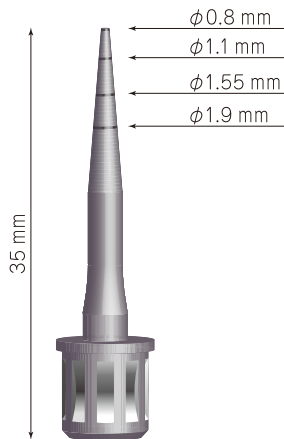

インプラント リムーバー：ロング

標準価格 **¥12,000** (税抜)

品番 eb000001

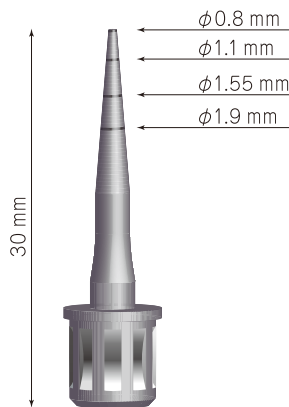

インプラント リムーバー：ショート

標準価格 **¥12,000** (税抜)

品番 eb000002



シンプル トルクレンチ

標準価格 **¥26,000** (税抜)

品番 eb000006

一般医療機器 特管非該当 医療機器届出番号 【インプラントリムーバー】 13B1X1008900837
【シンプルトルクレンチ】 13B1X1008900842

製造販売元

MICRO MTECH

株式会社 マイクロテック

<http://www.micro-t.jp>

〒111-0036 東京都台東区松が谷1-8-9 TEL: 03-5827-1380 FAX: 03-5827-1381 E-MAIL: info@micro-t.jp