

除菌率 **99.99%**

デントクリア®

**酵素
配合**

リテーナー洗浄剤

息さわやか!バラの香り

酵素でしっかり洗浄
リテーナーに付着したしつこい
汚れもしっかり取り除きます

強力除菌でせいけつ
いつも清潔にすることで義歯性
口内炎の予防につながります

ニオイを防ぐ
漂白剤成分がリテーナーの
ニオイを消臭します

**強力
除菌**



デントクリア リテーナー洗浄剤
バラの香り 48錠入



デントクリア リテーナー洗浄剤
バラの香り 12錠入

ご使用方法

- 150~200mlの水
またはお湯(40~
50℃)に本品を1錠
入れてください。
- ↓
すぐにリテーナーを
浸してください。
ふつうの汚れの洗浄は、
ぬるま湯で5分程度です。
- ↓
洗浄後は水でよく
すすいでください。

- 特にひどい汚れの場合は、一晩浸
しておくと効果的です。
- 毎日のご使用で、さらに効果が増
します。

※パッケージデザインが異なる場合があります。
※画像はイメージです。実際の使用シーンとは異なります。

品番	品名	商品サイズ(タテ×ヨコ×厚み)(mm)	商品重量	入数	JANコード	外箱ITFコード
K-7041	デントクリア リテーナー洗浄剤 バラの香り 48錠入	約 160×100×40	約 56g	6×10=60	4971902 070414	14971902 070411
K-7042	デントクリア リテーナー洗浄剤 バラの香り 12錠入	約 160×105×18	約 181g	10×20=200	4971902 070421	14971902 070428

製造販売元：紀陽除虫菊株式会社
和歌山県海南市下津町上1135
本社：073-492-0010
東京営業所：03-5205-1813
<http://www.kiyou-jochugiku.co.jp>

総販売元 **株式会社モモセ歯科商会**
本社・大阪営業所：〒543-8691 大阪市天王寺区南河堀町6-35
TEL:06-6773-3333(代)
東京営業所：〒110-0016 東京都台東区台東2-24-2
TEL:03-3835-2653(代)
九州営業所：〒816-0093 福岡市南区那珂6-24-21
TEL:092-575-6060(代)
URL:<http://www.momose-dm.co.jp/>

●製品に関するご用命は