

多用途に使用できる

複模型用透明シリコーン印象材

EZ-COPY クリアマトリックス

透明度 & 操作性
アップしました！！



充填用ガイドして活用したコンポジットレジン修復に




術前。
右上6咬合時の疼痛が主訴。
口蓋側咬頭に破折線を確認します。



破折片除去前に EZ - COPY クリアマトリックスを用いて充填用ガイドを作成します。



破折片を除去します。

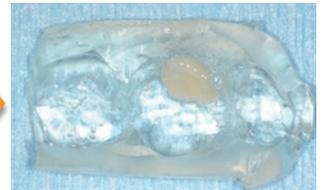

充填用ガイド内にフロアブルレジンを設置します。



窩洞に圧接して光照射します



口蓋側咬頭の再建を完了させます。



積層充填操作により咬合面形態を再構築します。



術後。

臨床写真ご提供：DRC.Hamamatsu 田代歯科医院 田代 浩史 先生

ダイレクトモックアップやプロビジョナルレストレーションの作製に



EZ - COPY クリアマトリックスで診断用ワックスアップ模型を印象採得します。



印象採得したEZ - COPY クリアマトリックスに、モックアップ用レジン「リビール」を注入します。



口腔内にセットし、「リビール」を光重合します。



強く審美的なモックアップが完成します！

顔貌写真ご提供：代官山アドレス歯科クリニック 大河 雅之 先生

複模型用透明シリコーン印象材

EZ-COPY クリアマトリックス



内容：
 ●EZ-COPY クリアマトリックス カートリッジ 48mL入 2個
 (ベース24mL、キャタリスト 24mL)
 ●ミキシングチップ 6個

- 透明度が高く、適度な流動性がある複模型用透明シリコーン印象材です。
- モックアップ用レジン「リピール」やコンポジットレジンをクリアマトリックス上から光重合することができます。

	口腔内	石膏模型上
操作時間	1分	2分
硬化時間	3分	4分

シヨアA硬さ	60±2°
寸法変化	<0.7%



EZ-COPY
 クリアマトリックスを
 併用した
 II級高洞修復の
 動画はコチラから



デモ写真・動画ご提供：
 日本大学歯学部保存学教室
 修復学講座 教授
 宮崎 真至 先生

歯科医院様参考価格 **¥5,500**

歯科複模型用ゴム質弾性印象材料、歯科咬合採用用材料 一般医療機器 医療機器届出番号：13B2X10359120002

関連製品

硬化時間わずか2分のシリコーン系模型材

EZ-COPY ファストンダイ



内容：
 ●EZ-COPY ファストンダイ カートリッジ 48mL入 2個
 (ベース24mL、キャタリスト 24mL)
 ●ミキシングチップ 6個

- わずか2分で模型が完成しますので、チェアサイドにて模型の作製ができ、間接法による修復物、マウスガード等の作製・即日セットが可能です。

操作時間	30秒	シヨアA硬さ	85±2°
硬化時間	2分	寸法変化	≤0.4%



EZ-COPY
 ファストンダイの
 動画はコチラから



臨床写真・動画ご提供：
 マイスター春日歯科
 クリニック
 遠山 敏成 先生

歯科医院様参考価格 **¥6,000**

歯科用樹脂系模型材 一般医療機器 医療機器届出番号 13B2X10359120003

製造業者：Amco, Inc. (アムコ インク) 製造国：大韓民国

本紙に掲載されている価格は2021年8月のものです。形態・仕様は予告なく変更することができます。

製品の特徴、ご使用方法などに関するお問い合わせは

お客様窓口フリーダイヤル

➡ TEL.0120-33-8020 FAX.0120-66-8020



株式会社 MORIMURA

〒110-0005 東京都台東区上野3-17-10

TEL 03-5808-9350 FAX 03-5808-9351

http://www.morimura-jpn.co.jp

●製品に関するご用命は