

歯科予防治療用ブラシ

インプラント清掃用 NiTi ブラシ


効果的なデブリドメントでインプラント周囲炎の再発を予防

インプラント清掃用 NiTi ブラシは、インプラント表層に付着した汚染物質の除去と研磨に加え、軟組織のデブリドメントを同時に行えるニッケルチタン製の回転式歯科用ブラシです。

インプラント本来の形状（スレッド）を残しつつ表面の汚染物質を除去することで、インプラント周囲炎の再発を予防します。

<術前>

<術後>

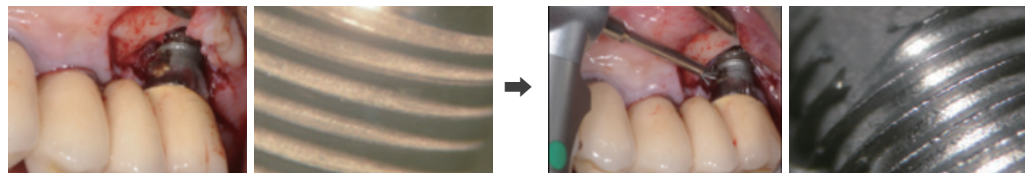

患者の症例にあった NiTi ブラシの選択

ナノ

ポケットショート

ポケット

オメガ



ナノ

スレッドが 1 ～ 2 個、露出した症例

ポケットショート

ポケットの深さが浅い症例など

ポケット

スレッドが 2 個以上、露出した症例

オメガ

ポケットがより広範囲に露出した症例





表面を研磨し、粗面を滑沢面に仕上げます

ニッケルチタン製の NiTi ブラシはインプラント表面のスレッド形状を維持したまま研磨することが可能です。

ニッケルチタンは適度な弾力性があり、複雑な構造のスレッド形状にもフィットし、NiTi ブラシのみで滑沢面に仕上げます。

清掃前の表面

清掃後の表面

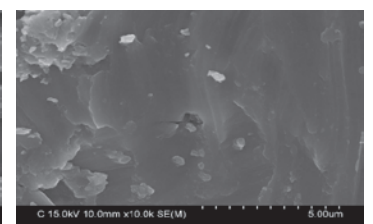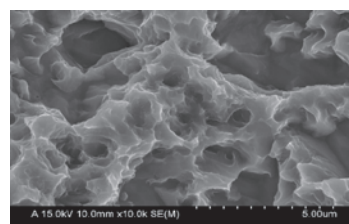

(SEM による 10,000 倍の拡大画像)

歯科予防治療用ブラシ インプラント清掃用 NiTi ブラシ

インプラント清掃用 NiTi ブラシ アソート 4 本入

歯科医院様参考価格 ¥9,900


ナノ	ポケットショート	ポケット	オメガ
			
スレッドが1～2 個露出した狭小部位や溝の細部清掃に (全長：約 34 mm)	浅いポケットやスペースが限られる部位の清掃に (全長：約 34 mm)	スレッドが 2 個以上露出したポケットや広範囲の清掃に (全長：約 37 mm)	ポケットがより広範囲に露出した症例の清掃に (全長：約 36 mm)
・1 本入 歯科医院様参考価格 ¥2,800	・1 本入 歯科医院様参考価格 ¥2,800	・1 本入 歯科医院様参考価格 ¥2,800	・1 本入 歯科医院様参考価格 ¥2,800

歯科用研削材料 一般医療機器 歯科予防治療用ブラシ 医療機器届出番号 13B1X10394290001

インプラント周囲炎に対する NiTi ブラシの使用例

1. インプラント周囲炎の確認と診断


歯周ポケットの深さの測定と、X 線で骨の状態を確認します。

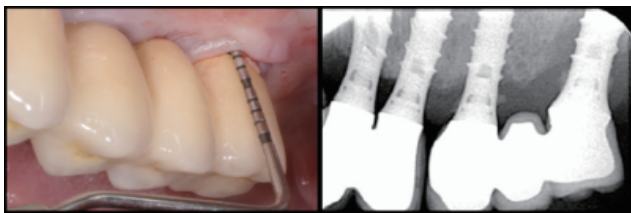

3. 使用前に NiTi ブラシを滅菌

滅菌ポーチを使用し、オートクレーブで滅菌しておきます。

(134℃で 15 分
乾燥 20 分)

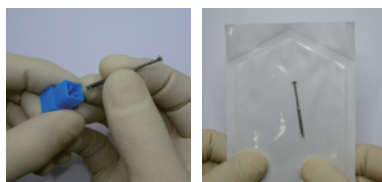

2. 症例にあった NiTi ブラシの選択

NiTi ブラシには、用途や清掃部位に応じて複数の形状が用意されています。
適宜選択してください。



4. NiTi ブラシで表面を研磨

インプラントモーターが減速コントラを使用し、注水下で粗い表面を滑沢面に仕上げます。

(推奨回転数：600 ～ 1,200rpm)



5. 必要に応じて GBR 法を行う



GBR 法を適用



歯周ポケットの再測定



X 線で骨の状態を確認

本紙に掲載されている価格は2025年6月のもの（税抜）です。形態・仕様は予告なく変更することがあります。