

即重用 BRUSH CLEANER FOR SELF-CURING RESIN ブラシクリーナー

筆・インスツルメントに固着した即重レジンを
素早く溶解・除去!!




用 途

筆に固着した
即重レジンの除去


鋳造物に付着した
研磨用ルージュの除去

ダウエルピンに付着した
瞬間接着剤の除去

使用前

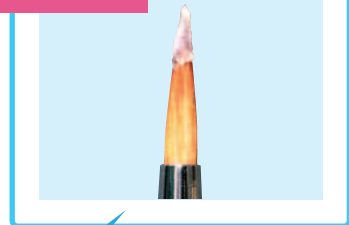

使用后

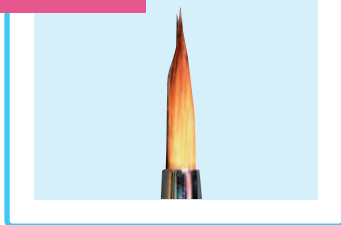

5分間ブラシクリーナーに浸漬後、ティッシュで軽く拭き取る。

◇ラバーカップやガラス瓶・ダッペングラス
に必要量取り出して浸漬させて下さい。

包装単位 100ml

標準価格 ¥2,300



YAMAHACHI DENTAL MFG. CO.

リファインブライト

歯科汎用アクリル系レジン
急速硬化性常温重合レジン/粉末・液材
Re-fine Bright

医療機器認証番号
220AFBZX00069000
管理医療機器

変色の少ない 即時重合レジン!!



1-1セット/粉末250g & 液材260ml



単品/粉末250g & 液材260ml

- 【特徴】
- 耐変色性の向上/従来問題になっていた黄変色を大幅に抑制しました。
 - 高強度レジン/大きささまざまな粒子で構成することにより、気泡の混入を大幅に低減、粒子間の結合力を強め諸物性の向上を図りました。
 - 良好な削割性/切削片はバーやポイントに絡みつかない削割が可能です。
 - 操作性の向上/粉と液の混和性が良いため、盛り上げ時の垂れが少なく、容易に築盛できます。

- 【用途】
- 筆積法、シェルクラウン法、シリコンコア法などによるテンポラリークラウン作製。
 - 破損義歯の修理、人工歯脱落の修理、義歯床辺縁部の追加修理、個歯トレーの作製。

【物性】

	変色試験 (37℃水中)	曲げ強度 (MPa)	ヌーブ硬さ (Hk)	※粉/液	硬化時間
リファインブライト	△E=0.12	78.6	13.6	0.5	3'30

△Eは色の変化の程度を表します。一般的には△E=1.2以上になると色の変化が容易に判断できます。

※粉液比による硬化時間の一例。(室温23℃)

尚、室温が高いと硬化時間は短くなり、室温が低いと硬化時間は長くなります。

色調	②ピンク	④LFピンク	⑤クリアー	⑥LFα
	⑨マーブルピンク	A2	A3	A3.5
※④、⑥は繊維入。⑧は④に比べ透明度を抑えた色調です。				
包装単位	●1-1セット 粉末250g・液材260ml・シリコンカップ・スポイト 筆(細・太)各1・粉液共用計量カップ 標準価格 ¥9,000			●単品(スポイト付) 粉末250g 標準価格 ¥5,600 液材260ml 標準価格 ¥3,400

リファインEX

急速硬化性常温重合レジン 歯科汎用アクリル系レジン
Re-Fine EX

医療機器認証番号
221AFBZX00060000
管理医療機器



- 直接、間接法のいずれにも使用でき、筆積、圧接のどちらにおいても容易に行えます。
- 重合後色むらが殆ど無く、又筆積法では盛り上げ時に垂れが少なく、思いのままの形態を得ることができます。
- 硬化後のレジンの表面は滑沢で、気泡の発生は殆どありません。そのため優れた物性が得られます。
- 硬化時間は23℃において約4分で適度な操作時間を有しています。

色調	アイボリー	ティーアイボリー	②ピンク	④LFピンク
※④は繊維入。				
項目	品名	試験方法	包装単位	標準価格
硬化時間(分) (23±1℃)	リファインEX	JIS T6509硬化 時間測定法による	粉末:100g	¥2,200
			500g	¥8,800
プリネル硬度 (HB) (MAX)	19.9	37℃恒温水中24時間後 荷重15.625kgf15秒	液材:100ml	¥1,800
曲げ強度 (Mpa) (MAX)	91	37℃恒温水中 24時間後測定	500ml (スポイト付)	¥7,000

※価格は予告なく変更する場合があります。

山八歯材最新情報はホームページで... ~健康は歯から~ (お問い合わせ・ご質問等もお待ちしております)

www.yamahachi-dental.co.jp/

●ご用命は...



製造販売元

山八歯材工業株式会社

〒443-0105 愛知県蒲郡市西浦町大知柄54-1

TEL<0533>57-7121 FAX<0533>57-1764

Home Page <http://www.yamahachi-dental.co.jp/>

E-mail box@yamahachi-dental.co.jp