


歯科汎用アクリル系レジン

PROVIFINE

プロビファイン

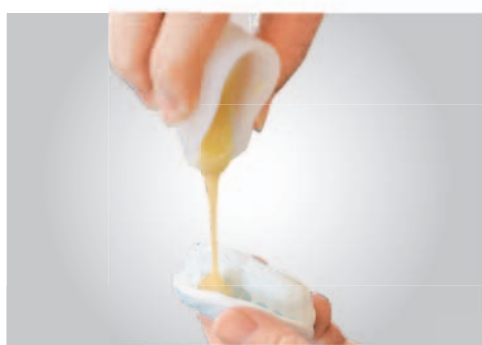

流し込み時の
高い流動性



筆積み時の
垂れ難く、高い築盛性

と

を兼ね備えた常温重合レジン!!

良好な操作性・審美性・耐久性を有し、
プロビジョナルレストレーションにも適しております。



YAMAHACHI DENTAL MFG., CO.

操作性

流し込み時の高い流動性



高い流動性を有し、シリコンコアの細部までレジン进行し込むことが可能です。

筆積み時における、垂れ難く高い築盛性



垂れずに付形し易く思い通りの形態付与ができます。

流動性を持たせ
レジンを馴染ませたい場合




筆先に粉液を付けたあと、
通常より早く築盛します。

使用する液材により、操作時間を選択可能

液材は硬化時間の異なるノーマルタイプ・ファーストタイプの2種類を用意。
お好みの操作時間を選択することができます。※粉末はノーマルタイプ・ファーストタイプ共用です。

ノーマルタイプ……流し込み法や筆積み法で、ゆとりを持った作業をしたい場合に適しています。


ファーストタイプ……ワーキングタイムを短縮したい場合に適しています。

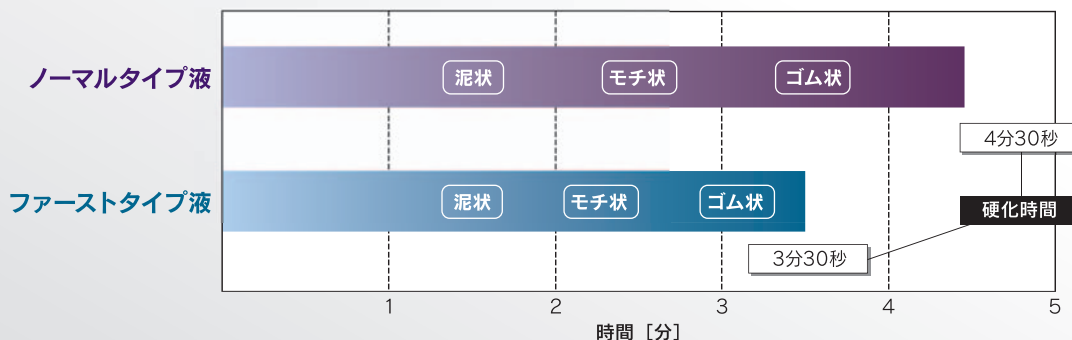


審美性

A3色を用いた補修例

補修前

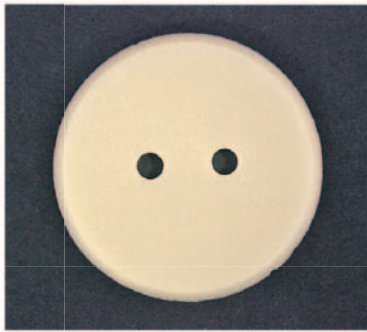

補修後

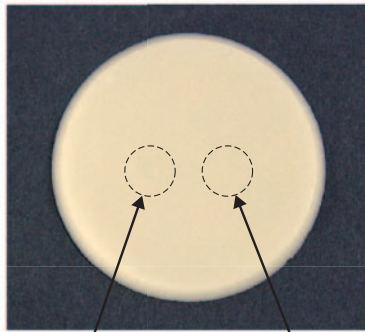

- 流し込み・筆積みの使用法による色差が少なく、安定した色調を再現できます。
- 筆積み法での色むらを低減しました。

流し込み法による
補修


筆積み法による
補修

④LFピンク色を用いた補修例

修正前



修正後

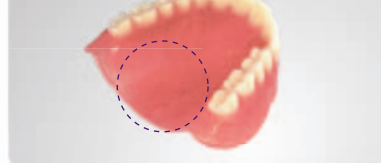


弊社床用レジン「ベイス」の色調がよくマッチし、補修箇所が目立ちません。

研磨性



重合度が高く残留モノマーが少ない為しっかりと硬化しており、研磨・艶出しが容易です。

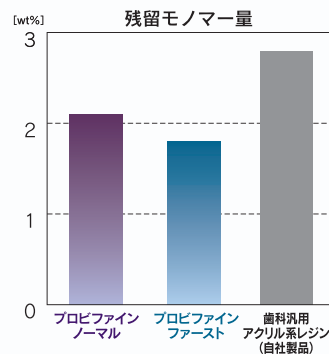

耐変色性

37℃水中1ヶ月浸漬試験


(浸漬前)

(浸漬後)



色味の経時変化が少なく、良好な色調安定性を有します。

適合性

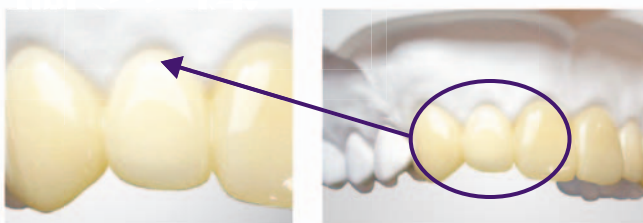

硬化後の変形が少なく、良好な適合性を有しています。

物性表

	ビッカース硬度 [Hv]	曲げ強度 [MPa]
プロビファイン ノーマル	14.8	82
プロビファイン ファースト	15.1	89
歯科汎用 アクリル系レジン (自社製品)	11.4	75

プロビファイン

暫間補綴物(インレー、クラウン、ブリッジ)
義歯床の修理等。



液 ノーマルタイプ


液 ファーストタイプ

包装単位	粉末			
	50g	計量カップ	コリンスキー筆 No.1付	標準価格 ¥2,600
	250g	計量カップ	コリンスキー筆 No.1付	標準価格 ¥5,600
	液(ノーマルタイプ・ファーストタイプ)			
	100ml	スポイト	ワンタッチキャップ付	標準価格 ¥2,600
	260ml	スポイト	ワンタッチキャップ付	標準価格 ¥3,400
	※粉末はノーマルタイプ・ファーストタイプ共用です。			

色 調	A1	A2	A3
	④LFピンク	⑤クリアー	⑥LFα
	※④、⑥は繊維入。⑥は④に比べ透明度を抑えた色調です。		

関連商品

コリンスキー筆 No.1(プロビファイン付属品)

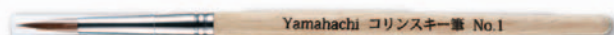

標準価格 ¥450

シリコンカップ



標準価格 ¥300

歯科用研磨器材

MPパウダー



専用バフ(MPバフ)との併用によりバリ取り修正後艶出し手前までMPパウダーだけで研磨可能。

- ほこりがでない
- 歯頸部に研磨剤が残らない
- 硬質レジン・パラジウムの合金の研磨も可能

一般医療機器 医療機器届出番号:23B1X10001C09006

包装単位	1kg/袋	標準価格 ¥3,000
	1kg×3/箱	標準価格 ¥8,500
	7kg/缶	標準価格 ¥17,000

歯科用研磨器材 技工用研磨材、中研磨・艶出し

タイガーマルチ



- 酸化アルミニウム超微細粉末によって切削力(キズ取り)、艶出し力が大幅にアップ。
- 研磨材の特殊加工により補綴物への油膜の付着が少なく洗浄が楽です。
- 金属からレジンまで多用途型 150×45×40(mm)

一般医療機器 医療機器届出番号:23B1X10001C09011

包装単位	400g	標準価格 ¥2,300
------	------	-------------

歯科用研磨器材 歯科技工用艶出しペースト研磨材

ブルーシャイン



- 一般硬質レジン・メタル・アクリルレジン専用艶出し研磨材です。
- テック等が焼き付きにくく、研磨作業が容易に行えます。
- 研磨力に優れているため、光沢が一段と出やすく研磨作業が容易に行えます。

- 無臭なため研磨作業が快適に行えます。
- 清掃性が良いため、作業時間を短縮できます。

一般医療機器 医療機器届出番号:23B1X10001C09009

包装単位	50g	300g
	標準価格 ¥700	¥3,800

ワンポイント ●艶出し前段階の中研磨を充分行ってください。
●研磨材を付けすぎますと、研磨効果が低下します。

※標準価格は予告なく変更する場合がございます。

●ご用命は...



製造販売元
山八歯材工業株式会社
〒443-0105 愛知県蒲郡市西浦町大知柄54-1
TEL(0533)57-7121 FAX(0533)57-1764
Home Page <http://www.yamahachi-dental.co.jp/>
E-mail box@yamahachi-dental.co.jp