

FM スーパースレッド

使用方法 結紮して使用します。

特徴 断面が正方形のため縛りやすくほつれにくい。
また結び目がほどけにくい。
4週間経っても減衰しにくく当初の
60～70%程度の牽引力を発揮します。



T-045, T-065		標準価格	¥1,500
サイズ	5M巻		
0.45×0.45mm	T-045		635059
0.65×0.65mm	T-065		635058

医療機器認証番号 20500BZZ001136000 管理

新発売



T-085M		標準価格	¥1,800
サイズ	5M巻		
0.85×0.85mm	T-085M		635057

医療機器認証番号 20500BZZ001136000 管理

085x085スーパースレッドの利点



スペースクロージングの後半に力を発揮します。
特にリングルでのスペースクローズの後半に有効です。



舌側矯正における、スライディングシステムでのわずかなスペースクローズにはかなりの時間を費やすことが多い。これは、舌の問題、咬合の問題が原因と考えられる。スペースクローズには、あまり強い力をかけるとボーイング・エフェクトがでることから、弱い力でのクローズが推奨されるが、その力では、クローズの後半において、歯の動きが極端に悪くなることを数多く経験する。クローズするスペースが小さくなった場合、ボーイング・エフェクトがでにくくなることから、その時にある程度強い力を用いたクロージングが非常に効果的である。

ロッキーのスーパースレッドは熱硬化性であり、口腔内の温度環境下でも耐久性が強いので使用している。また、断面が正方形で、パワースレッド（パワーチューブに比較して）で結び目がほどけにくい。現在は065×065が一番大きいサイズだったが、上記の理由で085×085は臨床上非常に有益と考えられる。

赤坂まつ矯正歯科 松野功先生

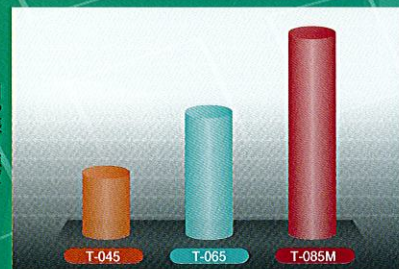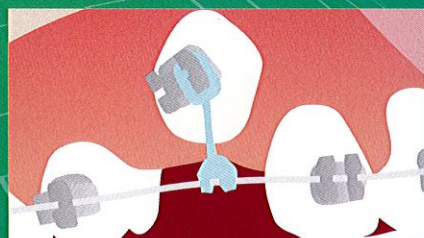

太さの種類

有限会社 マルヤマ歯科商店

【発売元】  株式会社 **ロッキーマウンテンモリタ**

東京都千代田区神田駿河台2-2 御茶ノ水雲雪ビル14F
TEL. 03-5281-4711 FAX. 03-5281-4716
<http://www.rmnc.co.jp>

【製造販売元】 **ポリマー技研**

〒079-0181 北海道岩見沢市岡山町129-18