

# YDM '10/10/21 New Product

2010年10月21日新製品カタログ

## 外科・インプラント治療の必需品!

[外科ピンセット マッカンドー] [鋭匙 ホルクマン] [開創鉤 ランゲンベック]

## マイクロ治療に最適なピンセットとミラー!

[マイクロピンセット アトソン] [ミラートップ フロントサーフェイス]

## 矯正用ブラケットのディボンディング!

[矯正フライヤー フラケットリムーバー]

## 顎関節症患者さんの開口訓練!

[開口訓練器]

## 口腔内撮影用の口角鉤にソフトタイプが追加!

[口角鉤 フルワイダー ソフト]

### 外科ピンセット マッカンドー

- ◆ 外科処置に必需品となるマッカンドー鉗子をラインナップに追加しました。
- ◆ 保持・支える・排除といった様々な場面で使いやすいオーソドックスな形状。



有鉤

コード No.101051  
標準価格 ¥5,700

サイズ / 155mm




無鉤

コード No.101052  
標準価格 ¥5,200



## ピンセット マイクロアドソン

- ◆ アドソン型のロングタイプを追加。通常のアドソンピンセットより全長が 30mm 長く臼歯部にも届きやすい規格です。
- ◆ 先端は細くて精巧に作られており、顕微鏡を使った治療に向いています。

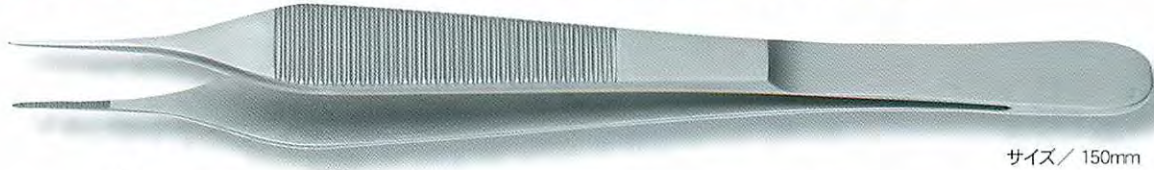

サイズ / 150mm



### 有鉤 L 直

コード No.101062  
標準価格 ¥6,000  
先端幅 0.8mm



### 無鉤 L 直

コード No.101064  
標準価格 ¥5,500  
先端幅 0.8mm



### 有鉤 L 曲

コード No.101063  
標準価格 ¥7,200  
先端幅 0.8mm



### 無鉤 L 曲

コード No.101065  
標準価格 ¥6,600  
先端幅 0.8mm

医療機器届出番号 11B1X1000636D007  
一般的名称 ピンセット

## 鋭匙 ホルクマン

コード No.101061  
標準価格 各 ¥8,800

- ◆ より力を加えやすくするため、エレベーターと同形状のハンドルの鋭匙をラインナップに追加しました。
- ◆ 根面や骨面に強固に付着した嚢胞や不良肉芽の搔爬に適しています。



医療機器届出番号 11B1X1000662D002  
一般的名称 歯科用キュレット






Others


## 口腔内撮影ミラー ※ステンレス製

標準価格 各¥14,300  
(滅菌用布袋付)


3枚組(咬合面用・舌側用・頬側用 各1枚)  
コードNo.101986  
標準価格 ¥42,900 (滅菌用布袋付)

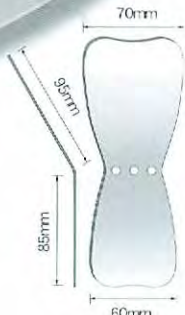


咬合面用 ワイド L  
コードNo.101990

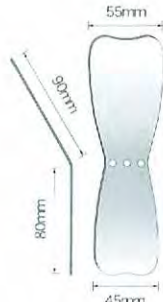


咬合面用 ワイド S  
コードNo.101976

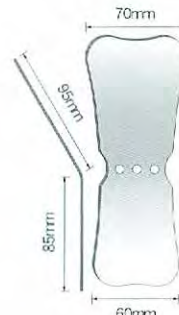


咬合面用  
コードNo.101987

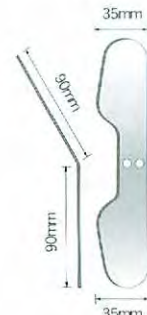

舌側用  
コードNo.101988

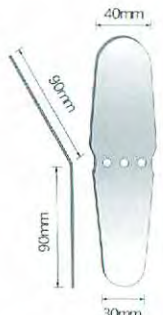

頬側用  
コードNo.101989

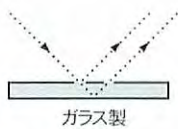

● 像がダブリません。



- 中間部が屈曲しているの、持っている手が写り込みません。
- ステンレス製なので、破損の心配がありません。
- 日本人の歯列弓に合った形状です。

医療機器届出番号 11B1X1000625D004  
一般的名称 歯鏡

## コントラスター

標準価格 各¥3,600

- 被写体の背景を黒くすることにより、歯牙の形態や色調がハッキリと確認できます。

セット(前歯用L・臼歯用)  
コードNo.101024  
標準価格 ¥7,200



コントラスター使用時






通常撮影時



前歯用 L  
コードNo.101025

前歯用 S  
コードNo.101021

臼歯用  
コードNo.101026

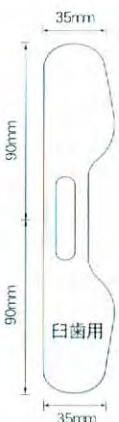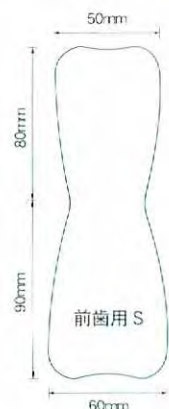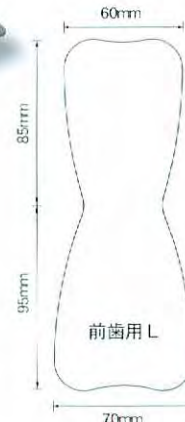

医療機器届出番号 11B1X1000625D005  
一般的名称 歯鏡




# 口角鉤


- 口角・口唇をバランス良く圧排し、舌固定もできます。
- 審美指導・ブリーチング時・矯正治療のブラケット装着時等にも有効です。

ダブルワイダー

コードNo.151393 標準価格 各¥4,400 (2入)

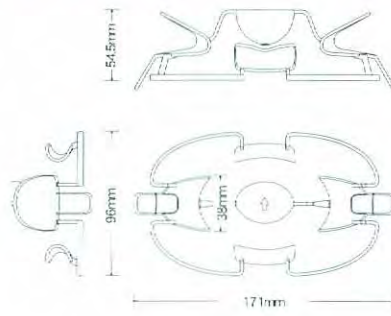

L サイズ / W171 × D96 × H54.5

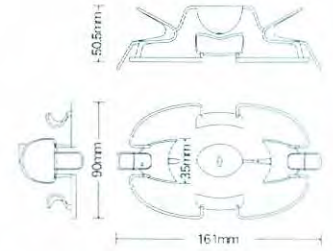

S サイズ / W161 × D90 × H50.5



※舌固定部は、切断して使用することもできます。



① 舌固定部の矢印を上向きにし、ハンドル部をひねり、左右の口角に装着します。



② 上下の口唇に装着します。



医療機器届出番号 11B1X1000650D205  
一般的名称 歯科用開口器

※材質 / PP 耐熱温度 120℃  
※乾熱滅菌・紫外線殺菌は、お避け下さい。

フルワイダー

標準価格 各¥9,000(2入)

2010.10.21発売!




コードNo.151395



ソフト(ブルー)  
コードNo.151397

● よりしなりがあるソフトタイプ。

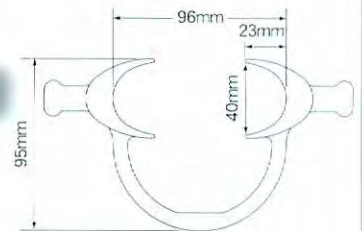


医療機器届出番号 11B1X1000650D204  
一般的名称 歯科用開口器

※材質 / TPX 耐熱温度 160℃  
※乾熱滅菌・紫外線殺菌は、お避け下さい。

ピジョン

コードNo.101915

標準価格 各¥5,300

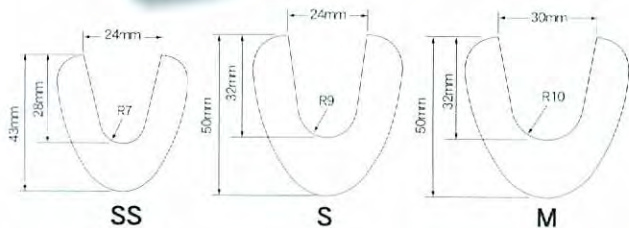

※材質 / TPX 耐熱温度 160℃  
※乾熱滅菌・紫外線殺菌は、お避け下さい。

医療機器届出番号 11B1X1000650D204  
一般的名称 歯科用開口器

A・B


コードNo.101911

標準価格 各¥2,800(2入)

C

コードNo.101917

標準価格 ¥2,200(2入)

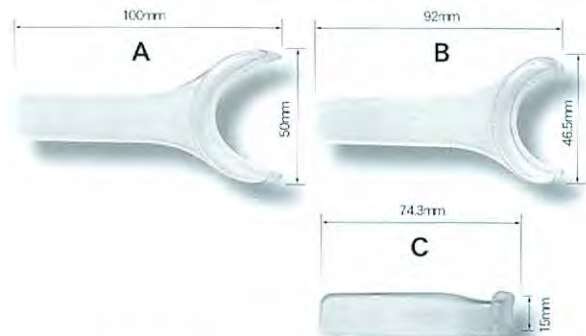

※材質 / TPX 耐熱温度 160℃  
※乾熱滅菌・紫外線殺菌は、お避け下さい。

医療機器届出番号 11B1X1000650D204  
一般的名称 歯科用開口器

※汚染度が高い場合は、グルタール製剤での消毒をおすすめいたします。 ※掲載されているコードNo.は、発売元(株)モリタのコードNo.です。  
※掲載製品の標準価格は、2010年10月21日現在のものです。 ※標準価格に消費税は含まれておりません。  
※製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。

資源保護のため、リサイクルしやすい大豆インクを使用しています。



製造販売元 **株式会社YDM**

〒355-0042 埼玉県東松山市今泉28 医療機器許可番号 11B1X10006

問合先 本社 営業部 〒114-0014 東京都北区田端6-5-20 TEL03-3828-3161 FAX03-3827-8991  
http://www.ydm.co.jp/ E-mail ydm@ydm.co.jp

発売 **株式会社モリタ**


大阪 〒564-8650 吹田市垂水町3丁目33番18号 TEL06-6380-2525  
東京 〒110-8513 台東区上野2丁目11番15号 TEL03-3834-6161  
http://www.dental-plaza.com/



## 開創鉤 ランゲンベック

コード No.101058  
標準価格 各 ¥6,600

- ◆ 扁平で長い鉤のため、組織を大きく圧排でき、外科・インプラントオペ時等の**視野拡大**に有効です。
- ◆ アシスタントが保持しても邪魔にならないよう**ハンドルから鉤までが長く**できており、スムーズなオペが行えます。

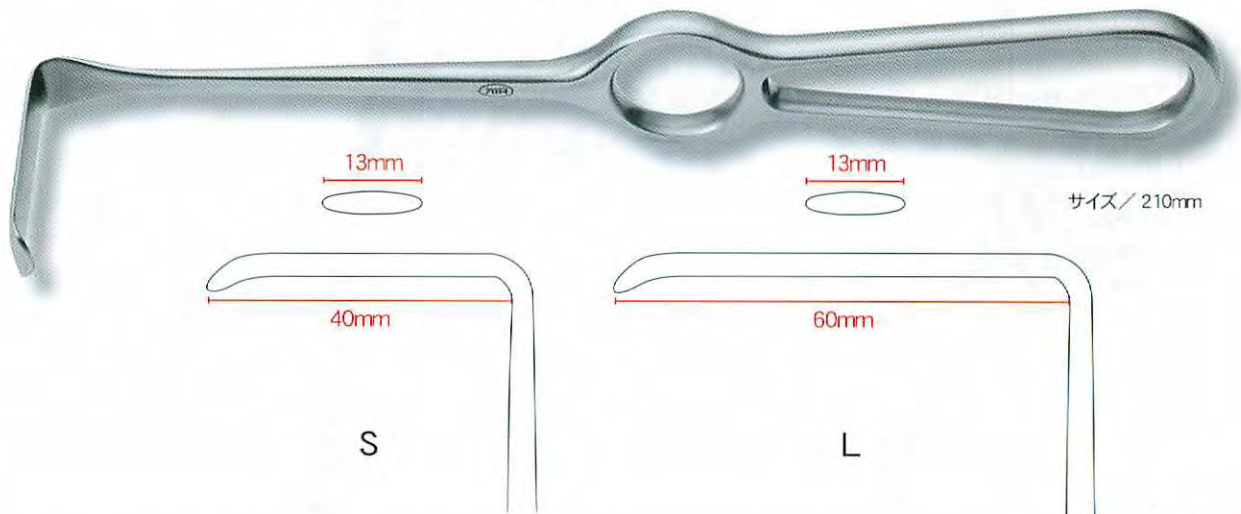

サイズ / 210mm

医療機器届出番号 11B1X1000638M101  
一般的名称 鉤

## ミラートップ フロントサーフェイス(ダイレクト)

コード No.101655  
標準価格 各 ¥7,920(12入)

※チタンコーティング(鏡面)




3P

φ 20.5



4P

φ 22.5

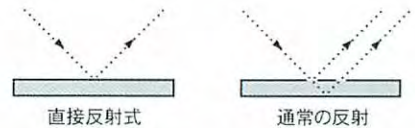

直接反射式

通常の反射

- ◆ ガラス表面で反射する、**直接反射式**ミラー。像の“ダブリ”がありません。
- ◆ 以前より反射率を高めたため(95%→**98%**)、より鮮明に明るく映ります。

※耐熱温度 200℃

医療機器届出番号 11B1X1000625D007  
一般的名称 歯鏡

## 矯正プライヤー ブラケットリムーバー ND-306

コード No.101048  
標準価格 ¥18,700

- ◆ 良く使うピンカッターと同形状にすることにより、使いやすくなりました。
- ◆ 先端がハンドルと同一線上に設計し、より力を加えやすくなりました。



医療機器届出番号 11B1X1000639D102  
一般的名称 歯科矯正用プライヤ



## 開口訓練器

コードNo.101044  
標準価格 ¥1,980

○リング（輪ゴム）

YDM マーク

把持部

口腔内挿入部


反対側に掛けた○リングの力で、自然に開く仕組み。



①口腔内挿入部（YDM マークがない  
少しくぼみがある側）を手で閉じ、  
口の中へ挿入します。



②挿入部のくぼみが、犬歯付近になる  
ように位置を調整します。

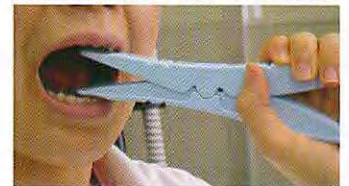

③位置を合せた犬歯と同側の手で把  
持部をもち握ります。ゴムの力で口  
腔内挿入部側が自然に開きます。

ご協力：東京医科歯科大学顎関節咬合学分野（顎関節治療部）


※本体／材質 ABS 耐熱温度 80℃  
※○リング／材質 Si 耐熱温度 200℃

医療機器届出番号 11B1X1000650D206  
一般的名称 歯科用開口器

## 口角鉤 フルワイダー ソフト(ブルー)

コードNo.151397  
標準価格 ¥9,000(2入)

- ◆ 通常のフルワイダーよりしなりがある**ソフトタイプ**をラインナップに追加しました。
- ◆ 装着する際や装着後の**不快感が少ない**です。

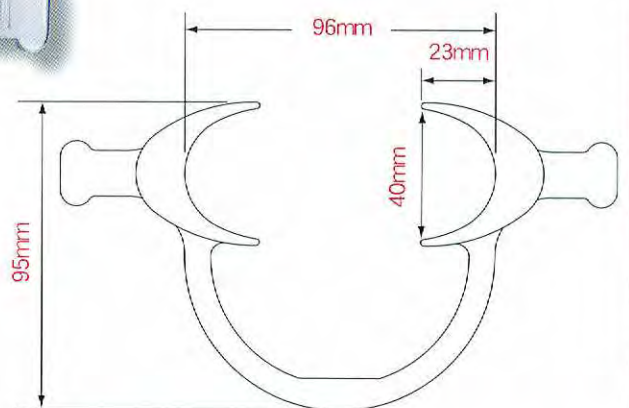

※材質 TPX 耐熱温度 160℃

医療機器届出番号 11B1X1000650D204  
一般的名称 歯科用開口器

※汚染度が高い場合は、グルタラルール製剤での消毒をおすすめいたします。※掲載されているコードNo.は、発売元(株)モリタのコードNo.です。  
※製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。※標準価格に消費税は含まれておりません。  
※掲載製品の標準価格は、2010年10月21日現在のものです。

資源保護のため、リサイクルしやすい  
大豆インクを使用しています。



歯科商店名

製造販売元 **株式会社YDM**

〒355-0042 埼玉県東松山市今泉28 医療機器許可番号 11B1X10006

問 合 先 本社 営業部 〒114-0014 東京都北区田端6-5-20 TEL03-3828-3161 FAX03-3827-8991  
http://www.ydm.co.jp/ E-mail ydm@ydm.co.jp

発 売 **株式会社モリタ**

大阪 〒564-8650 吹田市垂水町3丁目33番18号 TEL06-6380-2525

東京 〒110-8513 台東区上野2丁目11番15号 TEL03-3834-6161

http://www.dental-plaza.com/