

剥離子オーダーシステム



● 手法に合わせて、セレクト自在

「ハンドル」と「先端部」を自由に組み合わせて、オリジナル剥離子がオーダーできます。
スムーズな治療と、インスツルメントに要するコストやスペースの削減にも貢献します。

1

ハンドル×3種類、先端部×31種類の
豊富なラインナップ

2

手法に合わせて手組み合わせることで
スムーズな治療が可能

3

インスツルメントの本数を減らせるので、
コスト削減に貢献

パターン1 保坂 均先生 ご考案 日本歯周病学会 指導医・専門医

- 頸部に4方向の角度が付与されたブレードが鋭利な骨膜剥離子です。
上下・左右を組合せた2本であらゆる部位に対応でき、歯周外科に適しています。



HE1 + 丸柄 + HE2

HE3 + 丸柄 + HE4

[HE1]



● 口蓋側を剥離します。

[HE2]



● 唇側を剥離します。

剥離子オーダーシステム HE1+HE2 / HE3+HE4
臨床動画



URL : <https://youtu.be/QhMfo2BnVpw>

上記 QR コードをスマートフォンや
タブレット端末のバーコードリー
ダーで読み取ってください。

パターン2 山本松男先生 昭和大学歯学部 歯周病学講座 教授

- スプーン状の先端部には周囲300°に鋭いブレードが付いています。
- 極小サイズのため、狭い歯間部等でも歯周組織に与えるダメージを最小限に抑えて剥離できます。
- 鋭匙として狭い部分での不良肉芽の除去にも有効です。



HC6 + 角柄 細 + HC7

HC8 + 角柄 細 + HC9

2.0mm

1.3mm

[HC6]



- 歯間が2mm程度の狭い場合に、極小サイズ先端部が有効。
歯肉弁の直下にある骨膜（結合組織）を剥離することができ、
狭い（血流の乏しい）歯肉組織へのダメージを減少させます。

[HC8]



- 極小スプーン状の先端部は鋭匙としても有効。
クレーター状骨欠損部等でも骨を削除すること
なく、不良肉芽のみを掻き出すことができます。

ハンドル



角柄 細
コード No.15003
標準価格 9,700円

※長さ／110mm
※径／φ6.5mm



丸柄
コード No.15008
標準価格 10,800円

※長さ／110mm
※径／φ9.5mm



丸柄 Short
コード No.15009
標準価格 10,300円

※長さ／80mm
※径／φ9.5mm

ご注文方法



HC3

丸柄

HB2


[組合わせ例]

ハンドル：丸柄
先端部：HC3、HB2 をご指定の場合

コード No.15008 「剥離子 オーダーシステム 丸柄 + HC3 + HB2 」

医療機器届出番号 1181X1000642D033
一般的名称 歯科用起子及び剥離子 販売名 剥離子オーダーシステム

[粘膜（広範囲）]

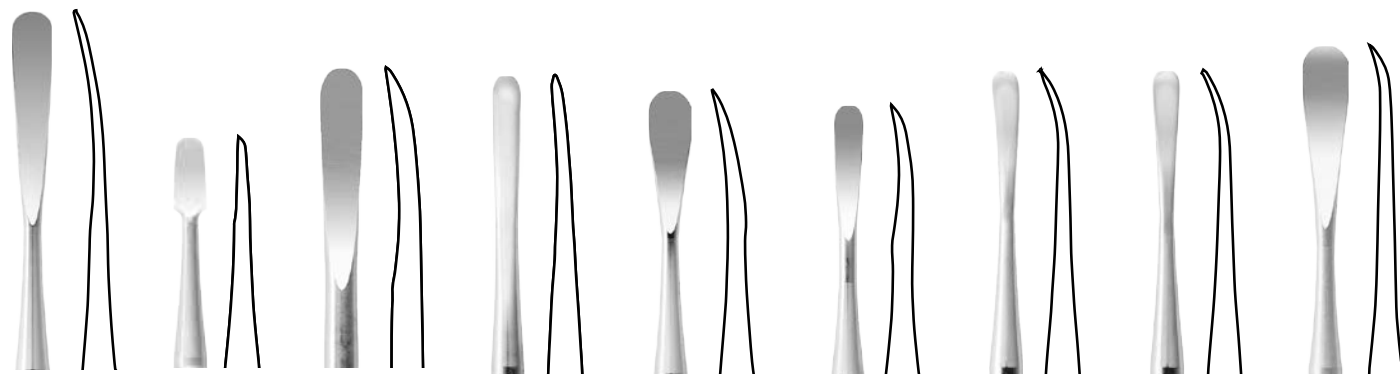

HA1

HA2

HA3

HA4

HA5

HA6

HA7

HA8

HA9

刃付

刃付


刃付

刃付

刃付

パターン 3

[粘膜（狭範囲）]

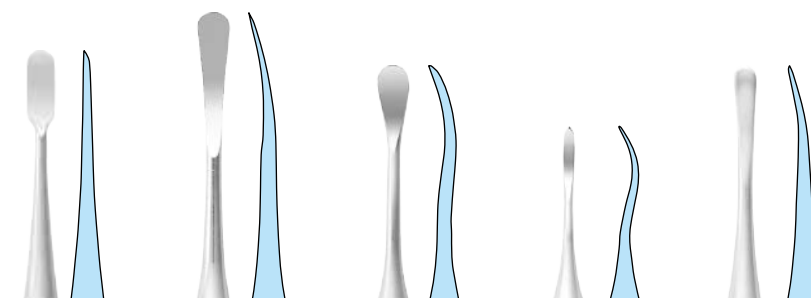

HB1

HB2

HB3

HB4

HB5

刃付

刃付

刃付

刃付

刃付


パターン 5

パターン 6

パターン 3

パターン 3

[歯間乳頭]

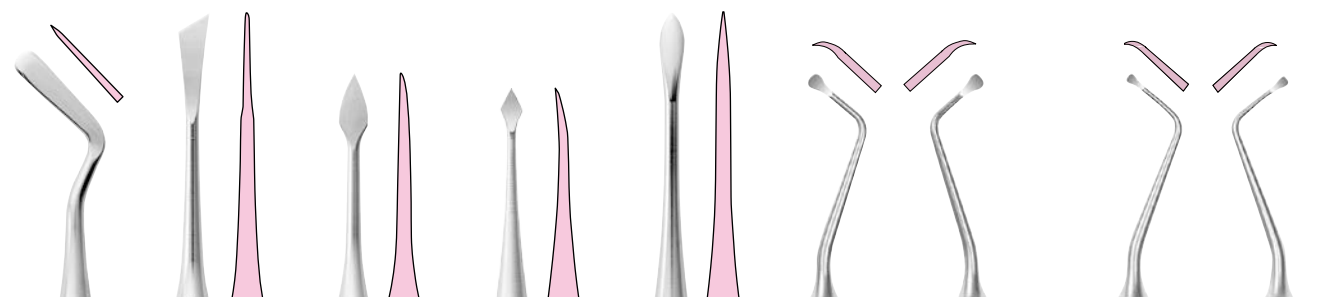

HC1

HC2

HC3

HC4

HC5

HC6

HC7

HC8

HC9

刃付

刃付

刃付

刃付

刃付

刃付

刃付

刃付

パターン 5

パターン 3
パターン 6


パターン 2

パターン 2

パターン 2

パターン 2

[歯肉排除]

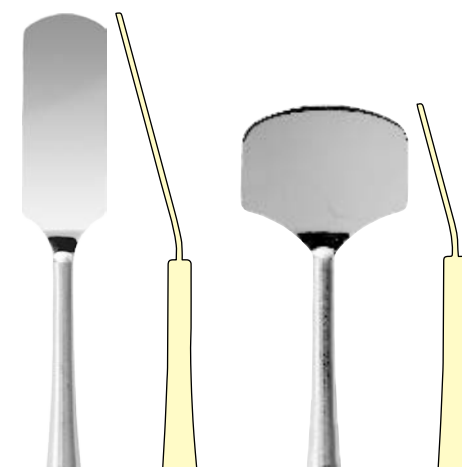

HD1

HD2


鏡面

鏡面

パターン 4

パターン 4

[骨膜]

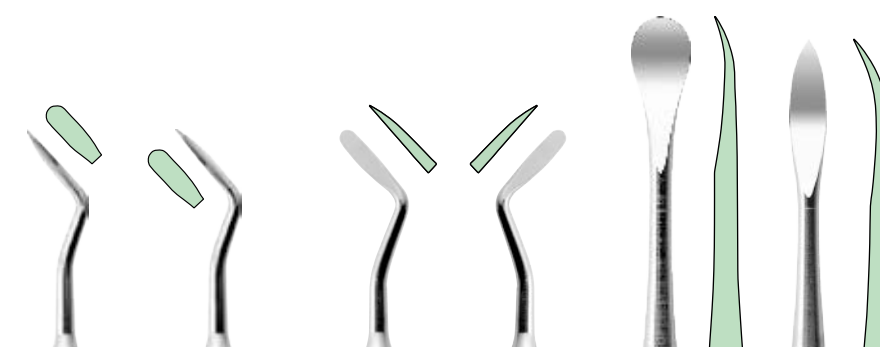

HE1

HE2

HE3

HE4

HE5

HE6

刃付

刃付

刃付

刃付

刃付

刃付

※背面が平ら

パターン 1

※内面が平ら

パターン 1

パターン 1

パターン 1

パターン 3

上田秀朗先生 上田塾主宰



HB4 + 丸柄 + HC4




HA2 + 丸柄 + HB5

パターン 4

青井良太先生 ご考案 SBC (Surgical Basic Course) 主幹

- 歯肉排除用の組み合わせ。1本で大小揃い、術部の広さに合わせてスムーズに対応でき便利です。
- 術部確認のミラー機能も併用できます。

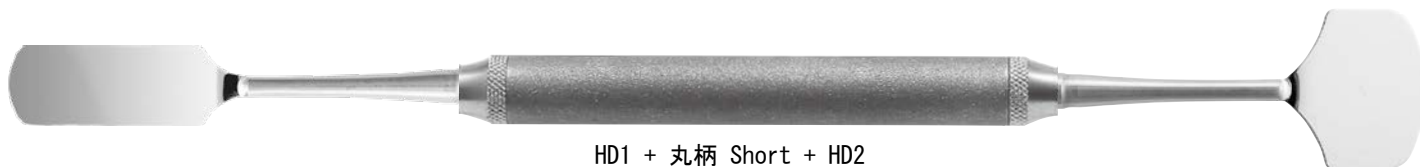

HD1 + 丸柄 Short + HD2

[HD2]



- 広範囲の歯肉を排除できます。

パターン 5

石井 宏先生 ペンシルバニア大学 非常勤講師 神奈川歯科大学 非常勤講師



HB2 + 丸柄 + HC2

パターン 6

多保 学先生 たば歯科医院 理事長 日本歯科大学附属病院 臨床准教授



HB3 + 丸柄 + HC4

※製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。

※掲載製品の標準価格は、2021年1月21日現在のものです。 ※標準価格に消費税は含まれておりません。

製造販売元

株式会社YDM

〒355-0042 埼玉県東松山市今泉28 医療機器許可番号 11B 1 X 1 000 6

問 合 先 デンタル事業部 〒114-0014 東京都北区田端6-5-20 TEL03-3828-3161 FAX03-3827-8991
http://www.ydm.co.jp/ E-mail ydm@ydm.co.jp

発売

株式会社モリタ

大阪 〒564-8650 吹田市垂水町3丁目33番18号 TEL06-6380-2525
東京 〒110-8513 台東区上野2丁目11番15号 TEL03-3834-6161
http://www.dental-plaza.com/