

# 注油をすると除菌ができる


## メンテナンスオイルスプレー

### オゾンで除菌

ハンドピースの中に入  
った細菌・ウイルスが  
気になります。

注油する時、排出される  
オイルによるスタッフの  
感染を防げます。

感染予防で注油する  
とハンドピースが  
長持ちします。

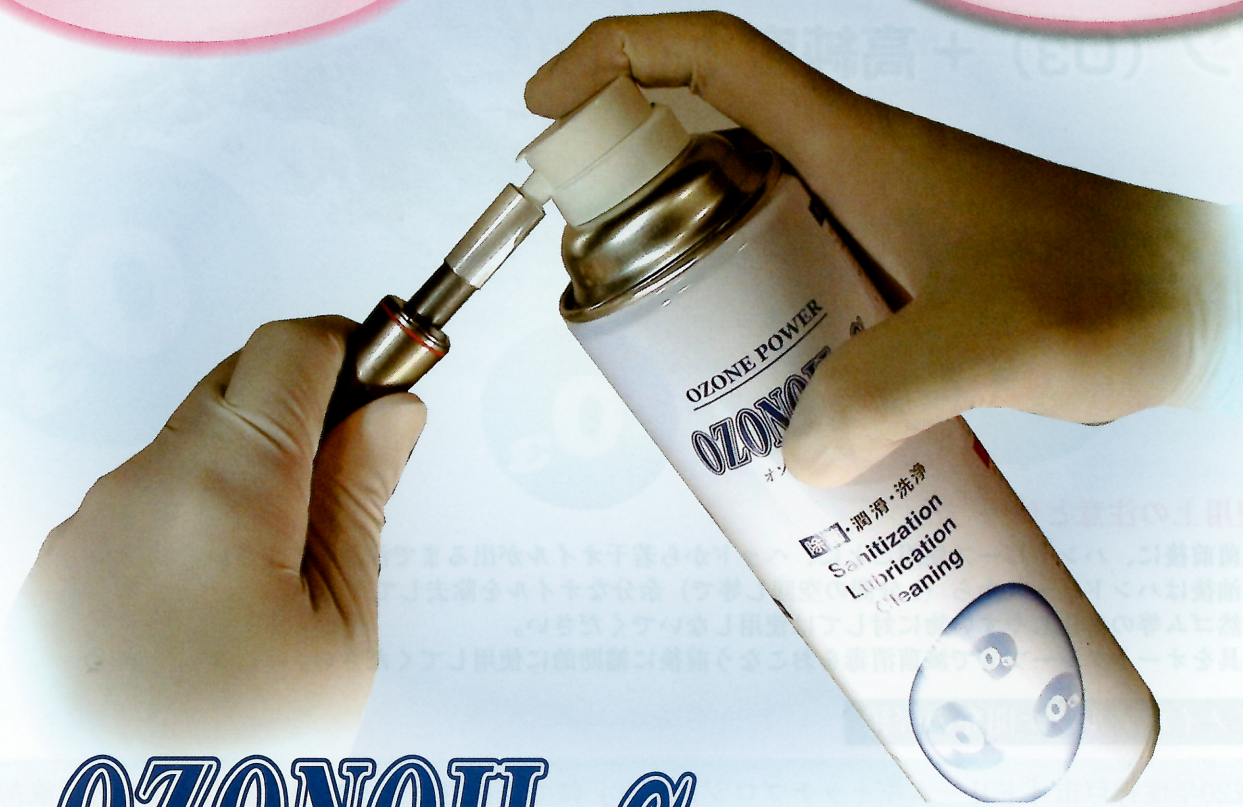

# OZONOIL-α

オゾノイル アルファ 480ml

### オゾノイルアルファは

兵庫県神戸市の(財)先端医療振興財団クラスター推進センターの  
技術支援を受け、開発に成功したメンテナンスオイルです。

## オゾノイルアルファの特長

- 1. 除菌** オゾン (O<sub>3</sub>) が溶解した高純度オイルで、精密機器の内部の除菌を行います。
- 2. 潤滑** タービン、コントラ等の回転軸の周囲に内蔵されているボールベアリングに、十分な潤滑性でハンドピースの寿命をのばします。  
各メーカーのハンドピースにご使用いただけます。(各社ハンドピース内の部品に対する経時変化テスト実証済です)
- 3. 安全性** 人体に安全・安心です。(口腔粘膜刺激性試験・経口毒性試験を(財)日本食品分析センターにより安全を立証)
- 4. さらさらオイル** ハンドピースヘッドのオイル抜けが容易になりました。(当社比)
- 5. 特許取得** 業界初オゾン溶解オイルを使用したスプレー。

# 除菌ができるメンテナンスオイルの新時代!

## オゾン (O<sub>3</sub>) + 高純度オイル

### ※使用上の注意と使用方法

- ・滅菌前後に、ハンドピース使用ごとに、ヘッドから若干オイルが出るまで注油して下さい。
- ・注油後はハンドピースから(1分間の空回し等で)余分なオイルを除去して下さい。
- ・天然ゴム等の劣化しやすい物に対しては使用しないでください。
- ・器具をオートクレーブ等で滅菌消毒をおこなう前後に補助的に使用してください。

### オゾノイルアルファ開発の経緯

平成20年度神戸市「ドリームキャッチプロジェクト」にて採択された「医療機器用滅菌処理用液剤」が、(財)先端医療振興財団クラスター推進センターの事業化支援を受け、特許取得後(平成23年12月)歯科ハンドピース用としては、業界初となる“除菌ができるメンテナンスオイルスプレー”として開発に成功し、事業化されました。さらに、平成26年2月には(公財)新技術開発財団による助成企業に選定され、より多目的な分野への研究を進めております。

### 発売元 株式会社 E テック

医療機器開発研究所

〒650-0045 兵庫県神戸市中央区港島9丁目1番地  
神戸医療産業都市内KIO 316号室  
TEL 078-335-5425 FAX 078-335-5426

本社 〒654-0151 神戸市須磨区北落合3-28-2

<http://www.e-teck.co.jp>

お問い合わせ先: