

入れ歯洗浄剤 入れ歯爽快 ステインクリーン

**強力な洗浄力で、入れ歯の着色汚れを除去！
いつまでもキレイな入れ歯で、すっきりさわやか！**

ステインクリーンの効果

入れ歯の汚れは、着色・雑菌・歯石に分けられ、入れ歯の内部まで入り込んでしまったものは水洗いだけでは落ちず、汚れや臭いの原因になります。

「入れ歯爽快ステインクリーン」は、強力な洗浄力で入れ歯の着色汚れを除去し、漂白効果でいやな臭いを消臭します。

強力な着色汚れ除去！



洗浄前

洗浄後

※写真のような頑固な汚れには、一晩浸けおきがお勧めです。




2.5g×30包/箱
定価 1,500円(税別)

使用方法



1

コップ一杯(約200cc)の水(ぬるま湯)に、「入れ歯爽快ステインクリーン」を1包入れ、入れ歯を入れます。(汚れがひどい場合は濃い目でご使用ください。)

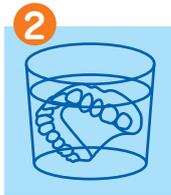

2

通常約30分から1時間できれいになります。(汚れがひどい場合はひと晩浸けおきするといっそうきれいに洗浄できます。)



3

洗浄後は、入れ歯を流水で十分にすすいでください。※洗浄剤は1回1包が使用量です。洗浄力が低下しますので、使用後の洗浄剤は毎回取り換えてください。

保管・および取扱いの注意

- 1 直射日光を避け、なるべく湿気の少ない涼しい所で保管してください。
- 2 入れ歯洗浄以外の目的に使用しないでください。
- 3 小児の手の届かない所に保管してください。
- 4 60℃以上のお湯では使用しないでください。入れ歯が変色または変形することがあります。
- 5 入れ歯を浸けおきする際は、密封しないでください。(圧力が上がって容器が破裂する恐れがあります。)
- 6 他の薬剤や洗浄剤と混ぜ合わせて使用しないでください。
- 7 目や口に入れないでください。万一入った場合は、すぐに流水で洗い流し、医師の診療を受けてください。
- 8 皮膚や衣類に付着した場合は、すぐに洗い流してください。
- 9 誤飲した場合は、吐かずに口をすすぎ、牛乳か水を飲む等の処置をして専門医へご相談ください。
- 10 パラジウム合金や銀合金等、金属の種類や諸条件によっては、金属部分が変色することがあります。その場合は直ちに使用を中止し、歯科医院でご相談の上、入れ歯を磨いていただく等の適切な処置を行ってください。
- 11 保管状態(湿気・温度)によって粉末が固まったり、袋が膨れる恐れがありますが、品質に問題はありませぬ。なるべく購入後1年以内にご使用ください。

歯石汚れには姉妹品の
「入れ歯爽快」
をご利用ください。

3g×30包/箱

好評発売中!!



取れにくかった入れ歯の汚れが驚くほどきれいに取れる

- 強力な洗浄力で歯石、水アカを除去します。
- 洗浄後のイヤな臭いがありません。
- 臨床歯科医が開発した新しいタイプの洗浄剤。
- 矯正装置、その他の装置(アタッチメント装置)にも使用できます。

「入れ歯爽快ステインクリーン」は、酸素系漂白剤の主成分である過炭酸塩、過硫酸塩を独自のノウハウで配合しています。

色素、香料、発泡剤、錠剤にするための結合剤等の洗浄成分以外のものを使用していないため、高濃度で高い洗浄効果を発揮します。

特に着色汚れの除去に優れており、消臭・除菌の効果もあります。

—コラム— 義歯の洗浄



広島大学名誉教授
東北大学客員教授
濱田 泰三 先生

高齢社会でクローズアップされる義歯の洗浄

—義歯の洗浄はなぜ必要か—

義歯の汚染との戦いは、義歯の出現とともに認められ、義歯洗浄剤による洗浄については今から50数年前にすでに報告がなされています。約半世紀を経た現在、義歯洗浄剤において、その洗浄のコンセプトがいくつかに分かれ、多種多様な洗浄剤が市場に出回っています。

超高齢社会を迎えるわが国において、義歯を使用される方が年々増えつつありますが、デンチャープラークに関する研究も進み、義歯性口内炎、誤嚥性肺炎など呼吸器系疾患、糖尿病や心臓病等との関連など、デンチャープラークの病原性についてもわかってきました。

そのような中で義歯洗浄剤は、単なる「入れ歯に関連する身の回り品」ではなく、歯科医療において、重要なアイテムとして考えなくてはならない時代になってきています。

日常において、義歯を清潔に取り扱うことは、単に快適な生活を送るためだけでなく、義歯の汚れが原因となるさまざまな病気を予防し、健やかな生活を維持するためにも重要であると言えるでしょう。

推薦文

バイオデンタルクリニック(大阪府)
大原 盛勝 先生



入れ歯を清潔に保つことは、お口の中の健康を保つだけでなく、入れ歯の汚れが原因で起こる様々な病気を予防し、健康な生活を送るためにも大切です。

「入れ歯爽快ステインクリーン」ならこれまでは落とすことが難しかった入れ歯の着色汚れが良く落ち、大変助かっています。

院内で患者さんからお預かりした義歯を「入れ歯爽快ステインクリーン」で洗浄すると、人工歯の着色汚れが白くなったと、とても喜んでいただけます。

当院では、義歯患者さんには、「入れ歯爽快ステインクリーン」を必ずおすすめしています。

日本橋土屋歯科医院(東京都)
土屋 公義 先生



今までは患者さんに他社製品をおすすめしていたのですが、「着色汚れが落ち難い」という意見が多くありました。しかし「入れ歯爽快ステインクリーン」をおすすめするようになってからは、「着色汚れがキレイに落ちて、イヤな臭いもなくなった!」といったお話を多くいただくようになりました。

患者さんの満足度も高く、当院で欠かすことのできない商品になっています。

製品に関する
お問い合わせは

販売元

和田精密歯研株式会社

大阪市淀川区東三国1丁目12番15号
TEL 06-4807-6700 FAX 06-4807-6788

製造元

株式会社 バイテック・グローバル・ジャパン

東京都中央区月島2-14-12 月島セントラルビル3F
TEL 03-5546-0877 FAX 03-5546-2224