

歯の専門家が考えた「入れ歯専用ブラシ」

キレイな入れ歯で 食事を美味しく。 笑って過ごそう。

特許
取得済




ぬめり・汚れ
臭いを
カンタン除去

たった30秒で
歯垢除去率

90%

入れ歯にフィット！
このドーム構造がスゴイ！

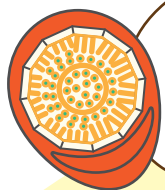

断面図



デンチャーブラシなら

片手でカンタン！回すだけ！

まるで歯科従事者が磨いたように
キレイに仕上がります。

入れ歯を洗うには、高齢者の
手ではブラシを持ちづらく、
浸け置き洗いでも汚れを落と
しきれないという問題があり
ました。



ブラシだと
隅々まで洗えないし
手間だし！

両手を使わないと
洗えない

入れ歯を
デンチャーブラシ
にはめ込みます。

底に滑り止めが
ついているので
片手で楽々！

水洗いで
ゴシゴシ
ひねりながら
洗います。



商品名
本体・フタの材質
ブラシ部の材質
毛の材質
耐熱温度
本体重量
個装サイズ
ボールサイズ
ケースサイズ

デンチャーブラシ
ABS樹脂
ポリプロピレン
ナイロン
80度
166g
W132×H173×D62mm
W370×H275×D75mm
W570×H380×D340mm



デンチャーブラシ
DB01-03

3,400 円(税別)




取替え用 BO02-02
2,700 円(税別)

浸け置き洗いだけだと落ちない

入れ歯の「ぬめり・汚れ・臭い」を カンタンに除去！




入れ歯磨きは、従来のブラシだと局所を順番に洗っていくため手間と時間がかかり、汚れも残りがち・・・。
デンチャーブラシなら、**一度に広い範囲を洗う**ことができ、**細かな部分の汚れも落とす**ことが可能です！

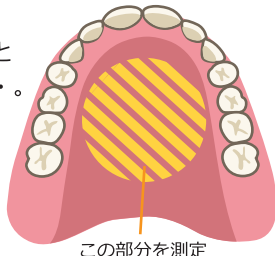


汚れの残存率	表側		裏側	
	従来法	DB	従来法	DB
5秒後	100.0	37.4	99.6	34.3
10秒後	100.0	31.4	99.1	29.4
30秒後	49.2	12.4	63.8	28.4

(鹿児島県工業技術センター検証結果) DB: デンチャーブラシ

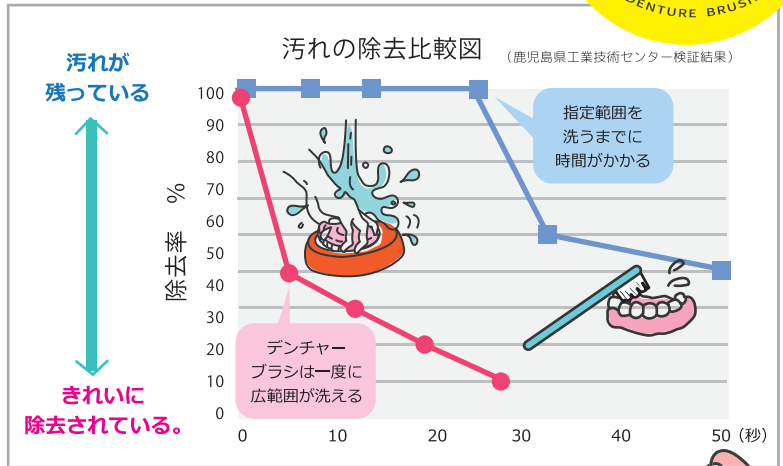

汚れ落ち実験 (※ブルーが汚れ)

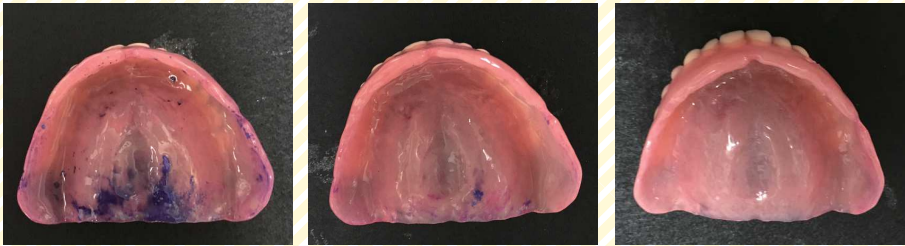

水洗いのみ ▶ 浸け置き洗い ▶ デンチャーブラシ

**デンチャーブラシで
両面洗うとピカピカに！**

ブルーが歯垢を浮き出したものです。浸け置き洗いだけでは、ぬめりや歯垢は完全には落とせませんでした。デンチャーブラシは、**ぬめりと歯垢を両方落とすので、装着時の爽快感が違います。**



**入れ歯磨きは、毎日使うものだから。
デンチャーブラシは、丈夫で長持ち！
ブラシの耐久性は、なんと10年*！**

替えブラシもあります。

*1日3回使うことを想定した耐久実験では11年の耐久性が確認されました。(実施機関：鹿児島県工業技術センター)

私たち、デンチャーブラシを使っています！

孫から敬老の日のプレゼントにデンチャーブラシをもらいました。洗浄剤に含まれる化学薬品を一切使用しなくて良いので安心です。本当に簡単！キレイになるので今では、他のものを使えません。

畑仕事 男性 68歳 Oさん

自分で入れ歯を磨くことができず、人に声をかけるのがとても嫌でした。デンチャーブラシを知って、自分で自分の入れ歯を磨くことができるようになり、とても嬉しいです。

片手麻痺患者 女性 82歳 Aさん



どこでも
デンチャーブラシ

**歯科衛生士さんに
聞きました！**

単純な商品ですが今までに無いものだったので、見つけた時は嬉しかったです。高齢者の方が、**手指を使ってご自身で使用することができるので、リハビリや認知症予防にもなると思います。**

デンチャーブラシで入れ歯を洗うと、汚れも飛び散らないので、介護をされるご家族の方にも喜んでいただいています。

20代 Fさん 訪問歯科診療専門 歯科衛生士

デンチャーブラシのお問合せはお気軽にご連絡ください。

— 製造元 —

有限会社 **Aアジャスト** (販売事業部)

〒890-0055 鹿児島市上荒田町 2-17

☎ **099-802-4024**

FAX **099-802-4781**

営業時間 (9:00~17:00土日祝 除く)