

歯科矯正装置洗浄剤

矯正クリーン

矯正装置の汚れが驚くほどきれいに取れて スツキリさわやか!


歯医者さんが薦める
新しいタイプの矯正装置洗浄剤

「矯正クリーン」は矯正患者さんのQOL(生活の質)を考えて開発された、歯医者さんが薦める新しいタイプの矯正装置洗浄剤です。矯正装置は、毎日長時間装着しているため、汚れや臭いやヌメリが付いてしまいます。矯正装置の汚れは、歯垢・歯石・着色に分けられ、これらは矯正装置のプラスチックの部分の内部にまで入り込み、水洗いだけでは落ちず、汚れや臭いの原因となります。これらの汚れや臭いをもとからシャットアウトし、矯正装置を清潔に保つためにも、「矯正クリーン」できれいに洗浄しましょう。



2g×60包 定価 2,000円(税別)

使用上の注意をよく読んでからご使用ください。

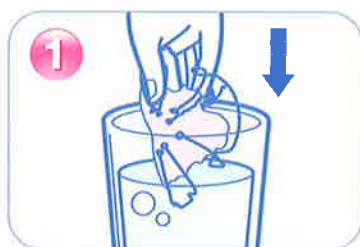

70~100ccの水(ぬるま湯)を
コップに入れ、「矯正クリーン」
1包を入れます。


(汚れがひどい場合は濃目でご使用下さい。)

※容器はガラス製あるいはプラスチック製のものをお使い下さい。 ※メガネ用超音波洗浄器を使用すれば、より洗浄効果がアップします。
※矯正装置を清潔に保つため、1日2回ご使用されることをおすすめします。



矯正装置を入れます。
約30分できれいになります。

(矯正装置のサイズが大きい場合は、
2包で水を多めに使用ください。)

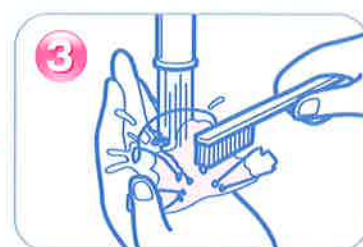

洗浄後は歯ブラシなどを使用して
流水でよく洗い落とし下さい。
何度か使用しても汚れが落ちない
場合は歯科医にご相談下さい。

使用上の注意

- ① 本剤は矯正装置の洗浄にご使用下さい。
- ② 『矯正クリーン』を口に入れないで下さい。(本剤は酸性のため歯質表面や口内を損傷します。)
- ③ 他の洗浄剤と混ぜないで下さい。塩素系洗浄剤と混ぜると、塩素ガスが発生し、危険です。
- ④ 本剤は水またはぬるま湯で溶かしてから矯正装置を入れて下さい。
- ⑤ 60℃以上のお湯では使用しないで下さい。矯正装置が傷むことがあります。
- ⑥ 湿気の少ない涼しい所で、子供の手の届かない所に保管して下さい。湿気などで、粉末が固まったりすることがあっても品質には問題はありません。
- ⑦ 漂白剤を繰り返し使用して洗浄された矯正装置は、プラスチック部が劣化していることがあります。その場合、本剤を使用するとまれに色褪せすることがあります。
- ⑧ 万一、矯正装置に異変を感じた場合は使用を中止し、歯科医院でご相談の上、適切な処置を行って下さい。
- ⑨ 分包袋が開けにくい場合は、あまり振らずに、ハサミで切り口より開けて下さい。分包袋を強く振って開けると粉が舞い上がり、むせることがあります。(粉は人体には影響ありません。)

製品に関するお問い合わせは

歯の妖精「トゥースフェアリー」のお話

欧米では、乳歯が抜けたら枕の下に入れて眠ります。それがきれいな白い歯だったなら、夜中にやってきたトゥースフェアリーが銀のコインと交換してくれるのです。私たちは、歯の健康と美に対する意識を皆様に広めるトゥースフェアリーをイメージキャラクターとしています。



©2003

総販売元

歯も心も美しく
和田精密歯研株式会社

本社 〒532-0002
大阪市淀川区東三国1丁目12番15号
電話 06-4807-6700 FAX 06-4807-6788
http://www.labowada.co.jp
http://www.teeth.co.jp

製造元 GCSI