



Dent Burner

デントバーナー

片手（ワンタッチ）で点火するガスバーナー


DENTRADE
DENTAL SUPPLY&TRADE

使用方法



使用方法 ①

PUSH ボタンを押して、ガスバーナーのキャップを開けます。

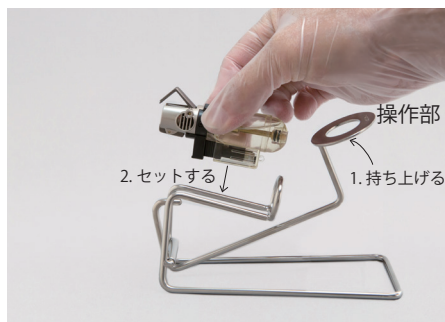

使用方法 ②

本体を平坦なテーブル等に置きます。
操作部を上を持ち上げます。
ガスバーナーを本体にセットします。



使用方法 ③

手の側面で操作部（ドーナツ状のステンレス天板）を押し下げ、着火し、プラガー等のハンドインスツルメント（歯科用器具）を加熱します。
操作部から手を離すと消えます。

特徴



安定した炎

シャープな炎が安定して出ます。



コンパクト

場所をとらないコンパクトサイズで持ち運びも便利。往診等にも便利です。



ランニングコスト

電池が不要な上、市販のガスライター専用のガスボンベで補充が可能なので、ランニングコストに優れています。

ガスバーナー



ガスバーナー（2,000 円）

ガスバーナーの容器は透明な為、残量や補充のタイミングが確認できます。



バーナー（火力）の調整

ガストーチの後部にある、調整部（—）をマイナスドライバー等を用いて回転させる事で火力の調整が可能です。



ガスの補充方法

市販のガスライター専用のガスボンベで補充が可能です。



販売名：デントバーナー
一般的名称：歯科用バーナー
届出番号：27B2X00064000024
メーカー希望価格：8,000 円（本体 + ガスバーナー 1pcs）（税別）



www.denttrade.co.jp

有限会社デントレード

〒567-0041
大阪府茨木市下穂積 4 丁目 13-107
TEL：0120(7)86086
FAX：0120(1)86086
EMAIL：info@denttrade.co.jp