

Fibrin Gel

derived from Autologous Blood

添加物を一切含まない 完全自己血液由来 **フィブリンゲル**



▶ 強固なゲル
自然なフィブリンの網目構造が形成されるので、非常に強いゲルになります。

供血用遠心機

MEDIFUGE

メディフュージ



供血用遠心機

MEDIFUGE

メディフュージ



電源電圧 AC 100 V (50/60 Hz)
定格電力 120 VA
本体重量 9.4 kg
本体サイズ W 280 × D 320 × H 240 mm

製造販売届出番号：13B1X10100000004

13分で自動的にフィブリンゲルが作製されます。

point 1

簡単！

セットしてスタートボタンを押すだけ

point 2

迅速！

遠心操作は一回のみで、遠心時間13分

「メディフュージ」で遠心分離を行うことにより、血液中の赤血球などが分離され、同時に凝固因子が自然に刺激されて、添加物を一切含まないフィブリンゲルが形成されます。

- ◆「UV サイクル」を搭載：UV ランプ（殺菌灯）により、装置内側を殺菌することができます。
- ◆最大 8 本まで血液サンプルのセットが可能
- ◆コンパクトで静音設計



再生医療等安全性確保法の施行によりフィブリンゲルを用いた治療を行う際には地方厚生局への届出が必要になりました。


操作方法



① 採血後、すぐにセットする。



② スタートボタンを押し、遠心開始。

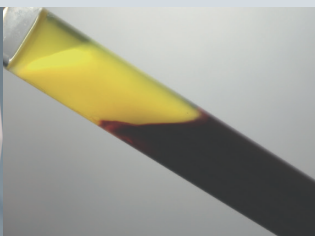

③ 遠心分離後の様子。



④ 採取したフィブリンゲル。


※ なるべく早く遠心にかけてください。すぐに凝固が始まるので、時間がたつとフィブリンゲルの作製効率が下がることがあります。
※ フィブリンゲルの大きさや色などには個人差があります。

関連商品

フィブリンの加工に

Sticky Bone Box

◆ ステンレス製（オートクレーブ滅菌可能）

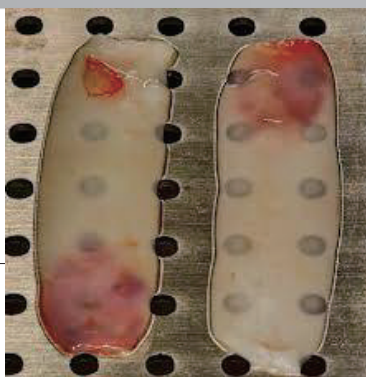

製造販売元：

コアフロント株式会社 <https://www.corefront.com>

TEL 03-5579-8710 FAX 03-5579-8711 E-mail desk@corefront.com

〒162-0845 東京都新宿区市谷本村町 2-11 外濠スカイビル 4F

製造元：Silfradent S.r.l. (Italy)

silfradent