


テクニカルデータ (物性情報)

操作時間	20 秒
口腔内保持時間	30 秒
シヨア A硬度	90
弾性ひずみ	1.1%以下
寸法変化 (48時間後)	0 ~ -0.10%

※当社試験結果による

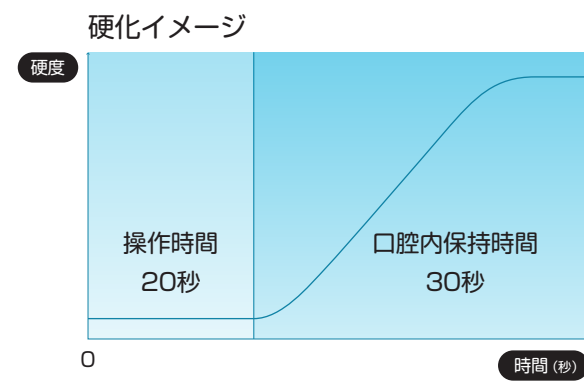

※操作時間の間はペーストが軟らかいままで、噛むと一気に硬度が上がる様子を表したものです。

製品情報

Solebite ソールバイト

商品コード PJ8110 価格 2,600円



包装内容 カートリッジ 50 ml x2
ミキシングプラス L (グリーン) x3

販売名 ソールバイト
(一般医療機器/歯科咬合採得用材料)

届出番号 27B2X00268P00001

関連商品 ディスペンサー PJ

商品コード PJ8010

価格 9,000円

■一般医療機器

届出番号: 27B2X00268P00002



関連商品 ミキシングプラス
フラットロングL グリーン 50本入り

商品コード DC-0123

価格 3,500円

■一般医療機器

届出番号: 27B2X00268X00018



※価格は2018年8月現在のものです。消費税は含まれておりません。

premiumTM
plus JAPAN

<お問い合わせ窓口>

Premium Plus Japan Co., Ltd. (プレミアムプラスジャパン株式会社)

〒563-0025 大阪府池田市城南1-4-2 2F
072-735-7101 9:00~17:00 (土・日・祝祭日を除く)

<商品センター (製造販売業)>

〒561-0805 大阪府豊中市原田南1-13-5

※商品は税別価格となります。

※製品のデザイン、仕様、外観、パッケージは予告なく変更する場合がございます。

担当販売店

F0411807-02



SOLEBITE

咬合採得用ビニルシリコーン印象材

「色調」「硬さ」「使いやすさ」 すべてが最高のバランス


それぞれの考え、使用感、好みがある中で、
それでもより多くの人に使ってもらえる商品を作りたい。
それぞれ咬合採得材料に求めるものが違う中で、
それでも選んでもらえる最高のバランスを見つけたい。
一人ひとりの先生にとっての、Sole=唯一の存在でありたい。
そんな想いから始まった製品開発。
自社製造にこだわったMade in Japanのソールバイトです。

SOLEBITE | ソールバイト

5つの特徴と製品バランス

● 濃淡の出やすいマットブルーの色調

なぜこの色を選んでいるのか？ソールバイトの製品開発で当社が非常にこだわったポイントです。濃淡が出やすく、少し濃いめのブルー。あえて光沢を抑えてマットにしていることにも理由があります。咬合接触点に近い部分まで見やすく、接触点の透明度が高い。咬合状態を確認するのに最適な色調に作り上げました。モニター試験においても、色の評価、接触点の見やすさは、90%以上が非常に良いと回答。位置関係の記録だけでなく、チェックバイトとしての機能性も高い製品です。色褪せや色調の変化が少ないため、長期保管しておくことも可能です。

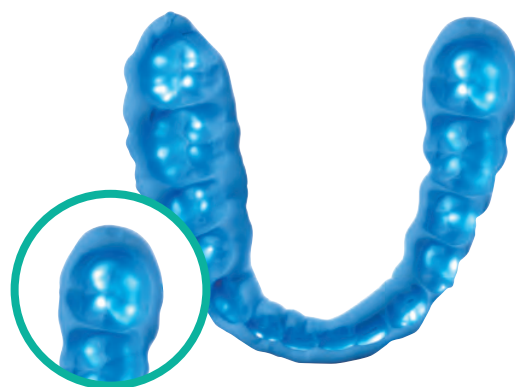

● 30秒硬化！ゆったり操作、即急硬化

操作時間の20秒は、ペーストの押し出し抵抗が非常に少なく、歯面にのせるときの流動性がよいため、フルアーチの咬合採得にも十分ご使用いただけます。
口腔内に入れた時点では軟らかく、咬合直後から硬化が始まり30秒で硬化。採得中に患者様が動いてしまいズレが生じる、という問題も解消します。



● 収縮率-0.1%以下で寸法を維持

咬合採得後から技工作業までに、保管期間が長くなることがある。模型に戻らないバイトがある。トリミング作業時に割れてしまう……バイト材が本来の役目を果たすために、技工サイドからの問題もさまざま。
ソールバイトの収縮率は-0.1%以下。1~2週間経過後も、ほぼ同じ収縮率を維持します。
※当社試験結果による



● ショアA90！「硬すぎず、軟らかすぎず」 あつかいやすい適度な硬度

適度に硬く、適度に弾力性がある。トリミングに必要な2つの要素を兼ね備えています。
割れない硬さを保ちつつ、バーやナイフでの切削作業がしやすい弾力を残しています。



● わずかな押し出し抵抗

操作性を重視してバイト材を選択される先生が多く、そのニーズもまさに多様。そのなかでのベストバランスを、ソールバイトは目指しました。
製品モニターでは、ほぼ全員が「軽い」「押し出しやすい」と評価。この使いやすさは、自信をもってお届けします。



自社製造開発にこだわる理由

ソールバイトは日本製です。プレミアムプラスジャパンの社屋に小さな製造室を設計するところから、この大きなプロジェクトは始まりました。色をどうするか、硬さはどのくらいがいいか、より使いやすい製品に…。多くの現場に足を運び、貴重なご意見を集約し、可能な限りすべてを盛り込む。それを実現するプロセスは、私たちがモノづくりメーカーへと成長する大きなステップでした。小さな製造室では研究が続けられ、長い年月をかけて研究開発された自信作です。自社製造だから作ることができたこの製品。安心の国産品ソールバイトは、1本1本でいねいに充填され、少しの誤差も見逃さない厳しい試験を経て、お客様のもとへ届けられます。