

SOLEBITE Superfast


ソールバイト スーパーファスト

● Made in Japan

premiumTM
plus JAPAN



20秒で硬化 スピード&精確性のシリコーンバイト

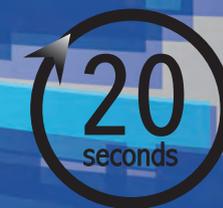

口腔内保持時間20秒、トータル咬合採得時間35秒。
スピードのアドバンテージで患者様の苦痛を軽減、チェアタイムの短縮に。

20秒で硬化！スピードで精度の高い咬合採得をサポート

当社の研究開発により口腔内保持時間20秒を達成しました。ズレや狂いが出ないうちに素早くシャープに硬化します。高齢の患者様や採得中にじっとしていることが難しい方、往診・訪問診療などの限られた時間での診療にも役立つスピードです。咬合している時間が短くてすむことで、患者様のプレッシャーや緊張もやわらげ、より精度の高い咬合採得につながります。硬さと弾力性があるため、口腔内から撤去の際も破折しにくくなっています。




トータル35秒 操作性も向上

ソールバイトスーパーファストは、操作時間 15 秒、口腔内保持時間 20 秒、咬合採得にかかるトータル時間はたった35秒と、一般的なバイト材と比べて約 50%も短縮されています。押し出しの軽さと流動性をそなえており、シリコンバイト使用頻度の高いドクターには最も好まれる速さと使いやすさ。ユーザーからのご意見を元に、スーパーファストはチップにショートサイズを採用し従来品よりもさらに操作性を良くしています。ロスも少なく単冠など片顎での使用にもお勧めです。



視認性もUP

ソールバイトスーパーファストは、よりコントラストが強く出る青紫色に設計し、さらに視認性を高めました。咬合接触点の見やすさは、当社従来品と比較してスーパーファストの方が見やすくなったというモニタリング結果も出ています。

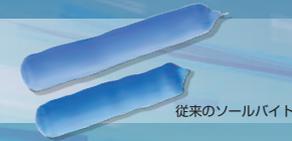

なぜソールバイトは使いやすいのか？

当社バイト材の最大の特長は、操作性の高さとシャープな硬化反応。操作時に影響する押し出しの軽さを維持するために、フローの高いペーストを採用。流動性を保ちながらも歯列から垂れ落ちることがないチキソトロピー性を持ち、欠損歯の多い症例でもらくに咬合面に載せる



ことができます。操作余裕時間を過ぎた直後から一気に硬化速度が上がる、いわゆる最高のメリハリがソールバイトの強みです。だから、口腔内保持時間も短く、採得時のストレスもありません。硬化体に弾力性があるのでバリバリした感じがなく、模型上でも破折しにくく割れずに作業することが可能。咬合面が滑らかなので、ナイフもさくさく入りません。寸法変化も収縮率-0.10%以下を維持します。



テクニカルデータ（物性情報）

ソールバイトとスーパーファストの比較

	操作時間	口腔内保持時間	トータル時間	最終硬度	弾性ひずみ	寸法変化(48時間後)	硬化体の色
ソールバイト	20秒	30秒	50秒	ショアA90	1.1%以下	0~-0.10%	マットブルー
ソールバイトスーパーファスト	15秒	20秒	35秒	ショアA90	1.1%以下	0~-0.10%	青紫

※当社試験結果による

ソールバイトとスーパーファストの比較イメージ

シャープな硬化で短時間で採得完了。操作時間は十分に確保されており、患者様は抵抗感なく咬合が可能。正確な咬合記録が行えます。



製品情報

Solebite Superfast
ソールバイト スーパーファスト

商品コード PJ8180

価格 3,600円



Solebite ソールバイト

商品コード PJ8110

価格 2,600円



包装内容: カートリッジ 50 ml x 2 ミキシングプラス L(グリーン)x 3
販売名: ソールバイト (一般医療機器/歯科咬合採得用材料)
届出番号: 2782X00268P00001

※価格は2019年11月現在のものです。消費税は含まれておりません。

Premium Plus Japan Co.,Ltd. (プレミアムプラス ジャパン株式会社)
〒563-0025 大阪府池田市城南1-4-2 2F
〈お問合せ窓口〉 072-735-7101 9:00 ~ 17:00 (土・日・祝祭日を除く)

商品センター: 〒561-0805 大阪府豊中市原田南1-13-5
(製造販売業)

※商品は税別価格となります。
※製品のデザイン、仕様、外観、パッケージは予告なく変更する場合がございます。

担当販売店