

クリアな世界へようこそ

# WIND LIGHT

With light and antifog ウインドライト



FOR THE PATIENT

OKABE

ボタンを押すだけの簡単な操作で  
ミラーのくもりを取り除いて、  
口腔内撮影に必要な明るい視野を確保します。

厚さ  
1~1.85mm  
までのミラーに  
対応可能



原寸大

ウインドライト 本体

## ウインドライト本体スペック

長さ：160mm	・リチウム電池内蔵(10Ah)
幅：65mm	・2時間でフル充電
高さ：25mm	・120分程使用可能 (使い方により異なります)
重さ：115g (ミラー除く)	

## ウインドライト使用の4step

step 01 ミラーをON

step 02 ライトをON

step 03 ファンをON

step 04 くもりをOFF

- ① ミラー装着スロット
- ② 通気口
- ③ ライトON/OFFボタン
- ④ 光量調整ボタン
- ⑤ ファンON/OFFボタン
- ⑥ MicroUSB充電ケーブルスロット

ウインドライト 本体

# Wind Light

No.9050

通常  
価格

¥19,800 [税別]



# Dr.KENJI IMAI

今井健二先生 (Dr .KENJI IMAI) ご略歴

- 平成 6 年 朝日大学歯学部卒業
- 平成 6 ~ 7 年 朝日大学歯周病学講座
- 平成 7 ~ 11 年 朝日大学大学院歯学研究科
- 平成 11 年 ~ 医療法人修愛会上前津歯科医院
- 平成 14 年 ~ 医療法人修愛会上前津歯科医院理事長就任

所属学会

- 日本歯科医師会会員
- 日本歯周病学会会員 認定医
- 日本口腔インプラント学会会員
- 日本歯科審美学会会員
- 日本骨代謝学会会員

- AO(ADVANCING THE VISION OF IMPLANT DENTISTRY)
- IPPC 主宰
- ノーベルガイドプランニング教室 (名古屋) 塾長
- KaVo Dental Systems Japan Official Adviser, Speaker

医療法人修愛会上前津歯科医院

〒460-0011 名古屋市中区大須 4-11-17

<https://www.e-ha.ne.jp/>

ウインドライトが特に有効と感じたのは、助手が付かないときの撮影時に片手でミラーを持ちながら素早くシャッターが押せるところである。



MOVIE QRコード



ウインドライトを使用することでいかに短時間で撮影ができるか、動画でご確認下さい。


## オプション

ウインドライトミラー咬合面用 厚さ1mm



No.9051 ¥6,000

ウインドライトミラー舌側用 厚さ1mm

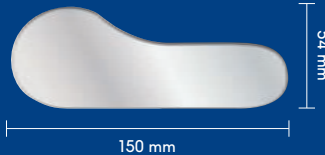

No.9052 ¥5,000

ウインドライトミラー頬側用 厚さ1mm



No.9053 ¥5,000

ウインドライトを使うことにより、ミラー表面を直接明るく照らすことができる。なおかつ、ファンの効果で鏡面がくもらないため、ストレスを感じることなく撮影が可能である。角度付きのミラーでも鏡面が十分に照らされるので、臼歯部にも影ができにくい。また、当院で使用している全てのミラーが取付けできたので、汎用性の高さも利点である。当院の衛生士の使用感も確認してみたが、軽量で操作性に優れているとの評価を得ている。

※下記の写真は全て左:ウインドライト無し、外部からのライトのみ 右:ウインドライト有り、ライト+ファン

### 咬合面口蓋側



ウインドライト有り

### 咬合面舌側



ウインドライト有り

### 舌側面臼歯部



ウインドライト有り

### 頬側面



ウインドライト有り

販売元  
株式会社 岡部 / OKABE Co., Ltd.

〒815-0041 福岡県福岡市南区野間4-4-32  
TEL 092-561-8198 FAX 092-561-8070  
<https://okabe118.co.jp/>

ZIP CODE 815-0041  
4-4-32, Noma, Minami-Ku, Fukuoka, Japan  
TEL +81-92-561-8198 FAX +81-92-561-8070

※お取引のある歯科ディーラー様、歯科商店様へお問い合わせ下さい。