

ドクターキムヘッドランプ専用日本製フェイスシールド

OKシールド

OK Shield

MADE IN JAPAN

特徴

1. 拡大鏡との併用可

フェイスシールドと拡大鏡を組み合わせるのはなかなか難しいものです。OK シールドはドクターキムヘッドランプ用各種拡大鏡との併用が可能です。

2. 眼鏡との併用可

フェイスシールドと顔の間のスペースを任意に調整できるため、眼鏡をかけていても干渉しにくく併用が可能です。

3. 心地よいフィット感


おでこと接触するアタッチメントに本革を採用することで、長時間装着しても痛くなりやすく疲れにくい設計です。

4. 着脱が簡単

フェイスシールドの固定にマジックテープを採用することで、着脱の煩わしさを軽減しました。

5. クリアな視界

透明度が高く傷が入りにくいPVC（ポリ塩化ビニル）をフェイスシールドの素材に採用しました。

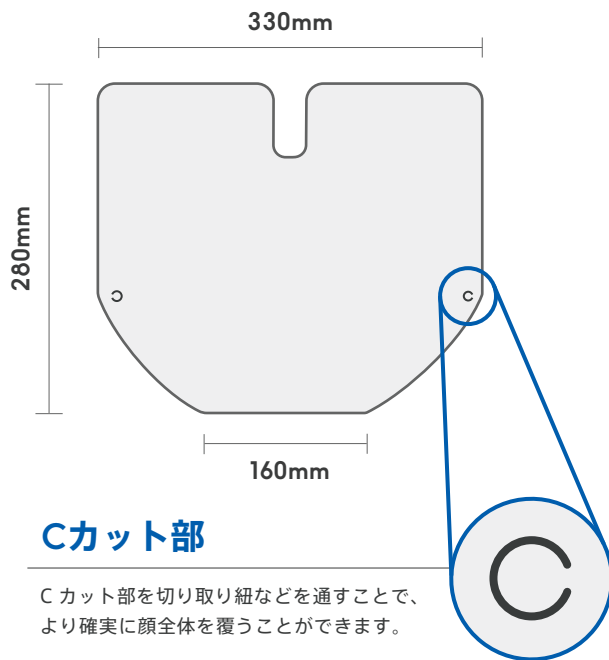

縦 : 280mm
横 : 330mm
厚さ : 0.25mm
素材 : PVC

総重量

60g

※ドクターキム
本体は除く



OK Shield Starter Kit

OKシールド スターターキット

No.3130 ¥6,000 [税別]

本革アタッチメント×1、調整用アタッチメント×1、フェイスシールド×10、マジックテープ×20

装着方法

装着方法紹介動画
YouTube
OKABE Channel



アタッチメントの取り付け

フロントカバーを取り外し、
本革アタッチメントを取り
付けます。



調整用アタッチメントを本革アタ
ッチメントの上に重ねて取り付
けます。取り付ける位置によっ
てフェイスシールドと顔の間の
スペースを変えられます。
(フェイスシールドを顔に密着
させたい場合は不要です)



フェイスシールドの 取り付け

フェイスシールドの上部 2ヶ
所にマジックテープを取り付
けます。



アタッチメントとフェイスシールドをマ
ジックテープで固定し、アタ
ッチメントを好きな角度に曲
げて使用します。
(Cカット部に紐などを通して後
方で結ぶとより顔全体を覆
うことができます)



※ 感染防止のため、隙間を極力排除した設計
になっています。フェイスシールドが曇ってし
まう場合は、市販の曇り止めスプレーを使用
いただくことをお勧めします。

OKシールド 単品10枚入

(マジックテープ 20 枚付)

No.3131 ¥2,200 [税別]

OKシールド お徳用100枚入

(マジックテープ 200 枚付)

No.3132 ¥20,000 [税別]



OK 本革アタッチメント

No.3133 ¥5,000 [税別]



OK 調整用アタッチメント

No.3134 ¥1,200 [税別]



販売元
株式会社 岡部/OKABE Co., Ltd.

〒815-0041 福岡県福岡市南区野間4-4-32
TEL 092-561-8198 FAX 092-561-8070
<http://www.okabe118.co.jp>

ZIP CODE 815-0041
4-4-32, Noma, Minami-Ku, Fukuoka, Japan
TEL +81-92-561-8198 FAX +81-92-561-8070

※お取引のある歯科ディーラー様、歯科商店様へお問い合わせ下さい。