


日本製

FOR THE PEOPLE
OKABE

SM CheWie

SM チューイー

松岡伸也先生
共同開発商品

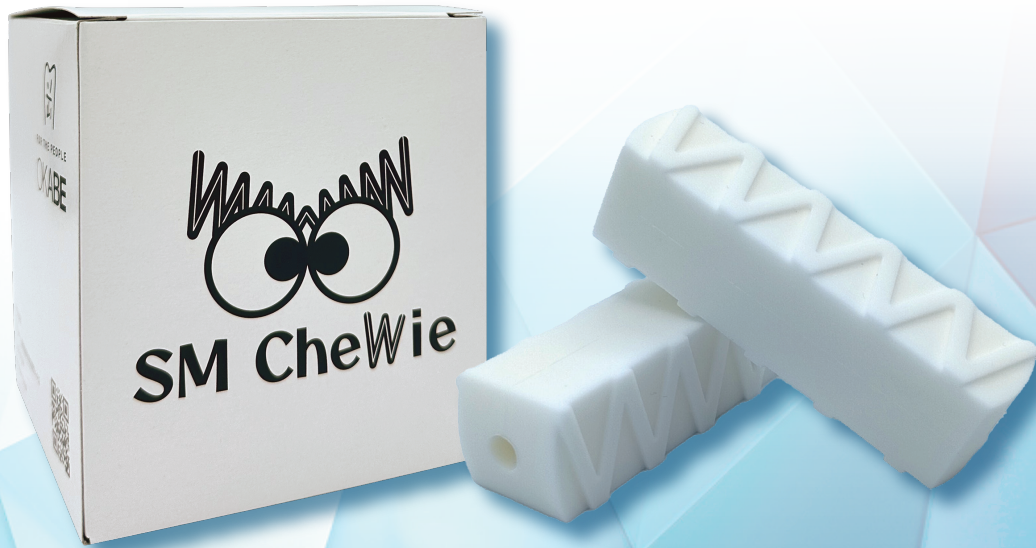

松岡 伸也 先生

Clear Smile Academy「松岡塾」

～マウスピース矯正に必要な矯正基礎学・応用実技編～ 塾長

チューイーはマウスピース矯正治療における必須アイテムです。ライナーのフィッティングが悪いと歯牙の動きが悪くなり、治療計画の予測実現性に大きな影響を及ぼします。

私が開発に携わったこの SM チューイーには 3 つの大きな特長があります。

- ① 把持しやすく、歯牙を面で捉えるため噛んだときに滑りにくい四角形状です。面で力を分散できるので歯牙に痛みも生じにくく、特に痛みへの感度が高いライナー交換初期にその力を発揮します。
- ② 全長を従来品よりも少し長めに設定し、チューイーによるフィッティングが甘くなりやすい臼歯部へ確実にアプローチできるようにしました。
- ③ 計 2 面に歯牙が食い込むような凹凸のあるデザインを付与し、歯牙 1 歯 1 歯に対するフィット力の向上を目指しました。

噛む物体に適切な弾力がなければ、ライナーはうまくフィットしません。噛めれば何でもいいというわけではないのです。

マウスピース矯正治療の成否に関わるチューイーの重要性を、しっかりと患者様に伝えてまいりましょう。

チューイーとは？

ライナーを正しくフィットさせるための補助器具です。ライナーが浮いている状態では歯に適切な矯正力が伝わらず、治療計画の遅れや失敗につながります。チューイーは計画通りにマウスピース矯正治療を進めるための必須アイテムです。

形状が四角形で持ちやすい

面で歯牙を受けるため、噛みやすく滑ることもない

咬合力が面で分散され、痛みを生じにくい

ライナーをしっかりと押し込める適度な弾力

臼歯部まで噛みやすい適度な長さ

安心安全の日本製

清潔感のある白色

選べる2種類の面

噛む面はお好みで
お選びください。

フラットサーフェス

マット加工を施した平らな面
ソフトな噛み心地

ちょうどいい弾力を生み出す
Φ3の真円空洞

バンピーサーフェス

歯牙がしっかりと食い込むように
デザインされた面
ロゴの一部をデザインに採用

商品情報

No.1001

SM チューイー (30個入)

- 3個入包装×10パック
- シリコン製 (国産素材/国内製造)
- 無香料

4,500円 4,950円 (税込)

サイズ (ほぼ実寸)

横 10mm

縦 10mm

長さ 37mm

患者様向け
『SM チューイーの使い方』付き



販売元 株式会社岡部 / OKABE Co.,Ltd.

〒815-0041 福岡県福岡市南区野間 4-4-32
TEL 092-561-8198 FAX 092-561-8070
<https://okabe118.co.jp/>

※お取引のある歯科ディーラー様へお問い合わせください。