



Root ZX mini – Design Meets Precision

ルーツZX mini

Thinking ahead. Focused on life.



MORITA



カラーバリエーション

- ホワイト
- レッド
- グリーン
- ブルー

スタイリッシュデザイン 軽量・コンパクト

高い精度の根管長測定器「ルートZX」が、コンパクトでスタイリッシュなデザインの「ルートZX mini」として誕生しました。

高い精度で測定が可能

2つの周波数で根管インピーダンスを測定することにより、根尖位置を高い精度で検出できます。

ドライでもウェットでもフルオートで測定

独自の割算方式により根管内の環境に影響されず、フルオートで精度の高い測定ができます。


小型で見やすい液晶カラーディスプレイ表示

高コントラストの液晶カラーディスプレイの採用により、ファイルの位置を分かりやすく表示します。

ファイルの動きとメーター表示が連動

ファイル挿入感覚とメータ表示が連動していますので、より使いやすく、ファイルの位置を容易に判別できます。またファイルの位置はアラーム音でも判別できます。

高精度根管長測定器 ルートZX mini

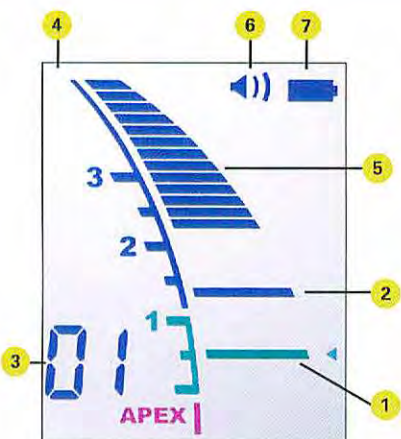

効果的な根管長測定および根管拡大を行うため、目安となる、点滅表示バーとメモリーバー2箇所の設定が可能

1 点滅表示バー

根管長測定の目安となる位置を「2」～「APEX」の範囲内で設定できます。

2 メモリーバー(任意設定バー)

根管長測定中に任意の位置を記憶しておくことができます。

メモリーバーは、

- 強い湾曲の開始部
 - 根尖孔付近から一定距離引き上げた位置
 - 根管拡大時のファイル交換の目安位置
- など、根管拡大形成時に注意すべき位置の目安として使用できます。

3 インフォメーション ナンバー









- 測定待機中は、メモリ番号(01,02,03)を示します。
- 測定中は、点滅表示バー位置までのバー数を示します。

4 液晶カラーディスプレイ

5 根管長バー

6 ブザー音量設定値(OFF, 小, 大)

7 電池残量

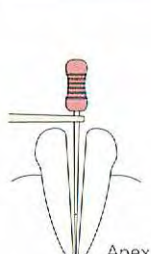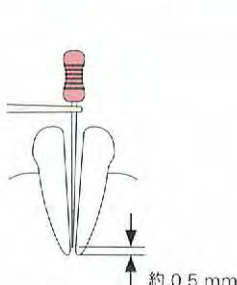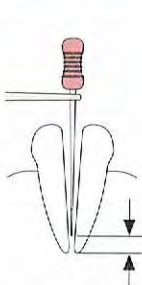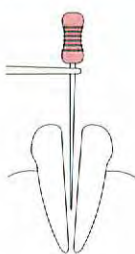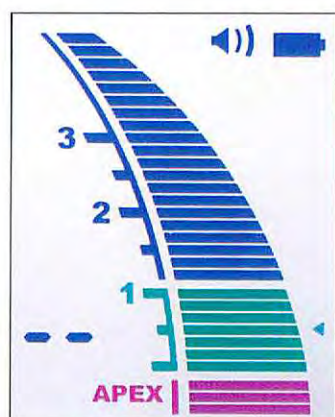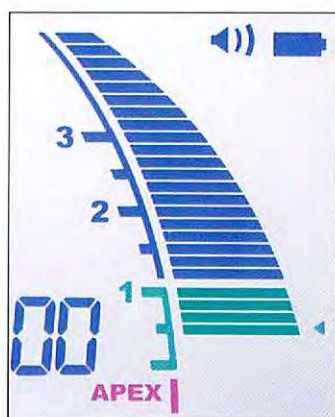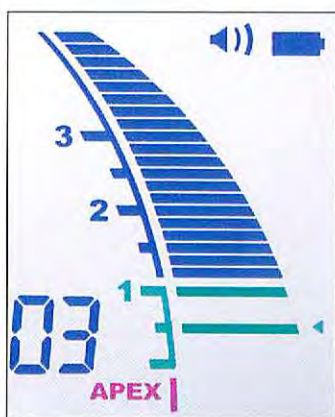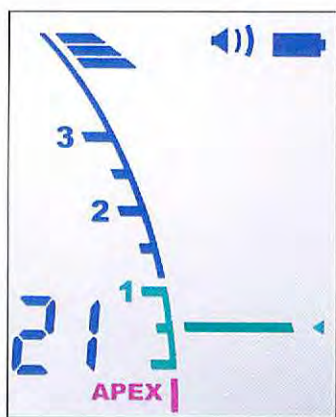

根管内にファイルを挿入すると、根管長バーが表示され、ファイルの位置が進むに従い根管長バーが連動して進みます。液晶カラーディスプレイ左下の数字は、点滅表示バー位置までのバー数を示します。

根尖付近に達すると、緑色バーの注目領域となります。

ファイル先端が点滅表示バーの位置に達すると、点滅表示バーが点灯表示に変わります。

ファイル先端がAPEXを越えると「APEX」、「◀」が点滅します。

Thinking ahead. Focused on life.

In 1916, Junichi Morita started to import products of the leading dental equipment manufacturers into Japan, where demands for modern dentistry were growing. His venturesome attempts of supplying selected products for oral healthcare has grown steadily by receiving valuable support and guidance from the dental profession. His enterprising spirit lives through the decades, and all Morita Group Companies join in continuing to pursue marketing, distribution and services, as well as R&D and manufacturing, in collaboration with world leaders in healthcare products and research organizations.

Diagnostic/Imaging Equipment

Treatment Units

Instruments

Laser Equipment

Laboratory Devices

Educational and Training Systems

Auxiliaries

モリタ SFD

ご使用に際しましては、製品の添付文書および取扱説明書を必ずお読みください。

- 標準価格の後の6ケタの数字は商品コードです。
- 掲載商品の標準価格は2010年9月21日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。
- 仕様及び外観は製品改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- 製品の色は印刷のため、実際とは異なる場合があります。

発売
株式会社モリタ

大阪本社 大阪府吹田市垂水町3-33-18 〒564-8650 TEL (06) 6380-2525
東京本社 東京都台東区上野2-11-15 〒110-8513 TEL (03) 3834-6161

製造販売・製造
株式会社モリタ製作所

本社工場 京都府京都市伏見区東浜南町680 〒612-8533 TEL (075) 611-2141
久御山工場 京都府久世郡久御山町大字市田小学新珠蔵 190 〒613-0022 TEL (0774) 43-7594

www.dental-plaza.com

PUB No.M207.1098-2-000.1010.5,000 GK-K0-Z

仕様



仕様	
一般的名称	歯科用根管長測定器
販売名	ルートZX mini
型式	RCM - 7
電源	DC 4.5 V
定格電力	0.2 W
寸法	W 60 X D 103 X H 57mm
質量	約 110g(本体)
機器の分類	管理医療機器(クラスⅡ) 特定保守管理医療機器
医療機器承認番号	22000BZX01653000



付属品

プローブコード	1本
ファイルホルダー	3本
対極	5本
根管長テスター	1個
アルカリ乾電池(単4形)	3本

■標準価格

ルートZXmini 110,000円 [107390](#)

小型軽量で手のひらサイズのルートZX miniは、
インストゥルメントトレーの上など、術者の見やすい
場所に置いて使用できます。

