

抗凝固療法のモニタリング PT-INR測定機器

インレシオ INRatio[®]2 メーター

ワルファリン服用時の 抜歯前の PT-INR 検査をより簡単に。



科学的根拠に基づく

抗血栓療法患者の抜歯に関する ガイドライン 2010 年版 対応

1 2レベル(Low/High)の精度管理を 検体測定時毎に実施

- ・ 温度、湿度等による試薬の劣化をチェック
- ・ 機器の正常稼動をチェック

2 3ステップの簡単操作

- ・ 血液添加後、約 1 分で結果を表示
- ・ 採血の難しい患者様向けにマイクロセーフチューブを準備

3 その場で印刷、患者様と結果を確認

- ・ 別売のプリンタでラベルに印刷
- ・ ラベルなのでカルテに貼るのも簡単

PT-INR 検査とは？

ワルファリンの効果をモニタリングするための検査

INR (国際標準比) = PR ISI (国際感受性指数)

PR = 患者血漿の秒数 / 正常値血漿の秒数


プロトロンビン時間 (PT) の測定結果を表す単位の一つ

「抜歯時のワルファリン休薬は、かえって危険」 といわれています。

科学的根拠に基づく

抗血栓療法患者の抜歯に関する ガイドライン 2010年版

一般社団法人 日本有病者歯科医療学会
社団法人 日本口腔外科学会
一般社団法人 日本老年歯科医学会 / 編

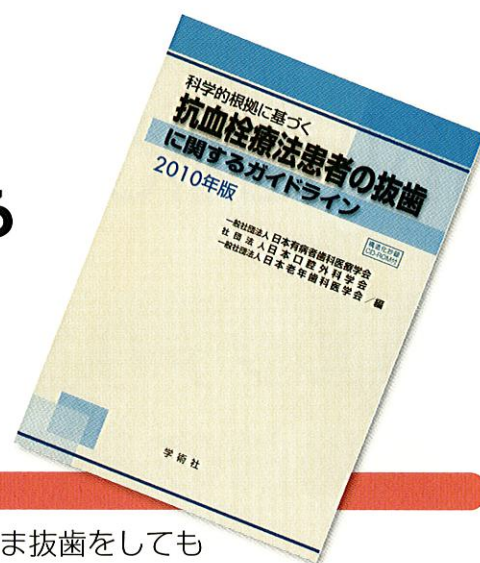

CQ1

ワルファリン服用患者では、ワルファリンを継続投与のまま抜歯をしても重篤な出血性合併症なく抜歯可能であるか？

INR が治療域にコントロールされている患者では、ワルファリンを継続投与のまま抜歯を行っても重篤な出血性合併症は起こらない。

CQ4

ワルファリン継続下に抜歯を行う場合、INR はいつ測定したらいいのか？

24 時間以内、少なくとも 72 時間前の INR 値を参考に抜歯を行う。
可能なら、抜歯当日に INR を測定するのが望ましい。

①ご存知ですか？

『抜歯時にワルファリンを中止すると約1%の頻度で血栓塞栓症を発症します¹⁾』

②ご存知ですか？

『INR は服薬状況により変動するので、抜歯当日に測定し、抗凝固効果を把握してから抜歯を行う事が推奨されています²⁾』

③ご存知ですか？

『アリーアメディカルの INRatio2 メーターで PT-INR が簡単に測定できます』

1) 循環器疾患における抗凝固・抗血小板療法に関するガイドライン (2009年改訂版) より

2) 今井 裕: 抗血栓療法患者にたいする抜歯時の対応について, 日本歯科医師会雑誌 Vol.63 No.9 2010-12より

■ INRatio2 メーター



仕様


一般的名称	血液凝固分析装置
本体寸法	151 (W) × 74 (D) × 46 (H) mm
重量	263g (電池含む)
電源	電池 / 単3形アルカリ乾電池4本 電源 / 入力100VAC、出力7.5VDC (専用のACアダプターをご使用ください)
メモリー	最新の60テスト (ディスプレイ表示)
データポート	RS232C

使用環境条件

温度	10~35℃
相対湿度	15~95%
気圧	700~1060hPa

■ INRatio テストストリップ PLUS

形状・構造等 (キットの構成)

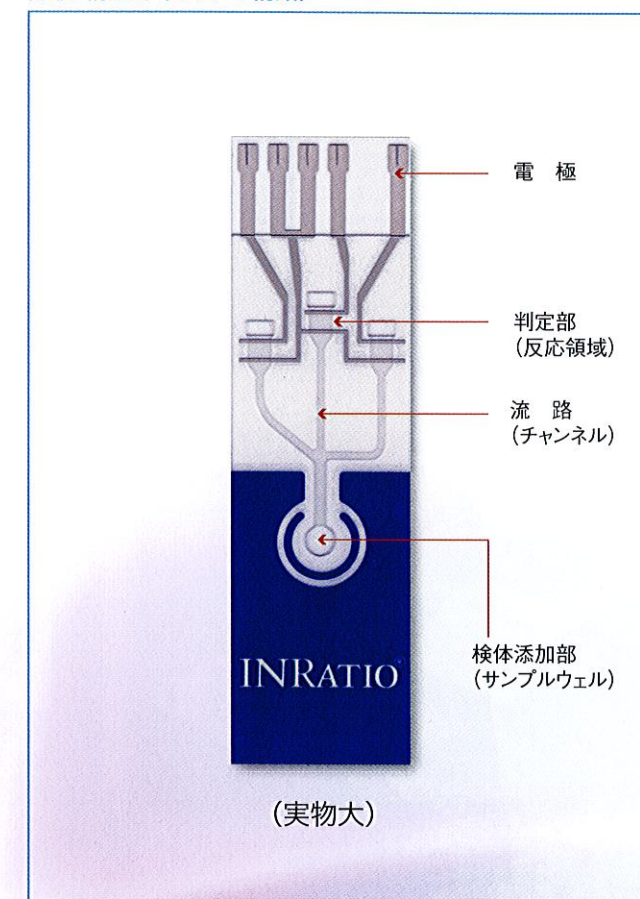

貯蔵方法・有効期間

有効期間: 18 箇月 (使用期限は外箱に記載)
貯蔵方法: 2~30℃に保存

包装単位

12 テスト用 / 48 テスト用



48 テスト用と
12 テスト用をご用意

操作は簡単 3 ステップ


1 テストストリップ挿入で スイッチオン



2 中指か薬指の指先へ穿刺



3 サンプルウェルへ血滴添加 約 1 分で検査結果を表示

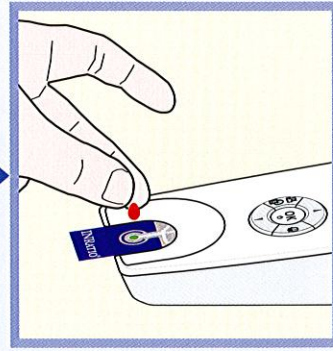

穿刺器具のご紹介



テルモ メディセーフ ファインタッチプロ

※本品には「メディセーフ針（ファインタッチプロ専用）」
以外は使用できません



テルモ メディセーフ針（ファインタッチプロ専用）

※本品は「メディセーフファインタッチ プロ」専用の穿刺針です。
「メディセーフ ファインタッチ」には使用できません。

製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

©、TERUMO、テルモ、メディセーフ、ファインタッチ、FineTouchはテルモ株式会社の登録商標です。

商品一覧

製品名	包装	希望価格	薬事区分	届出番号/承認番号/ 認証番号	商品コード
INRatio2 メーター ※INRatio テストストリップ PLUS は含まれておりません	本体、AC アダプター クイックリファレンスガイド ユーザーガイド	120,000円	特定保守管理医療機器	製造販売届出番号：12B1X10004000004	271001
INRatio テストストリップ PLUS	12 枚/箱	9,000円	体外診断用医薬品	製造販売承認番号：22300AMX01274000	271002
	48 枚/箱	19,200円			271003
マイクロセーフチューブ	50 個/箱	1,250円	雑品	—	271007

※検査には穿刺器具が別途必要です。

プリンタ関連商品

ユニバーサル プリンタ	一式	35,000円	雑品	—	271004
インレシオ プリンターケーブル	1 本	5,700円	雑品	—	271005
コレステックLXD 印刷用ラベル用紙	400 枚/ロール	5,000円	雑品	—	271006

穿刺器具関連商品

テルモ メディセーフ ファインタッチプロ	1 本/箱	2,400円	一般医療機器	医療機器届出番号：13B1X00101000031	203283
テルモ メディセーフ針（ファインタッチプロ専用）	30 本/箱	600円	管理医療機器	医療機器認証番号：20900BZZ00076	203284



アリア メディカル 株式会社

東京都新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル18F

製造販売元 アリア メディカル株式会社 千葉県松戸市松飛台357



製造販売業者：テルモ株式会社 〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷2-44-1 <http://www.terumo.co.jp/>

販売 株式会社モリタ 大阪本社 大阪府吹田市垂水町3-3-18 〒564-8650 Tel:06-6380-2525
東京本社 東京都台東区上野2-11-15 〒110-8513 Tel:03-3834-6161
www.dental-plaza.com