

ライトライト


自然光に近い光、高い演色性で細かい色調もハッキリ見えるLEDシェードテイキングライト



シェードテイキングの精度を高める


審美に対する関心が高まるなか、オールセラミックスばかりでなく高審美なコンポジットレジン修復も増えてきました。

「ライトライト」は審美性が求められる前歯のシェードテイキングに適した光を提供し、より精度の高いシェードテイキングが可能です。

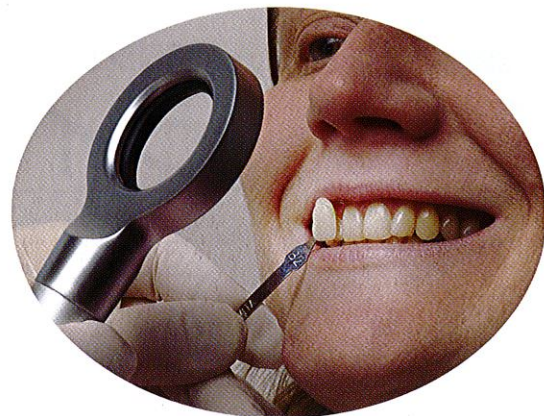

自然光に近い5500K、高い演色性を発するLEDライト

シェードテイキングに適しているのは日中北向きの窓からの太陽光が望ましいと言われています。ライトライトはその太陽光に近い5500Kの光を発することができます。また、演色指数も92と高いのでより本来の色に近い状態で色調を見分けることができます。

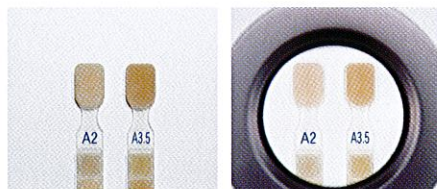

蛍光灯下

ライトライト使用

色温度

光の色を数値化した物です。太陽光であれば5000K～6000Kになります。



演色性

ライトの光が照らした物体をどれだけ忠実な色で照らす事ができるかを表しています。演色指数の数値が高いほど物体本来の色に近くなります。



チェアサイドで使いやすいコンパクトサイズ

180g*と軽量で片手で扱えるシンプルな形状。コードレスなのでチェアサイドで手軽に使用できます。

*単三電池2本分の重さを含む

医院とラボの併用でシェードの誤差を低減

医院のチェアサイドだけではなく、ラボサイドでも同じように「ライトライト」を使用すれば同じ条件下で色調差の少ない技工物を製作する事ができます。

LEDシェードテイキングライト ライトライト

標準価格 32,800円 610200



商品仕様

LED	6灯
LED色温度	5500K
演色指数	92
電池	単三電池2本
電池寿命	連続点灯 約5時間
全長	176mm
寸法	LED部径 φ53mm
	ハンドル部径 φ19.6mm
質量	180g(電池含む)

商品構成

本体 1個
単三電池 2本
ナチュラルカラータブ 25枚
取扱説明書

電池交換インジケター

バッテリー残量がわずかなときにON/OFFボタンを押すと、LEDライトが2度点滅して電池交換時期を知らせてくれます。

関連製品

クリアフィル®マジェスティ® ES-2
シェードガイド

標準価格 8,000円 243001



実物大

●標準価格の後の6ケタの数字は商品コードです。●掲載商品の標準価格は、2013年 1月21日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。●仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。

製造販売 アドデント

発売 株式会社モリタ

大阪本社 大阪府吹田市垂水町3-33-18 〒564-8650 TEL:06-6380-2525
東京本社 東京都台東区上野2-11-15 〒110-8513 TEL:03-3834-6161
www.dental-plaza.com

●この印刷物は、環境にやさしい「植物性インク」「植林木使用紙」を使用しています。

PUB No.M232.1810-1-000.1301.12.000N-10

有限会社 マルヤマ歯科商店