

柔らか素材で歯面に密着
フッ化物歯面塗布の
新しい選択

薬液用 フッ化物歯面塗布トレー

new

PENE-TRAY

ペネトレー



FREE SAMPLE

サンプル
あります

患者さんに合わせてアーチを調整
歯牙にしっかり密着

薬液を浸透させ患者さんに噛んでもらう
2ステップで施術可能

PENE-TRAY

ペネトレー

柔らかい素材で患者さんにも優しい使用感

お口に入れるものだから安心の国内生産

日本人向けのサイズSS・S・Mの3種類をご用意

薬液・フォーム・ゼリーで使用可能

使用方法

1



歯面を可能な範囲で
清掃する

2



両面に直接薬液を
染み込ませる

3



口腔内に挿入し、
歯面に密着させ軽くかませる

4




塗布後しばらくは
うがい、飲食させない

※薬液は別売りとなります。

サイズ・価格

サイズ	SS	S	M
幅 (mm)	85	100	130
高さ (mm)	15	20	30
奥行 (mm)	13	13	13
価格	全サイズ共通 100個入：13,500円		

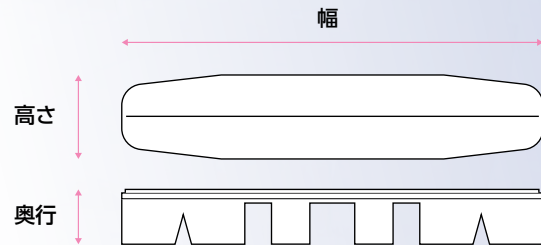

※サイズにより形状が異なります。
※仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、
予めご了承ください。
※価格は2022年3月現在のものです。消費税は含まれておりません。

関連製品

フッ化ナトリウム液 ネオ

歯面塗布に利用できる、う触予防用フッ化ナトリウム液（中性）です。

承認番号：14200AMZ00018000 製造販売元：ネオ製薬工業株式会社

包装：300ml

価格：3,600円



本製品に関するお問い合わせ先

 株式会社ナルコーム

営業所 〒271-0091 千葉県松戸市本町11-5 明治安田生命松戸ビル5階

TEL. 047-364-7656 FAX. 047-364-7657

E-mail info@narcohm.co.jp URL <https://www.narcohm.co.jp>



製品情報ページ

